



23313419 V4a Coloplast es una marca registrada de Coloplast A/S.  
© [08-2012] Todos los derechos reservados. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk (Dinamarca).

#### Advertencias

La reutilización de este producto de un sólo uso podría ocasionar riesgos para el usuario.

Su reciclaje, limpieza, desinfección y esterilización podrían dañar las características del producto, lo cual supondría un riesgo añadido para el paciente de sufrir lesiones o infecciones.

#### Precauciones

El autosondaje es un procedimiento habitual y seguro. No obstante, es importante que consulte previamente a un médico para que le aconseje sobre cómo efectuarlo y que siga rigurosamente estas instrucciones.

Asimismo, si padece síntomas de infección de las vías urinarias, como fiebre, molestias al vaciar la vejiga, ganas frecuentes de orinar o presencia de sangre en la orina, consulte a su médico o enfermero.

Si le han diagnosticado estenosis uretral, consulte a un profesional sanitario.

No utilice este producto si el envase está dañado. No lo reesterilice.

Mantenga el producto alejado de la luz del sol. Almacene los productos en horizontal a temperatura ambiente y en posición horizontal. La exposición a temperaturas extremas (entre -20 y 60 °C) durante un máximo de 24 horas no dañaría el producto.

#### Indicaciones

La sonda es estéril y sólo para uso intermitente.

#### Información

Este producto es una sonda lubricada con solución estéril conectada a una bolsa.

Efectúe el sondaje y retire la sonda una vez haya vaciado la vejiga.

La solución en la que está impregnada la sonda es inocua. No obstante, tenga cuidado al abrir y manipular el producto, ya que si se derrama y no se limpia inmediatamente, puede manchar la ropa.

Coloplast no se responsabiliza de las lesiones u otros daños que pudieran producirse si el producto no se utiliza conforme a las presentes recomendaciones de uso.

## 1. Apertura / preparación



En primer lugar, lávese las manos y la zona que rodea el orificio uretral. Es importante evitar la transferencia de bacterias de sus manos a la sonda.



Gire y retire la cubierta.



Desdoble la bolsa.



Gire y extraiga la sonda.

## 2. Aplicación / introducción



*Mujeres:* introduzca la sonda en la uretra hasta que la orina empiece a fluir.



*Hombres:* levante el pene con una mano para que la uretra quede recta. Introduzca la sonda en la uretra hasta que la orina empiece a fluir.

## 3. Retirada



Mujeres



Hombres

Hombres y mujeres: cuando la orina deje de fluir, saque la sonda 1 ó 2 cm. Si la orina vuelve a fluir, espere hasta que se detenga. Después, vuelva a tirar de la sonda 1 ó 2 cm. Cuando la vejiga esté vacía, retire la sonda.


## 4. Vaciado

Vuelva a sellar la sonda girándola de nuevo en el envase.






Abra la bolsa de orina rasgando la pestaña de la zona superior.

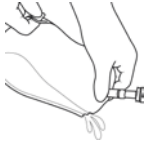

Vacíe la bolsa en el inodoro y deseche la sonda y la bolsa en el contenedor de residuos domésticos.

**Símbolo**

<b>WO</b>	Orden de trabajo Número de producción que identifica el envase de una orden específica. (El número del lote hace referencia a la serie de producción.)
	No lo utilice si el envase está dañado.