


Bruksanvisning

23314458 Version 1

Coloplast-logoen er et registrert varemerke som tilhører Coloplast A/S. Med alle rettigheter. © [2013-03]

Bruksanvisning for Peristeen analpropp

Analproppen kan brukes av personer som lider av avføringsinkontinens eller som har problemer med ufrivillig luftutslipp (flatulens). Den fungerer som en effektiv barriere mot avføring i rektum.

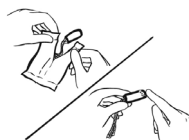

1. Tilberedning

Smør en liten mengde Peristeen-gele på tuppen av Peristeen-analproppen. Andre smøremidler kan brukes i stedet.

2. Innsetting

Sett Peristeen-analproppen forsiktig inn i anus, på samme måte som du ville gjort med en vanlig stikkpille. Sørg for at hele Peristeen-analproppen føres inn i rektum, like innen for rektallukkemuskelen. La gas-bindet henge utenfor kroppen.



3. Bruk

Peristeen-analproppen er nå korrekt plassert i rektum og vil raskt utvide seg til full størrelse, etter som filmen løses opp i kroppens naturlige varme og fuktighet. Den kan sitte i rektum i opptil 12 timer.



4. Fjerning

Peristeen-analproppen fjernes fra rektum ved å trekke lett i gasbindet som sitter fast i den. Fjerning av analproppen vil ikke aktivere tømmerrefleksen, så det er ikke nødvendig å skynde seg. En ny Peri-steen-analpropp kan innføres like etter at den gamle er tatt ut. Kast Peristeen-analproppen i søppelbøtten IKKE i toalettet.



Merk: Peristeen-analproppen må fjernes fra rektum ikke mer enn 12 timer etter at den ble satt i. Dersom du opplever vansker med å ta ut Peristeen analpropp, bør du slutte å bruke den og kontakte legen.

Indikasjoner

Peristeen-analproppen er ment som en barriere mot avføring i rektum.

Kontraindikasjoner

Analproppen må ikke brukes hvis du lider av:

- Hemorroider (3. og 4. grad)
- Analstenose

Informasjon

Coloplast påtar seg ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå dersom dette produktet brukes på en måte som motstrider de gjeldende anbefalingene fra Coloplast. Det tar litt tid å bli vant med analproppen hvis du har normal følelse i rektum. Dette er ofte ikke tilfelle for personer som har redusert eller manglende følelse.

Avføringen må være fast og formet.

Analproppen fås i to størrelser. Hvilken størrelse som skal brukes, kan ikke bestemmes på forhånd. Prøv begge størrelsene og velg den som er mest effektiv.

Enkelte personer som bruker analproppen jevnlig, vil oppleve at proppen av og til blir skjøvet ut av rektum. Det finnes ingen klar årsak til denne reaksjonen, men erfaringen viser at den samme brukeren kan bruke proppen igjen etter en kort periode uten propp.

Vær forsiktig

Dette produktet bør ikke brukes uten vurdering av helsepersonell.

Kontakt helsepersonell før du bruker Peristeen analpropp for første gang, da profesjonell rådgivning ved bruk av proppen er å anbefale.

Analproppen skal ikke brukes hvis du har diaré.

Dersom Peristeen-analproppen puttes i munnen, vil den utvide seg og kan forårsake kvelning.

Ta ut analproppen når du føler behov for å ha avføring. Dersom du ikke har følelse i rektum og ikke føler trang til å ha avføring, anbefaler vi at proppen skiftes med jevne mellomrom.

Peristeen analpropp må fjernes fra rektum ikke mer enn 12 timer etter at den ble satt i. Dersom du opplever at analproppen er vanskelige å ta ut, bør du slutte å bruke den og kontakte helsepersonell.

Dersom du fortsatt har ubehag når du bruker Peristeen analpropp, bør du slutte å bruke den og kontakte helsepersonell.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Advarsel

Gjenbruk av engangsproduktet kan medføre potensiell skade for brukeren. Gjenbruk, rengjøring, desinfisering og sterilisering kan virke negativt inn på produktegenskapene, som kan medføre ytterligere risiko for fysisk skade eller infeksjon hos brukeren.