


Gebruiksaanwijzing

23314460 Version 1

Het Coloplast-logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S. Alle rechten voorbehouden. © [2013-03]

Gebruiksaanwijzing Peristeen Anaaltampon

De anaaltampon kan worden gebruikt door mensen die last hebben van fecale incontinentie of het ongewild verlies van winden (flatus). De Peristeen Anaaltampon is een doeltreffende afsluiting voor ontlasting in het rectum.

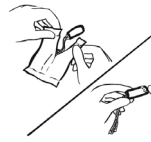

1. Voorbereiding

Breng een kleine hoeveelheid Peristeen Gel op het uiteinde van de Peristeen Anaaltampon aan. U mag ook een ander glijmiddel gebruiken.



2. Inbrengen

Duw de Peristeen Anaaltampon zachtjes in de anus, zoals een gewone zetpil. Zorg ervoor dat de hele Peristeen Anaaltampon vlak voorbij de anale sluitspier komt te zitten. Laat het koordje buiten het lichaam hangen.



3. Gebruik

De Peristeen Anaaltampon is nu op de juiste wijze in het rectum gebracht en zal snel uitzetten tot maximale grootte naarmate de filmlaag in de natuurlijke warmte en vochtigheid van het lichaam oplost. Bij volwassenen mag de Peristeen Anaaltampon maximaal 12 uur in het rectum blijven.



4. Verwijderen

De Peristeen Anaaltampon wordt uit het rectum verwijderd door zachtjes aan het koordje te trekken dat aan de Peristeen Anaaltampon is bevestigd. Verwijdering van de anaaltampon veroorzaakt geen reflex tot ontlasting, zodat u zich niet hoeft te haasten. Een nieuwe Peristeen Anaaltampon kan onmiddellijk worden ingebracht na verwijdering van de oude. Werp de Peristeen Anaaltampon na gebruik in de afvalbak en NIET in het toilet worden gedaan.

NB: De Peristeen Anaaltampon mag niet langer dan 12 uur in het rectum blijven. Raadpleeg uw arts indien u problemen ondervindt met het verwijderen van de Peristeen Anaaltampon.

Productbeschrijving

De Peristeen Anaaltampon is een afsluiting voor ontlasting in het rectum.

Contra-indicatie

De Peristeen Anaaltampon mag niet worden gebruikt wanneer u last hebt van:

- aambeien (3e en 4e graad)
- anale stenose

Informatie

Coloplast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van dit product op een andere wijze dan door Coloplast in de gebruiksaanwijzing wordt aanbevolen.

Wanneer u een normaal gevoel in het rectale gebied heeft, moet u enige tijd wennen aan de anaaltampon. Dit is vaak niet het geval bij mensen met een beperkt of verzwakt gevoel.

De ontlasting moet stevig en vast zijn.

De anaaltampon is beschikbaar in twee maten. De juiste maat kan niet vooraf worden bepaald. Probeer beide maten en kies de maat die het doeltreffendst werkt.

Sommige personen die de anaaltampon regelmatig gebruiken, kunnen ervaren dat de anaaltampon af en toe uit het rectum wordt geduwd. Er is geen duidelijke oorzaak, maar uit ervaring blijkt dat dezelfde gebruikers de anaaltampon met succes opnieuw kunnen gebruiken na een korte periode zonder anaaltampon.

Let op!

Dit product mag niet worden gebruikt zonder beoordeling van uw arts.

Raadpleeg altijd uw arts alvorens u de Peristeen Anaaltampon gaat gebruiken.

Professionele begeleiding is van vitaal belang bij het gebruik van de anaaltampon.

De Peristeen Anaaltampon mag niet worden gebruikt bij diarree.

De Peristeen Anaaltampon kan in de mond uitzetten en verstikking veroorzaken.

Verwijder de anaaltampon wanneer u drang tot ontlasting voelt. Indien u geen gevoel hebt in het rectale gebied en geen drang tot ontlasting voelt, raden we u aan om de anaaltampon op geregelde tijdstippen te vervangen.

De Peristeen Anaaltampon mag niet later dan 12 uur na het inbrengen worden verwijderd. Wanneer u problemen hebt bij het verwijderen van de Peristeen Anaaltampon, moet u uw arts raadplegen.

Wanneer u herhaaldelijk ongemak ervaart bij gebruik van de Peristeen Anaaltampon, mag u deze niet langer gebruiken en moet u uw arts raadplegen.

Buiten bereik van kinderen houden.

Waarschuwing

Hergebruik van het product voor eenmalig gebruik houdt een potentieel gevaar voor de gebruiker in. Recyclen, wassen, ontsmetten en steriliseren kunnen de productkenmerken aantasten, wat voor de gebruiker een bijkomend risico op lichamelijk letsel of infectie inhoudt.