

Achtung

Die Wiederverwendung dieses Einmalprodukts kann ein potenzielles Risiko für den Anwender darstellen. Wiederaufbereitung, Reinigung, Desinfektion und Resterilisation können die Produktmerkmale beeinträchtigen und somit ein zusätzliches Risiko einer körperlichen Schädigung oder Infektion des Anwenders darstellen.



Gebrauchsanweisung

23314461 Version 1

Das Coloplast-Logo ist eine eingetragene Marke der Coloplast A/S. Alle Rechte vorbehalten. © [2013-03]

Indikation

Der Peristeen Anal-Tampon dient als wirksame Barriere für den Stuhlgang im Rektum.

Kontraindikation

Peristeen Anal-Tampon darf nicht verwendet werden, wenn Sie die folgenden Erkrankungen aufweisen:

- Hämorrhoiden (3. oder 4. Grades)
- Verengung des Analkanals

Beschreibung

Der Peristeen Anal-Tampon besteht aus einem weichen, angenehmen und luftdurchlässigen Polyurethan-Schaumstoff. Der Tampon wird durch eine wasserlösliche Folie aus Polyvinylalkohol komprimiert, die sich bei Kontakt mit der Wärme und Feuchtigkeit im Rektum auflöst. Der Tampon dehnt sich auf seine vollständige Größe aus und dient somit als wirksame Barriere für den Stuhl.

Coloplast schließt jede Haftung für Verletzungen oder Schäden aus, die aus einer anderen als der den aktuellen Empfehlungen von Coloplast entsprechenden Verwendung dieses Produkts entstehen.

Bei normaler Sensibilität im rektalen Bereich ist eine Phase der Gewöhnung an den Anal-Tampon erforderlich. Dies ist häufig nicht der Fall, wenn die Sensibilität verringert oder gestört ist.

Der Stuhlgang muss fest und geformt sein.

Der Anal-Tampon ist in zwei Größen erhältlich. Die richtige Größe kann nicht vorher bestimmt werden. Es sollten beide Größen ausprobiert und die wirksamere Größe ausgewählt werden.

Einige regelmäßige Anwender des Anal-Tampons werden feststellen, dass der Tampon von Zeit zu Zeit aus dem Rektum rutscht. Es gibt keinen offensichtlichen Grund für diese Reaktion, doch den Erfahrungen nach kann der betroffene Anwender den Tampon erfolgreich wieder einsetzen, nachdem er die Anwendung eine kurze Zeit ausgesetzt hat.

Warnhinweis

Dieses Produkt darf nur nach Beurteilung durch einen Arzt verwendet werden.

Vor der ersten Verwendung des Peristeen Anal-Tampons das medizinische Fachpersonal aufsuchen, da eine professionelle Anleitung zur Verwendung des Tampons unerlässlich ist.

Der Anal-Tampon darf bei Diarrhö (Durchfall) nicht verwendet werden.

Wenn der Peristeen Anal-Tampon in den Mund gelangt, dehnt er sich aus und kann zum Ersticken führen.

Den Anal-Tampon bei dringendem Stuhldrang entfernen. Wenn keine Sensibilität im rektalen Bereich und somit auch kein Stuhldrang vorhanden ist, sollte der Tampon gemäß den Empfehlungen regelmäßig gewechselt werden.

Das Peristeen Anal-Tampon muss nach spätestens 12 Stunden entfernt werden. Sollten beim Entfernen des Peristeen Anal-Tampons Probleme auftreten, müssen Sie sich an Ihren Arzt wenden.


Wenn wiederholt ein Gefühl des Unbehagens bei der Anwendung des Peristeen Anal-Tampons auftritt, sollte die Anwendung abgebrochen und ein Arzt konsultiert werden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Anwendungshinweise

Anwendungsgebiete

Der Peristeen Anal-Tampon kann bei Stuhlinkontinenz und unwillkürlichem Abgang von Darmgasen eingesetzt werden. Er dient als effektive Barriere für den Stuhl im Rektum.

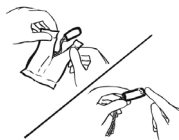

1. Vorbereitung

Streichen Sie eine kleine Menge von dem beigefügten Gel auf die Spitze des Peristeen Anal-Tampons. Alternativ können Sie auch ein anderes Gleitgel benutzen, sofern dies für die innere Anwendung (im Körper) zugelassen ist. Die Kompressionsfolie darf nicht entfernt werden.



2. Einführen

Führen Sie den Peristeen Anal-Tampon behutsam wie ein Zäpfchen in das Rektum ein. Der Peristeen Anal-Tampon muss vollständig in das Rektum, direkt bis hinter den Schließmuskel, eingeführt werden. Das Rückholband muss äußerlich sichtbar bleiben.



3. Anwenden

Der Peristeen Anal-Tampon ist nun richtig im Rektum positioniert und wird sich in kurzer Zeit auf seine vollständige Größe ausdehnen, wenn sich die Folie bei Kontakt mit der Wärme und Feuchtigkeit im Rektum aufgelöst hat. Der Anal-Tampon kann bis zu 12 Stunden im Rektum belassen werden.



4. Entfernen

Der Peristeen Anal-Tampon wird durch vorsichtiges Ziehen am Rückholband entfernt. Beim Entfernen des Anal-Tampons wird der Entleerungsreflex nicht ausgelöst. Es besteht also kein Grund zur Eile. Ein frischer Peristeen Anal-Tampon kann unmittelbar nach dem Entfernen des alten Tampons und nach einer ausreichenden Stuhlentleerung eingeführt werden.

Nach Gebrauch entsorgen Sie den Peristeen Anal-Tampon in einen Abfallbehälter – NICHT in die Toilette.

Hinweis: Der Peristeen Anal-Tampon muss nach spätestens 12 Stunden entfernt werden. Sollten beim Entfernen des Peristeen Anal-Tampons Probleme auftreten, wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt.