


El obturador anal puede utilizarse por personas con incontinencia fecal o flatulencia. Actúa como una barrera eficaz de las heces en el recto.

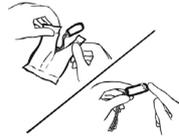

1. Preparación

Extienda una pequeña cantidad de gel Peristeen sobre la punta del obturador anal Peristeen. También puede utilizarse otro tipo de lubricante.

2. Colocación

Introduzca el obturador anal Peristeen en el ano con suavidad, como si fuese un supositorio. Compruebe que todo el obturador anal Peristeen está en el interior del recto, justo por encima del esfínter. Deje la gasa colgando fuera del cuerpo.



3. Uso

El obturador anal Peristeen estará colocado en la posición correcta en el recto y se dilatará enseguida hasta alcanzar su tamaño real, ya que la película que lo recubre se disolverá con el calor y la humedad. Puede permanecer en el recto hasta un máximo de 12 horas.



4. Retirada

El obturador anal Peristeen se extrae del recto tirando con suavidad de la gasa del obturador. La retirada del obturador no estimula el reflejo rectal, por lo que no es necesario retirarlo apresuradamente. Inmediatamente después de retirar el obturador, puede colocarse otro obturador anal Peristeen nuevo. Después de su uso, NO arroje el obturador anal Peristeen al inodoro, sino a la basura.



Nota: El obturador anal Peristeen debe retirarse antes de que transcurran 12 horas tras la introducción. Si experimenta molestias al retirar el obturador anal Peristeen, póngase en contacto con su médico.



Instrucciones de uso

23314462 Version 1

Coloplast es una marca registrada de Coloplast A/S. Todos los derechos reservados.© [2013-03]

Indicación

El obturador anal Peristeen está diseñado como barrera para las heces en el recto.

Contraindicaciones

El obturador anal Peristeen no debe utilizarse si padece:

- Hemorroides (3º y 4º grado)
- Estenosis anal

Información

Coloplast no se hace responsable de ninguna lesión o pérdida que pueda surgir por el uso de este producto sin seguir las recomendaciones actuales de Coloplast.

Las personas con sensibilidad normal en la zona rectal tardan un tiempo en acostumbrarse al obturador anal. En el caso de las personas con hipoestesia, no suele ser necesario.

Las deposiciones deben ser firmes y sólidas.

El obturador anal se presenta en dos medidas. No es posible determinar de antemano cuál es la más idónea. Pruebe las dos medidas y escoja la más eficaz.

Algunas personas que utilicen el obturador anal con regularidad notarán que este se expulsa del recto cada cierto tiempo. No existe ningún motivo aparente para esta reacción, pero la experiencia demuestra que esos mismos usuarios pueden volver a utilizarlo sin problemas tras un breve periodo de interrupción de su uso.

Precaución

Este producto no debe utilizarse sin la evaluación previa de su profesional sanitario. Consulte a su profesional sanitario antes de utilizar el obturador anal Peristeen por primera vez, ya que es fundamental la orientación profesional sobre el modo de empleo. El obturador anal no debe utilizarse si sufre diarrea.

Si se introduce en la boca, el obturador anal Peristeen se dilatará y podría provocar asfixia.

Retire el obturador anal si siente la necesidad de defecar. Si no tiene ninguna sensibilidad en la zona rectal y no siente la necesidad de defecar, se recomienda cambiar el obturador periódicamente.

El obturador anal Peristeen debe retirarse antes de que transcurran 12 horas tras la introducción. Si experimenta molestias al retirar el obturador anal Peristeen, póngase en contacto con su profesional sanitario.

Si experimenta molestias repetidas durante el uso del obturador anal Peristeen, deje de utilizarlo y póngase en contacto con su profesional sanitario.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Advertencia

La reutilización del producto de un sólo uso podría causar lesiones al usuario. Su reciclaje, limpieza, desinfección y esterilización pueden afectar a las características del producto y exponer al usuario a un riesgo adicional de lesión o infección.