


항문용 마개

Peristeen 항문용 플러그 사용 방법

이 제품은 대변실금이나 가스(방귀)가 본의 아니게 새어나오는 증상을 겪는 사람들이 사용할 수 있으며 항문에서 대변을 효과적으로 막아주는 기능을 합니다.

1. 준비

Peristeen 항문용 플러그 팁 부분에 Peristeen 젤을 소량만 바르십시오. 다른 윤활제를 대신 사용할 수도 있습니다.

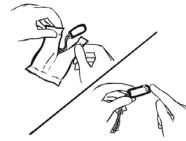

2. 삽입

기존에 좌약을 사용하던 것처럼 Peristeen 항문용 플러그를 항문에 부드럽게 삽입하십시오. Peristeen 항문용 플러그가 항문 괄약근에 정확하게 삽입이 되었는지 확인하십시오. 거즈는 체외에 매달린 채로 그냥 두십시오.



3. 사용

Peristeen 항문용 플러그가 직장내에 정확하게 삽입되면 필름은 체온과 수분으로 용해되면서 최대 크기로 빠르게 팽창합니다. 이 제품은 직장 내에서 최대 12시간 동안 유지될 수 있습니다.



4. 제거

Peristeen 항문용 플러그 안에서 굳은 거즈를 부드럽게 잡아당겨 항문에서 Peristeen 항문용 플러그를 제거합니다. 항문용 플러그를 제거해도 배설 작용은 일어나지 않으므로 서두를 필요가 없습니다. 사용한 제품을 제거한 후 새로운 Peristeen 항문용 플러그를 바로 삽입할 수 있습니다. 사용 후 Peristeen 항문용 플러그를 변기에 버리지 말고 폐기물통에 버리십시오.



사용지침
23314472 Version 1
Coloplast 로고는 Coloplast A/S의 등록 상표입니다. All rights reserved.©
[2013-03]

적응증
Peristeen 항문용 플러그는 직장내에서 대변을 막아주는 용도로 사용됩니다.

금기 사항
Peristeen 항문용 플러그는 다음 증상이 있는 사람이 사용해서는 안 됩니다.
- 치질(3도 및 4도)
- 항문협착증

정보
Coloplast는 본 제품을 Coloplast의 현재 권장 사항에 반하는 방법으로 사용하여 발생 하는 상해 또는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.
항문용 플러그는 직장 부위에서 통상적인 감각을 느낄 수 있는지 파악하는 데 다소 시간이 걸릴 수 있으며 일반적으로 감각이 약해졌거나 손상된 사람은 해당되지 않습니다.
대변은 단단하면서 형태를 유지해야 합니다.
항문용 플러그는 두 가지 크기로 제공되며 사전에 크기를 선택할 수 없습니다. 두 가지 크기를 시험해 본 후 가장 효과적인 것을 선택하십시오.
항문용 플러그를 정기적으로 사용하는 일부 환자는 플러그가 가끔 항문 밖으로 밀리는 것을 느끼게 됩니다. 이러한 현상에는 특별한 이유가 없습니다. 그러나 경험상 플러그를 잠깐 제거했다가 플러그를 사용하여 다시 수월하게 삽입할 수 있음을 알려드립니다.

주의
이 제품은 의료 전문가의 평가 없이 사용해서는 안 됩니다.
플러그 사용 시 전문의의 지도가 반드시 필요하므로 Peristeen 항문용 플러그를 처음 사용하기 전에 의료 전문가와 의논 하십시오.
항문용 플러그는 설사 중인 사람이 사용해서는 안 됩니다.
만일 입에 들어가면 Peristeen 항문용 플러그는 팽창하여 질식을 유발할 수 있습니다. 배변감이 있을 때는 항문용 플러그를 제거하십시오. 직장 부위에 아무 감각이 없고 배변감이 없다면 규칙적인 플러그 교체를 권장합니다.
Peristeen 항문용 플러그는 삽입 후 12시간 전에 제거해야 합니다. Peristeen 항문용 플러그를 제거하는 데 어려움이 있는 경우 의료 전문가에게 연락해야 합니다.
Peristeen 항문용 플러그 사용시 지속적으로 불편함을 느낀다면 사용을 멈추고 의료 전문가에게 연락하십시오.
어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

경고
일회용 제품을 재사용하면 사용자에게 대해 잠재적 피해를 초래할 수 있습니다. 재처리, 세척, 소독 및 살균 작업은 제품 특성을 약화시킬 수 있으며 사용자에게 대해 추가적인 신체적 유해 또는 감염 위험을 초래할 수 있습니다.