


El tapón anal puede ser usado por personas con incontinencia fecal o que sufren de escape involuntario de gases (flatos). Funciona como una barrera efectiva de las heces en el recto.

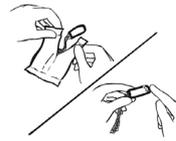

**1. Preparación**

Unte una pequeña cantidad de Peristeen Gel en la punta del Tapón Anal Peristeen. Otros lubricantes también pueden ser usados.

**2. Inserción**

Inserte el Tapón Anal Peristeen suavemente en el ano, como si estuviera usando un supositorio normal. Asegúrese de que todo el Tapón Anal Peristeen quede insertado en el recto, justo dentro del esfínter anal. Deje que la gasa cuelgue fuera de su cuerpo.



**3. Uso**

El Tapón Anal Peristeen ya está correctamente colocado en el recto y se expande rápidamente a su tamaño total y la película se disuelve en el calor y la humedad natural del cuerpo. Puede ser dejado en el recto hasta por 12 horas.



**4. Remoción**

El Tapón Anal Peristeen se retira del recto tirando suavemente de la gasa incorporada en el Tapón Anal Peristeen. La remoción del tapón anal no activa el reflejo para vaciado, de forma que no hay prisa. Un nuevo Tapón Anal Peristeen debe ser insertado de inmediato después de la remoción del antiguo. Después de su uso, coloque el Tapón Anal Peristeen en un basurero NO en el inodoro.



**Instrucciones de uso**

23315159 Version 1

Coloplast es una marca registrada de Coloplast A/S. Todos los derechos reservados.© [2013-11-04]

**Indicación**

El Tapón Anal Peristeen está diseñado para actuar como una barrera para las heces en el recto.

**Contraindicaciones**

- No debe usar El Tapón Anal Peristeen si sufre de:
- Hemorroides (de grado III y IV)
- Estenosis anal

**Información**

Coloplast no se hace responsable de ninguna lesión o pérdida que pueda surgir por el uso de este producto sin seguir las recomendaciones actuales de Coloplast. Si tiene una sensibilidad normal en la zona rectal, tardará un poco de tiempo en habituarse al tapón anal. Esto no suele ocurrir en personas con déficits o trastornos de sensibilidad. Las heces deben ser firmes y bien formadas. El tapón anal está disponible en dos tamaños. El tamaño no se puede determinar de antemano. Pruebe ambos tamaños y opte por el que resulte más eficaz. Algunas personas que utilicen el tapón anal habitualmente notarán que este es empujado fuera del recto cada cierto tiempo. Esta reacción no tiene una causa aparente y la experiencia demuestra que el mismo usuario puede volver a utilizar el tapón con buenos resultados tras un breve período sin utilizarlo.

**Precaución**

Este producto no se debe utilizar sin la evaluación previa de su profesional sanitario. Contacte con su profesional sanitario antes de utilizar el Tapón Anal Peristeen por primera vez, ya que la orientación profesional en el uso del tapón es esencial. No utilice el tapón anal si padece diarrea. Si se coloca en la boca, el Tapón Anal Peristeen se expande y puede provocar asfixia. Extraiga el tapón anal cuando sienta necesidad de defecar. Si no tiene sensibilidad en la zona rectal y no reconoce la necesidad de defecar, es recomendable que cambie el tapón a intervalos regulares. El Tapón Anal Peristeen debe retirarse transcurridas no más de 12 horas desde su inserción. Si tiene dificultades para retirar el Tapón Anal Peristeen, debe contactar con su profesional sanitario. Si siente molestias frecuentes al utilizar El Tapón Anal Peristeen, deje de utilizarlo y contacte con su profesional sanitario. Manténgase fuera del alcance de los niños.

**Advertencia**

La reutilización del producto de un sólo uso podría causar lesiones al usuario. Su reciclaje, limpieza, desinfección y esterilización pueden afectar las características del producto y exponer al usuario a un riesgo adicional de lesión o infección.