

Varning!

Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning innebär en risk för användaren.

Ombearbetning, rengöring, desinficering och sterilisering äventyrar produktens integritet, vilket i sin tur utsätter patienten för en ökad risk för fysiska skador eller infektion.

Försiktighet!

Självkateterisering är en vanlig och säker procedur. Det är dock viktigt att först kontakta läkare för vägledning och råd innan du utför självkateterisering. Var dessutom noga med att följa nedanstående anvisningar noggrant.

Kontakta läkaren/sjuksköterskan i händelse av en urinvägsinfektion med symptom som feber, obehag vid blåstömning, överaktiv blåsa eller blod i urinen.

Rådfråga vårdpersonal om du har fått diagnosen urinvägsförträngning.

Använd inte produkten om förpackningen eller förseglingen är skadad. Sterilisera inte om produkten.

Skyddas mot direkt solljus. Förvara produkter horisontellt, i rumstemperatur och torrt. Produkten tar inte skada av upp till ett dygns exponering för extrema temperaturer (-20 till 60 °C).

Indikationer

Katetern är steril och endast avsedd för intermittent kateterisering.

Information

Denna produkt är en hydrofil kateter placerad i en steril lösning med vidhängande påse.

Slutför kateteriseringen utan onödiga dröjsmål och avlägsna katetern så fort urinblåsan har tömts.

Var försiktig när du öppnar produkten eftersom förpackningsvätskan kan ge fläckar på kläderna. I övrigt är vätskan ofarlig.

Coloplast tar inget ansvar för eventuella skador eller andra förluster som kan uppstå om produkten används på ett sätt som står i strid med Coloplasts aktuella rekommendationer.

Bruksanvisning för SpeediCath Compact Set




1 Öppna och förbereda


Börja med att tvätta händerna och området runt urinrörets mynning. Det är viktigt att undvika överföring av bakterier från händerna till katetern.




Vrid och avlägsna hylsan.

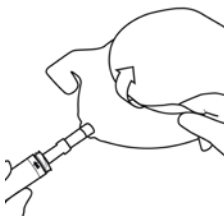

Veckla ut påsen.

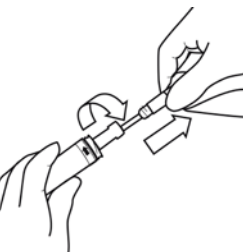


Vrid och dra ut katetern.

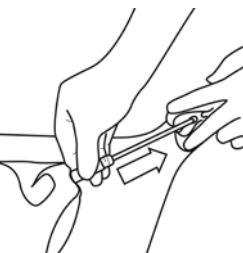

2 Användning och införing

Kvinnor: För in katetern i urinröret tills urinflödet börjar.

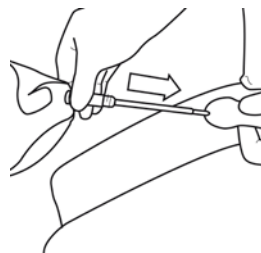

Män: Håll upp penisen med ena handen för att räta ut urinröret. För in katetern i urinröret tills urinflödet börjar.




3 Borttagning

Män + kvinnor: Dra ut katetern 1–2 cm när urinflödet upphör. Om urinflödet börjar igen väntar du tills det har upphört innan du drar ut katetern ytterligare 1–2 cm. Avlägsna katetern när blåsan är tom.



4 Tömning


Återförslut katetern genom att vrida tillbaka den in i förpackningen.

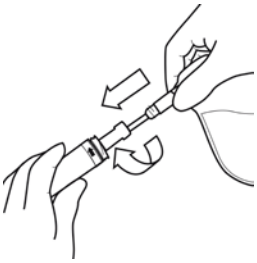

Öppna urinpåsen genom att riva av avrivningsfliken.



Töm påsen i toaletten och kasta katetern och påsen i hushållsavfallet.

Symbol	
WO	Arbetsorder. Tillverkningsnummer som identifierar förpackningen i en specifik beställning (satsnumret avser tillverkningsserien).
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad