

Tapón anal



Instrucciones de uso

23320184 Version 1

El logotipo de Coloplast es una marca registrada de Coloplast A/S. Todos los derechos reservados. ©
2017-10-12

Indicaciones

El Tapón Anal Peristeen está diseñado para actuar como una barrera para las heces en el recto.

Contraindicaciones

No debe usar El Tapón Anal Peristeen si sufre de:
- Hemorroides (de grado III y IV)
- Estenosis anal

Información

Coloplast no se hace responsable de ninguna lesión o pérdida que puedan producirse si este producto no se utiliza siguiendo las actuales recomendaciones de Coloplast.

Si tiene una sensibilidad normal en la zona rectal, tardará un poco de tiempo en habituarse al tapón anal. Esto no suele ocurrir en personas con déficits o trastornos de sensibilidad.

El tapón anal está disponible en dos tamaños. El tamaño no se puede determinar de antemano. Pruebe ambos tamaños y opte por el que resulte más eficaz.

Algunas personas que utilicen el tapón anal habitualmente notarán que este es empujado fuera del recto cada cierto tiempo. Esta reacción no tiene una causa aparente y la experiencia demuestra que el mismo usuario puede volver a utilizar el tapón con buenos resultados tras un breve periodo sin utilizarlo.

Precauciones

Este producto no se debe utilizar sin la evaluación previa de su profesional sanitario.

Contacte con su profesional sanitario antes de utilizar el Tapón Anal Peristeen por primera vez, ya que la orientación profesional en el uso del tapón es esencial.

No utilice el tapón anal si padece diarrea.

Si se coloca en la boca, el Tapón Anal Peristeen se expande y puede provocar asfixia.

Extraiga el tapón anal cuando sienta necesidad de defecar. Si no tiene sensibilidad en la zona rectal y no reconoce la necesidad de defecar, es recomendable que cambie el tapón a intervalos regulares.

El Anal Tapón Peristeen debe retirarse transcurridas no más de 12 horas desde su inserción. Si tiene dificultades para retirar el Tapón Anal Peristeen, debe contactar con su profesional sanitario.

Si siente molestias frecuentes al utilizar El Tapón Anal Peristeen, deje de utilizarlo y contacte con su profesional sanitario.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Advertencia

La reutilización del producto de un solo uso podría causar lesiones al usuario. Su reciclaje, limpieza, desinfección o esterilización pueden afectar a las características del producto y exponer al usuario a un riesgo adicional de lesión o infección.

Modo de empleo de Peristeen Tapón Anal

El tapón anal puede ser usado por personas con incontinencia fecal o que sufren de escape involuntario de gases (flatos). Funciona como una barrera efectiva de las heces en el recto.



1. Preparación

Unte una pequeña cantidad de Peristeen Gel en la punta del Tapón Anal Peristeen. Otros lubricantes también pueden ser usados.



2. Inserción

Inserte el Tapón Anal Peristeen suavemente en el ano, como si estuviera usando un supositorio normal. Compruebe que todo el tapón anal Peristeen este en el interior del recto, justo en los esfínteres externos e internos. Deje que la gasa cuelgue fuera de su cuerpo.



3. Uso

El Tapón Anal Peristeen estará colocado en posición correcta en el recto y se expandirá rápidamente a su tamaño total y se expande rápidamente a su tamaño total y la película se disuelve con el calor y la humedad natural del cuerpo. Puede permanecer en el recto hasta por 12 horas.



4. Remoción

El Tapón Anal Peristeen se retira del recto tirando suavemente de la gasa incorporada en el Tapón Anal Peristeen. La remoción del tapón anal no activa el reflejo para vaciado, por lo que no es necesario retirarlo apresuradamente. Un nuevo Tapón Anal Peristeen debe ser insertado de inmediato después de la remoción del antiguo. Después de su uso, coloque el Tapón Anal Peristeen en un basurero NO en el inodoro.

Eliminación

El producto está diseñado para un solo uso y debe eliminarse de conformidad con las normas locales, por ejemplo, junto con los residuos domésticos comunes.

No tire el producto por el inodoro.