

Advertencia

La reutilización del producto de un sólo uso podría causar lesiones al usuario. Su reciclaje, limpieza, desinfección y esterilización pueden afectar a las características del producto y exponer al usuario a un riesgo adicional de lesión o infección.

Modo de empleo del obturador anal Peristeen

El obturador anal puede utilizarse por personas con incontinencia fecal o flatulencia. Actúa como una barrera eficaz de las heces en el recto.



1. Preparación

Extienda una pequeña cantidad de gel Peristeen sobre la punta del obturador anal Peristeen. También puede utilizarse otro tipo de lubricante.



2. Colocación

Introduzca el obturador anal Peristeen en el ano con suavidad, como si fuese un supositorio. Compruebe que todo el obturador anal Peristeen está en el interior del recto, justo en los esfínteres externo e interno del ano. Deje la gasa colgando fuera del cuerpo.



3. Uso

El obturador anal Peristeen estará colocado en la posición correcta en el recto y se dilatará enseguida hasta alcanzar su tamaño real, ya que la película que lo recubre se disolverá con el calor y la humedad. Puede permanecer en el recto hasta un máximo de 12 horas.



4. Retirada

El obturador anal Peristeen se extrae del recto tirando con suavidad de la gasa del obturador. La retirada del obturador no estimula el reflejo rectal, por lo que no es necesario retirarlo apresuradamente. Inmediatamente después de retirar el obturador, puede colocarse otro obturador anal Peristeen nuevo.

Eliminación

El producto está diseñado para un solo uso y debe eliminarse según la reglamentación local (por ejemplo, junto con los residuos domésticos comunes).

No tire el producto por el inodoro.



Instrucciones de uso

23320307 Version 2

El logotipo de Coloplast es una marca registrada de Coloplast A/S. Todos los derechos reservados. © 2017-12-11

Coloplast de Argentina S.A.
Boulevard 547 - Piso 8
(C1106ABG) C.A.B.A. - Argentina
Tel: (011) 3985-5900
Atención Gratuita al usuario:
0800-777-7008
www.coloplast.com.ar
Dir.Téc:Farm. Mabel
A.Urruzola M.N. N°: 9.175
AUTORIZADO POR ANMAT PM N°710-9

Indicación

Peristeen Anal Plug está diseñado para actuar como una barrera para las heces en el recto.

Información

Coloplast no se hace responsable de ninguna lesión o pérdida que pueda surgir por el uso de este producto sin seguir las recomendaciones actuales de Coloplast.

Si tiene una sensibilidad normal en la zona rectal, tardará un poco de tiempo en habituarse al tapón anal. Esto no suele ocurrir en personas con déficit o trastornos de sensibilidad.

Las heces deben ser firmes y bien formadas.

El tapón anal está disponible en dos tamaños. El tamaño no se puede determinar de antemano. Pruebe ambos tamaños y opte por el que resulte más eficaz.

Algunas personas que utilicen el tapón anal habitualmente notarán que este es empujado fuera del recto cada cierto tiempo. Esta reacción no tiene una causa aparente y la experiencia demuestra que el usuario puede volver a utilizar el tapón con buenos resultados tras un breve período sin utilizarlo.

Precaución

Este producto no se debe utilizar sin la evaluación previa de su médico.

Contacte con su médico antes de utilizar Peristeen Anal Plug por primera vez, ya que la orientación profesional en el uso del tapón es esencial.

No debe utilizar el tapón anal si padece diarrea.

Si se coloca en la boca, el Peristeen Anal Plug se expande y puede provocar asfixia.

Extraiga el tapón anal cuando sienta necesidad de defecar. Si no tiene sensibilidad en la zona rectal y no reconoce la necesidad de defecar, es recomendable que cambie el tapón a intervalos regulares.

Peristeen Anal Plug debe retirarse transcurridas no más de 12 horas desde su aplicación. Si tiene dificultades para retirar Peristeen Anal Plug, debe contactar con su médico. Si siente molestias frecuentes al utilizar Peristeen Anal Plug, deje de utilizarlo y contacte con su médico.

Manténgase fuera del alcance de los niños.