

Female

Información

Este producto es una sonda prelubricada con solución estéril conectada a una bolsa.

Efectúe el sondaje sin tardar demasiado y retire la sonda una vez haya vaciado la vejiga.

Tenga cuidado al abrir y manipular el producto, ya que el líquido que contiene podría manchar la ropa. Dicho líquido es totalmente inocuo.


Coloplast no se hace responsable de ninguna lesión o cualquier otra pérdida que pueda surgir por el uso de este producto sin seguir las recomendaciones actuales de Coloplast.

Utilización del juego SpeediCath Compact




1 Apertura / preparación


En primer lugar, lávese las manos y la zona que rodea el orificio uretral. Es importante evitar la transferencia de bacterias de sus manos a la sonda.

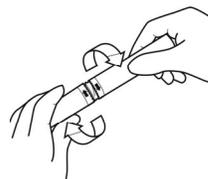


Gire y retire la cubierta.

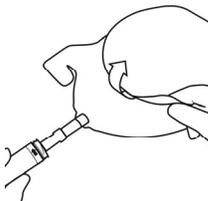

Desdoble la bolsa.

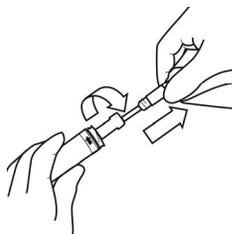

Gire y extraiga la sonda.

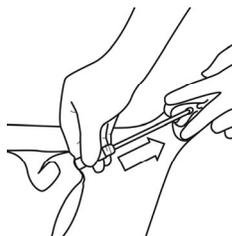

2 Aplicación / introducción

Introduzca la sonda en la uretra hasta que la orina empiece a fluir.



3 Retirada

Cuando la orina deje de fluir, extraiga la sonda aproximadamente 3/8 a 1 pulgada (1 a 2 cm). Si la orina comienza a fluir nuevamente, espere hasta que se detenga. Luego extraiga la sonda de 3/8 a 1 pulgada (1 a 2 cm). Cuando la vejiga esté vacía, extraiga la sonda.

Fabricante: Coloplast A/S 3050 DK
Distribuidor: Coloplast Corp., 1601 West River Road North
Minneapolis, MN 55411 Tel. 1-800-533-0464 www.coloplast.us
23322347, V5.0b The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S.
© [2020-11] All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark.

Precaución: La ley federal restringe este dispositivo, el cual solo puede ser vendido por o suministrado bajo la orden de un profesional de la salud certificado.

Advertencias

La reutilización de este producto de un solo uso podría plantear un riesgo potencial para el usuario.

El reprocesamiento, la limpieza, la desinfección y la esterilización pueden afectar a las características del producto y exponer al paciente a un riesgo adicional de lesión o infección.

Precauciones

El autosondaje es un procedimiento habitual y seguro. No obstante, es importante que consulte previamente a un médico para que le aconseje sobre cómo efectuarlo y que siga rigurosamente estas instrucciones.

Asimismo, si padece síntomas de infección de las vías urinarias, como fiebre, molestias al vaciar la vejiga, ganas frecuentes de orinar o presencia de sangre en la orina, consulte a su médico o enfermero.

Si le han diagnosticado estenosis uretral, consulte a un profesional sanitario.

No lo utilice si el envoltorio o el sello están dañados. No lo reesterilice.

Mantenga el producto alejado de la luz del sol. Almacene los productos en horizontal a temperatura ambiente y en condiciones secas. La exposición a temperaturas extremas (-0,4 ° F / -18 ° C y hasta 140 ° F / 60 ° C) durante un máximo de 24 horas no dañaría el producto.

Indicaciones


La sonda es estéril y solo para uso intermitente.

El juego SpeediCath Compact está indicado para su uso en pacientes con retención crónica de orina y residuo posmiccional (PVR) debido a disfunciones neurogénicas y no neurogénicas en la micción. La sonda se introduce en la uretra hasta la vejiga para drenarla.

Este dispositivo es de uso exclusivo para mujeres.

4 Vaciado


Vuelva a sellar la sonda girándola de nuevo en el envase.

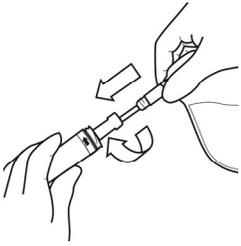

Abra la bolsa de orina arrancando el tapón.



Vacíe la bolsa en el inodoro y deseche la sonda y la bolsa en los residuos domésticos.

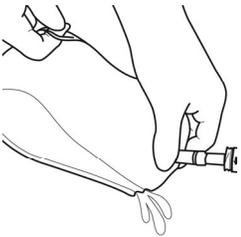

Símbolo

	No utilizar si el envoltorio está dañado
	Consulte las instrucciones de uso
	No reutilizar
	Fecha de caducidad (AAAA-MM-DD)
	Esterilizado por radiación
	Código de lote
	Fecha de fabricación (AAAA-MM-DD)
	Fabricante
	Mantener protegido de la luz del sol
	Con prescripción médica únicamente
	Envase reciclable
	En esta dirección hacia arriba
	(Global Trade Item Number) Número mundial de artículo comercial