

# Brava®

Elastisk tejp  
Elastisk tejp XL  
Elastisk tejp, bälte  
Elastisk tejp, rak



## Bruksanvisning

23322572 Version 1  
Coloplasts logotyp är ett registrerat varumärke som tillhör Coloplast A/S. Med ensamrätt.©  
2019-10-25



## Avsett syfte

Brava Elastisk tejp är avsedd att stödja kanten på stomibasplattan/häftan genom att ge bättre vidhäftning på den intakta peristomala huden.

## Indikationer

Brava Elastisk tejp är indikerad för personer som använder en stomipåse och basplatta/häfta.

## Varningar

Återanvändning av denna produkt för engångsbruk rekommenderas inte då det kan leda till korskontaminering.

Ombearbetning, rengöring, desinficering och/eller sterilisering kan försämra produktens egenskaper och utsätta användaren för en ytterligare risk för fysiska skador eller infektion.

## Försiktighetsåtgärder

Skyddas från solljus eftersom det kan påverka produktkvaliteten.

Sträck inte ut produkten när den appliceras, eftersom det kan påverka produktens funktion.

## Information

Produkt för engångsbruk.

Produkterna ska förvaras i lådan tills de tas ur för användning, eftersom lådan skyddar produkterna och etiketten på lådan innehåller viktig information, som Lot-nummer, utgångsdatum och en unik streckkod.

Produkten behöver inte tas bort före en MR-skanning eftersom den är MR-säker.

Coloplast antar inget ansvar för eventuella skador eller förluster som kan uppstå om produkten används på ett sätt som strider mot Coloplasts aktuella rekommendationer.

## Speciella förvaringsförhållanden

Skyddas från solljus.

Förvara produkten horisontellt.


## Användarinstruktioner

### Öppna förpackningen

Öppna genom att dra i den turkosa fliken. Riv inte av fliken då den gör att du kan försluta förpackningen igen.

### Applicering


#### Elastisk tejp Elastisk tejp XL

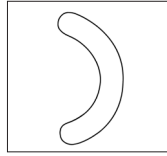


Ta bort något av de båda skyddspapperen före applicering.

Placera tejp efter behag på basplattan/häftan där du behöver stöd. Kom ihåg att en del av häftan ska täckas av tejp.

Sträck inte ut produkten när den appliceras.

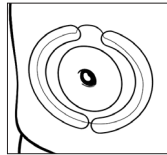


Ta bort det återstående skyddspapperet och släta ut tejp på huden. Repetera om det behövs.

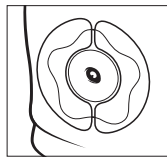

Elastisk tejp XL kan också användas med basplatta från SenSura® Mio Concave.

### Applicering


#### Elastisk tejp, bälte

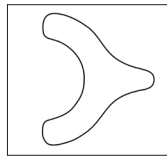

Ta bort något av de båda skyddspapperen före applicering.

Placera tejp efter behag på basplattan/häftan där du behöver extra stöd. Kom ihåg att en del av häftan ska täckas av tejp.


Sträck inte ut produkten när den appliceras.

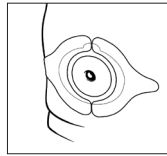

Ta bort det återstående skyddspapperet och släta ut tejp på huden. Repetera om det behövs.

### Applicering


#### Elastisk tejp, rak

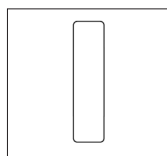

Ta bort något av de båda skyddspapperen före applicering.

Placera tejp efter behag på den fyrkantiga basplattan/häftan där du behöver stöd. Kom ihåg att en del av häftan ska täckas av tejp.

Sträck inte ut produkten när den appliceras.

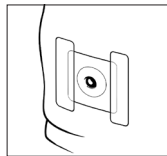

Ta bort det återstående skyddspapperet och släta ut tejp på huden. Repetera om det behövs.

Du kan placera tejp var som helst där du tycker att du behöver stödja basplattan/häftan.

### Avlägsnande av tejp

Tejp kan lossna tillsammans med häftan. Om det behövs kan man lösgöra tejpens kanter och försiktigt dra i tejp för att ta bort den.

### Avfallshantering

Produkten är endast avsedd för engångsbruk och ska kastas i enlighet med lokala föreskrifter t.ex. med vanligt hushållsavfall.

Spola inte ner produkten i toaletten.

### Rapportera händelser

Om en allvarlig händelse inträffar i samband med användning av produkten eller som ett resultat av dess användning, kontakta tillverkaren och din lokala myndighet.

### Symbolförklaring



Medicinsk produkt



Indikerar att produkten överensstämmer med europeisk lagstiftning för medicinska produkter.



Katalognummer



Används före (ÅÅÅÅ-MM-DD)



Lot-nummer



Tillverkningsdatum (ÅÅÅÅ-MM-DD)



Tillverkare



Ta del av bruksanvisningen



Endast för engångsbruk



Global Trade Item Number



Skyddas från solljus



Denna sida uppåt



Återvinningsbar förpackning