

Urine Nachtzak
Hanger/standaard voor urine-opvangzak



Gebruiksaanwijzing

23322833 Version 1

Het Coloplast-logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S.
Alle rechten voorbehouden. © 2020-02-19

Beoogde doel

Het urine-opvangzakje is bedoeld om passief urine op te vangen.

Productbeschrijving

Urineopvangzakjes zijn geïndiceerd voor patiënten die lijden aan urine-incontinentie en/of retentie met welke oorzaak dan ook.

Waarschuwingen

Hergebruik van dit product voor eenmalig gebruik is niet aangewezen, kruisbesmetting kan optreden.

Herbehandelen, wassen, desinfecteren en/of (her)steriliseren kan een nadelig effect hebben op de productkenmerken, waardoor voor de gebruiker meer risico ontstaat op letsel of infectie.

Bewaar het product buiten het bereik van kleine kinderen en houd tijdens het gebruik van het product toezicht op eventueel aanwezige kinderen, om het risico op verwurging door de slangen of verstikking door kleine, van het product losgeraakte onderdelen te voorkomen.

Informatie

Het zakje is ontworpen voor eenmalig gebruik.

Het zakje is ontworpen met een volumecapaciteit van 2000 ml.

De afgedrukte volume-indicator is slechts een indicatieve volumetrische meetschaal.


Het is de bedoeling dat de producten in de doos worden bewaard totdat ze verwijderd worden voor gebruik, aangezien de doos de producten beschermt en er op de sticker van de doos belangrijke informatie staat, zoals het partijnummer, de uiterste gebruiksdatum en een unieke streepjescode.

Coloplast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies als dit product niet op de door Coloplast aanbevolen manier wordt gebruikt.

Maximaal toegestaan aantal keer hergebruiken

Het maximaal toegestane aantal keer hergebruiken voor de hanger van het zakje is 5 jaar, bij eenmaal gebruiken per dag.

Vorbereiding

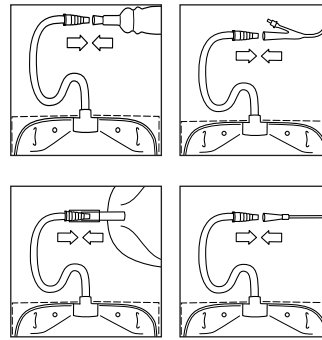


Een nachtzak kan rechtstreeks op een externe katheter of ingebrachte verblijfskatheter worden aangesloten.

De nachtzak kan op een beenzak worden aangesloten voor extra opvangcapaciteit 's nachts. Om een koppeling te maken voor 's nachts moet de beenzak een flexibele aftap hebben, waarop de connector van de nachtzak kan worden aangesloten.

Intermitterende katheterisatie

Een nachtzak kan ook worden aangesloten op een intermitterende katheter voor de urine-opvang tijdens zelfkatheterisatie.

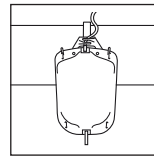


Gebruik een Coloplast hanger of standaard om de nachtzak aan op te hangen.

Maak de zak stevig aan de hanger of standaard vast door ervoor te zorgen dat de haken van de hanger of standaard in de gleuven boven in de zak grijpen. Bevestig de hanger aan de bedrail of plaats de standaard op de vloer naast het bed.

Voor een optimale afvoer is het van belang dat de nachtzak zich in een lagere positie bevindt dan uw eigen positie wanneer u in bed ligt.

Intermitterende katheterisatie

Hang de zak op of plaats de zak op een voor u gemakkelijke plaats en zorg ervoor dat de zak zich in een lagere positie bevindt dan uw onderbuik, ongeacht of u de voorkeur geeft aan zittend, staand of liggend katheteriseren.

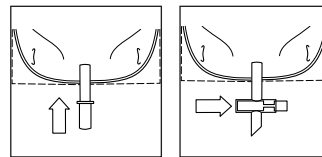


Aftapkraantje

Kruiskraan

Als de zak een aftapkraantje heeft, zorg dan dat het gesloten is.

Aansluiten

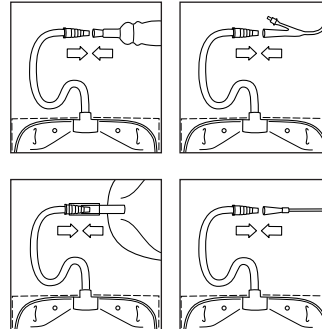

Verwijder de eventueel aanwezige beschermkap van de connector.

Sluit de connector aan op de externe katheter of ingebrachte verblijfskatheter.


Of sluit de connector aan op de onderzijde van de beenzak bij het aftapkraantje. Open het aftapkraantje van de beenzak.

Het urine-opvangsysteem kan nu gebruikt worden.

Intermitterende katheterisatie

Sluit de connector aan op de intermitterende katheter.


Wanneer u met katheteriseren begint, wordt de urine opgevangen in de nachtzak.

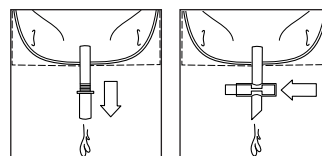


Aftapkraantje

Kruiskraan

We raden aan de zak te legen als hij iets meer dan halfvol is om een optimale afvoer te garanderen.

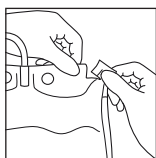

Zonder aftap-
kraantje

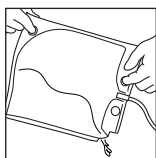

Intermitterende katheterisatie
Leeg de nachtzak na iedere intermitter-
ende katheterisatie.

Verwijderen

Maak de nachtzak los van de externe katheter of ingebrachte verblijfskatheter.


Of, als de nachtzak aangesloten is op de beenzak: sluit het aftapkraantje van de beenzak. Maak vervolgens de nachtzak los. Raak het open uiteinde van de aftapslang van de beenzak niet aan.

Intermitterende katheterisatie

Maak na voltooiing van de katheterisatie de nachtzak los van de intermitterende katheter.

Maak de zak los van de hanger of standaard.

Weggoaien

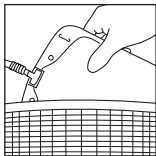

Vervang de zak volgens de lokale richtlijnen en aanbevelingen.

De hanger of standaard van de zak kan worden hergebruikt.

Maak de zak leeg voordat u hem weggooit.

De zak is bedoeld voor eenmalig gebruik en moet met het normaal huishoudelijk afval worden weggegooid.

Spoel het product niet door het toilet.

Melden van incidenten

Indien tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident heeft plaatsgevonden, moet u dit melden aan de fabrikant en aan uw nationale instantie.

Verklaring van de symbolen



Medisch hulpmiddel



Geeft aan dat het product in overeenstemming is met de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen



Catalogusnummer



Te gebruiken tot (DD-MM-JJJJ)



Lotnummer



Productiedatum (DD-MM-JJJJ)



Fabrikant



Gebruiksaanwijzing raadplegen



Niet voor hergebruik



Niet-steriel



Geeft een streepjescode aan die een unieke hulpmiddelidentificatie bevat



Global Trade Item Number



Uit de buurt van zonlicht houden



Recyclebare verpakking