



Instrucciones de uso

23322865 Version 1

El logotipo de Coloplast es una marca registrada de Coloplast A/S. Todos los derechos reservados. © 2020-02-18

Distribuidor:

Coloplast Corp.
1601 W. River Rd. N.
Minneapolis, MN 55411 USA
Tel. (888) 726-7872
www.coloplast.us

Objetivo previsto

La bolsa de orina está destinada para la recolección pasiva de orina.

Indicaciones

Las bolsas de orina están indicadas para pacientes que sufren de incontinencia urinaria y/o retención.

Advertencias

No se recomienda la reutilización de este producto de un solo uso, ya que puede producirse contaminación cruzada.

El reprocesamiento, lavado, desinfección y/o (re)esterilización del producto pueden afectar sus características, generando un riesgo adicional de daño físico o infección al usuario.

Esta bolsa para pierna está diseñada para ser utilizada fuera de la cama y para desplazarse. Cambie esta bolsa por una bolsa de drenaje de noche de mayor capacidad cuando esté en la cama y durante el sueño.

Información

La bolsa está diseñada para un solo uso.

La bolsa tiene una capacidad de 8.5 oz/250 ml y es para uso diurno.

Esta bolsa fue diseñada para uso con funda urinaria.

No es necesario retirar el dispositivo antes de un escaneo por RM, ya que es seguro para RM.


Coloplast no se hace responsable de ninguna lesión o pérdida que pueda surgir por el uso de este producto sin seguir las recomendaciones actuales de Coloplast.

El producto no está fabricado con látex de caucho natural; sin embargo, una contaminación poco frecuente con pequeñas cantidades de látex de caucho natural puede ocurrir durante la fabricación o el embalaje.


Modo de empleo

Colocación de la bolsa de pierna (pierna derecha)

Preparación

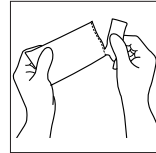


Abra el embalaje cortando a lo largo de la perforación. Retire la bolsa de pierna y la pieza pequeña separada de tubo.

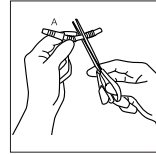


El tubo tiene secciones lisas y corrugadas. En un extremo se acopla el conector de entrada (A).


El largo del tubo puede ser reducido a la mitad si se prefiere. Para acortar el tubo, simplemente corte el extremo libre con tijeras inmediatamente después de la primera sección de tubo corrugado. Es importante mantener tanto cuanto sea posible de la sección lisa posterior. Esto ayuda a crear una conexión segura entre la bolsa de la pierna y el tubo cuando lo conecte.

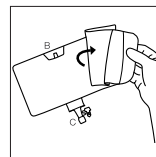


Desdoble la bolsa de la pierna e identifique la válvula de entrada en la parte superior de la bolsa (B) y el grifo de salida en la parte inferior de la bolsa (C).

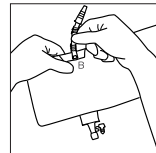

Conecte el extremo libre del tubo a la válvula de entrada (B).

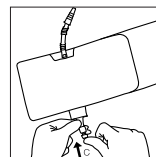


Cierre el grifo de salida (C).

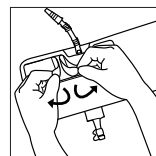

Retire la película protectora del parche adhesivo en la parte trasera de la bolsa recolectora.

Aplicación

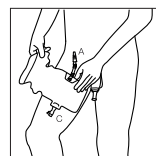


Sostenga la bolsa con el conector de entrada (A) hacia arriba y el tapón de salida (C) hacia abajo. El parche adhesivo debe apuntar hacia su muslo derecho.

Pegue la bolsa directamente en la piel al lado de dentro del muslo derecho.


Cuando coloque la bolsa, asegúrese de que quede en lo alto del muslo con el conector de entrada centrado por dentro del muslo, inmediatamente abajo de la zona del pene. El objetivo es una posición de la bolsa que permita una conexión cómoda y segura a la funda urinaria.

Cuando ajuste la bolsa por primera vez, puede ser necesario reubicarla varias veces hasta descubrir la posición óptima para usted.

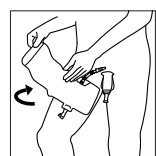


Enrolle la sección larga de la cinta en su pierna y use el velcro para sujetar el extremo de la cinta.

El ajuste debe ser cómodo y firme. No es necesario apretar muy fuerte la cinta alrededor del muslo. El parche adhesivo ayuda a mantener la bolsa en su lugar.

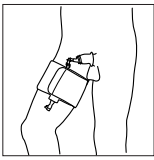


Conecte la bolsa a la funda urinaria empujando el conector de entrada de la bolsa firmemente en la salida de la funda urinaria.

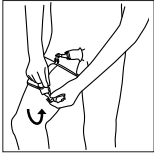

Para un uso cómodo y discreto, oculte el grifo de salida doblándolo hacia arriba y metiéndolo en el bolsillo entre la bolsa y la capa exterior del material de la cinta elástica.

Retirada

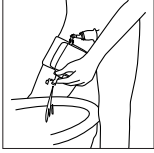

La bolsa de pierna se debe vaciar antes de que se llene completamente.

Destrate la salida del grifo y colóquelo sobre la taza del baño u otro recipiente adecuado.

Coja la salida con una mano. Apriete la parte flexible entre los dedos. Con la otra mano, abra el tapón. Alivie la presión en la parte flexible del grifo de salida gradualmente para permitir que la orina fluya.

Recuerde siempre de cerrar el tapón después de vaciar la bolsa.

Devuelva el grifo al bolsillo bajo el material de la cinta elástica.

Eliminación

El producto está diseñado para un solo uso y debe eliminarse según la reglamentación local (por ejemplo, junto con los residuos domésticos comunes).

No tire el producto por el inodoro.

Informe de incidentes

Si durante el uso de este dispositivo, o como resultado de su uso, se ha producido un incidente grave, por favor informe al fabricante y a las autoridades nacionales de su país.

Explicación de los símbolos



Dispositivo médico



Indica que el producto cumple con la legislación europea para dispositivos médicos



Número de catálogo



Fecha de caducidad (AAAA-MM-DD)



Código de lote



Fecha de fabricación (AAAA-MM-DD)



Fabricante



Consulte las instrucciones de uso



No reutilizar



Indica un código de barras que contiene una Identificación Única de dispositivo



Número mundial de artículo comercial



Mantener protegido de la luz del sol



Envase reciclable



No fabricado con látex de caucho natural



En esta dirección hacia arriba