

Poche de recueil d'urine.
Poche de jambe avec attache intégrée



Mode d'emploi

23323030 Version 1

Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S. Tous droits réservés. © 2020-03-13

Destination

La poche à urine est destinée à recueillir passivement l'urine.

Indications

Les poches à urine sont indiquées pour des patients qui souffrent d'incontinence urinaire ou de rétention de causes diverses.

Avertissements

La réutilisation de ce produit à usage unique n'est pas recommandée, une contamination croisée pourrait se produire.

Le retraitement, le nettoyage, la désinfection et/ou la stérilisation peuvent compromettre les caractéristiques du produit et créer un risque supplémentaire de dommages corporels ou d'infection chez l'utilisateur.

Cette poche de jambe est conçue pour une utilisation hors du lit et en déplacement. Passez à une poche de nuit d'une capacité supérieure pour vous aliter ou dormir.

Informations

La poche est conçue pour un usage unique.

La poche a une capacité de 250 ml et est destinée à une utilisation de jour.

La poche est conçue pour être utilisée avec un étui pénien.


Il n'est pas nécessaire d'enlever ce dispositif avant un IRM, car il est compatible IRM.

Coloplast ne peut être tenu pour responsable des dommages pouvant résulter de l'emploi du produit dans des conditions non conformes aux instructions de la notice d'utilisation.


Utilisation

Ajuster la poche (jambe droite)

Préparation

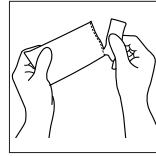


Ouvrez l'emballage en tirant le long des perforations. Sortez la poche de jambe et la petite tubulure.

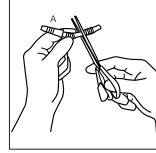


La tubulure est dotée de sections lisses et annelées. Le raccord d'entrée (A) est attaché à une des extrémités.


La tubulure peut être coupée en deux, selon les préférences. Pour la raccourcir, coupez simplement l'extrémité libre avec une paire de ciseaux juste après la première partie annelée. Il est important de conserver la plus grande longueur possible de section lisse. Ceci permettra d'obtenir une connexion sûre entre la poche de jambe et la tubulure lors de son installation.

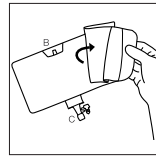


Dépliez la poche de jambe et identifiez la valve d'entrée en haut (B) et le robinet de sortie en bas (C).

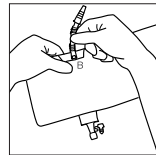

Raccordez l'extrémité libre de la tubulure à la valve d'entrée (B).

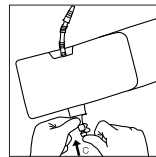


Fermez le robinet de vidange (C).

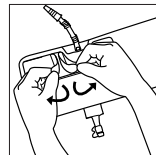

Retirez le film de protection qui se trouve sur le patch adhésif situé au dos de la poche de recueil.

Application

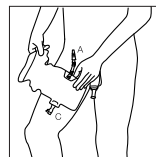

Tenez la poche avec le raccord d'entrée (A) dirigé vers le haut et le robinet de vidange (C) vers le bas. Le patch adhésif doit être face à votre cuisse droite.


Fixez la poche directement sur la peau à l'intérieur de votre cuisse.


En positionnant la poche, assurez-vous qu'elle est située en haut de votre cuisse, le raccord d'entrée bien placé au milieu de votre cuisse, juste sous le pénis. L'objectif est que la position de la poche soit confortable et que la connexion avec l'étui pénien soit sûre.

Lors de la première utilisation, vous devrez peut-être repositionner la poche plusieurs fois afin de trouver la position qui vous convienne le mieux.


Enroulez la partie longue de l'attache autour de votre jambe et utilisez le scratch pour la fermer.

L'ajustement doit être confortable et ferme. Il n'est pas nécessaire de serrer l'attache trop fort autour de votre cuisse. Le patch adhésif aidera à maintenir la poche à sa place.

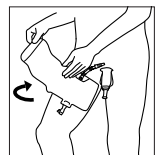

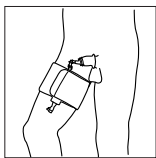


Connectez la poche à un étui pénien en enfonçant fermement le raccord d'entrée dans la sortie de l'étui pénien.

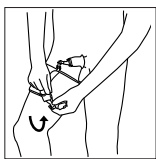

Pour plus de confort et de discrétion, cachez le robinet de vidange en le repliant vers le haut et en le rangeant dans l'espace prévu à cet effet entre la poche de recueil et la couche extérieure de l'attache élastique.

Retrait

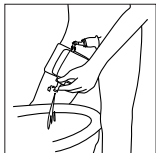

La poche doit être vidée avant d'atteindre sa capacité maximum.

Dépliez le robinet de vidange et dirigez-le vers la cuvette des toilettes ou un autre réceptacle adapté.

Tenez le robinet à une main. Pincez la partie flexible. Avec l'autre main, ouvrez le robinet. Relâchez progressivement la pression sur la partie flexible du robinet pour que l'urine puisse s'écouler.

N'oubliez pas de refermer le robinet une fois que vous avez vidé la poche.

Remettez-le dans l'espace prévu à cet effet sous l'attache élastique.

Élimination

Le produit est destiné à un usage unique exclusivement et doit être éliminé conformément aux directives locales, par ex. avec les déchets ménagers normaux.

Ne pas jeter le produit dans les toilettes.

Signalement des incidents

Si un incident grave s'est produit au cours de l'utilisation de ce dispositif ou suite à son utilisation, veuillez le signaler au fabricant et aux autorités nationales compétentes.

Explication des symboles



Dispositif médical



Indique que le produit est conforme à la législation européenne concernant les dispositifs médicaux



Référence catalogue



Date de péremption (AAAA-MM-JJ)



Code du lot



Date de fabrication (AAAA-MM-JJ)



Fabricant



Consulter le mode d'emploi



Ne pas réutiliser



Présente un code-barres qui contient le numéro d'identification unique du dispositif



Global Trade Item Number



Conserver à l'abri de la lumière



Emballage recyclable