

**Gebruiksaanwijzing**

23323095 Version 1

Het Coloplast-logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S.
 Alle rechten voorbehouden. © 2020-03-12

Beoogde doel

Het urine-opvangzakje is bedoeld om passief urine op te vangen.

Productbeschrijving

Urineopvangzakjes zijn geïndiceerd voor patiënten die lijden aan urine-incontinentie en/of retentie met welke oorzaak dan ook.

Waarschuwingen

Hergebruik van dit product voor eenmalig gebruik is niet aangewezen, kruisbesmetting kan optreden.

Herbehandelen, wassen, desinfecteren en/of (her)steriliseren kan een nadelig effect hebben op de productkenmerken, waardoor voor de gebruiker meer risico ontstaat op letsel of infectie.

Deze urine-opvangzak is bedoeld om te worden gebruikt buiten het bed en tijdens beweging. Verwissel voor een nachtzak met een hogere capaciteit wanneer u in bed ligt en wanneer u slaapt.

Informatie


Het zakje is ontworpen voor eenmalig gebruik.

De urine-opvangzak heeft een inhoud van 250 ml en is voor gebruik overdag.


De urine-opvangzak is ontworpen voor gebruik met condoomcatheters.

Het hulpmiddel dient niet verwijderd te worden voor een MR scan, aangezien het MR veilig is.

Coloplast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies als dit product niet op de door Coloplast aanbevolen manier wordt gebruikt.

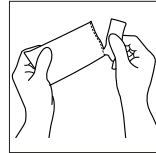
Het product gebruiken**De urine-opvangzak bevestigen (rechterbeen)****Vorbereiding**

Open de verpakking door langs de perforatielijijn te scheuren. Haal de urine-opvangzak en de losse slang eruit.

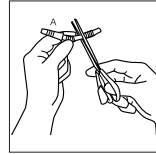


De slang heeft gladde en geribbelde gedeeltes. Aan één uiteinde is de connector (A) bevestigd.


De slang kan eventueel gehalveerd worden. Om de slang in te korten, knipt u met een schaar, aan de kant van het uiteinde zonder connector, direct na het eerste geribbelde stuk van de slang. Het is belangrijk om zo veel mogelijk van het volgende gladde stuk te behouden. Dat zorgt voor een veilige verbinding tussen de urine-opvangzak en de slang als die wordt bevestigd.

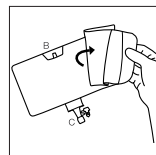


Vouw de urine-opvangzak uit en houd de opening aan de bovenkant (B) en het aftapkraantje aan de onderkant (C).

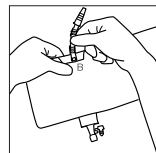


Bevestig het uiteinde van de slang (de kant zonder connector) aan de opening (B) van de urine-opvangzak.

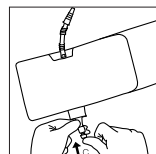

Sluit het aftapkraantje (C).

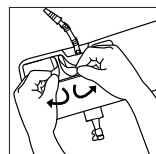

Verwijder de beschermfolie van de plakstrook aan de achterzijde van de urine-opvangzak.

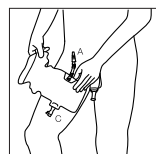Aanbrengen

Houd de urine-opvangzak met de connector (A) naar boven en het aftapkraantje (C) naar beneden. De plakstrook zit aan de achterzijde en wijst richting uw rechterdij.


Bevestig de urine-opvangzak rechtstreeks op de huid van de binnenzijde van uw rechterdij.


Zorg er bij de bevestiging voor dat de urine-opvangzak zich hoog op uw dij vlak onder de (externe) katheter bevindt met de connector in het midden van de binnenzijde van uw dij. Op die manier kan de urine-opvangzak op een comfortabele en veilige wijze op de (externe) katheter worden aangesloten.

Wanneer u de urine-opvangzak voor het eerst bevestigt, moet u hem misschien enkele keren verplaatsen om de optimale positie te vinden.


Wikkel het lange deel van de band rond uw been en gebruik het klitteband om het uiteinde van de band te bevestigen.

De band moet comfortabel en strak zitten. Het is niet nodig om de band heel stevig rond uw dij te wikkelen. De plakstrook aan de achterzijde helpt om de urine-opvangzak veilig op zijn plaats te houden.

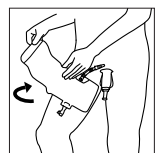

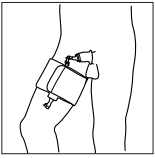


Sluit de urine-opvangzak aan op de (externe) katheter door de connector aan het uiteinde van de slang stevig in de opening van de (externe) katheter te duwen.

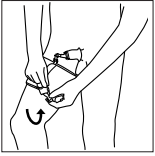

Voor uw comfort en discretie kunt u het aftapkraantje verbergen door het omhoog te buigen en tussen de buitenste laag van de elastische band en de urine-opvangzak te stoppen.

Verwijderen

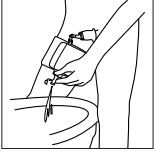

De urine-opvangzak moet worden leeggemaakt voordat hij volledig vol is.

Haal het aftapkraantje tevoorschijn en houd het boven een toilet of een ander geschikt opvangsysteem.

Houd het aftapkraantje met één hand vast. Knijp het flexibele deel tussen uw vingers. Open het kraantje met uw andere hand. Laat het flexibele deel van het aftapkraantje geleidelijk aan los om de urine eruit te laten stromen.

Denk er altijd aan om het kraantje weer te sluiten na het leegmaken van de urine-opvangzak.

Stop het kraantje opnieuw onder de elastische band.

Weggoaien

De zak is bedoeld voor eenmalig gebruik en moet met het normaal huishoudelijk afval worden weggegooid.

Spoel het product niet door het toilet.

Melden van incidenten

Indien tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident heeft plaatsgevonden, moet u dit melden aan de fabrikant en aan uw nationale instantie.

Verklaring van de symbolen



Medisch hulpmiddel



Geeft aan dat het product in overeenstemming is met de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen



Catalogusnummer



Te gebruiken tot (DD-MM-JJJJ)



Lotnummer



Productiedatum (DD-MM-JJJJ)



Fabrikant



Gebruiksaanwijzing raadplegen



Niet voor hergebruik



Geeft een streepjescode aan die een unieke hulpmiddelidentificatie bevat



Global Trade Item Number



Uit de buurt van zonlicht houden



Recyclebare verpakking