



Åpne pakningen ved å rive opp langs perforeringen. Ta ut benposen og den lille, separate slangen.

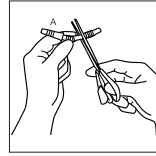


Slangen er glatt og med riller. Koblingen (A) er festet i den ene enden.


Slangens lengde kan justeres hvis ønskelig. For å korte ned på slangens lengde, klipp av den løse enden rett etter den første rillede delen av slangen. Det er viktig å bevare så mye av den glatte delen på slangen som mulig. Dette gir en sikker kobling mellom benposen og slangen når den festes.

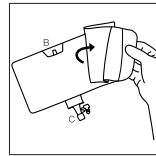


Brett ut benposen og finn innløpsventilen øverst på posen (B) og utløpsventilen nederst på posen (C).

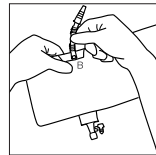

Fest slangens løse del til innløpsventilen (B).

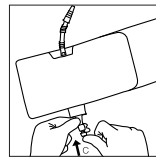

Lukk utløpsventilen (C).

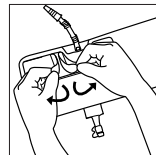

Fjern den beskyttende filmen fra den selvklebende lappen på baksiden av urinposen.



**Bruksanvisning**

23323096 Version 1

Coloplast-logoen er et registrert varemerke for Coloplast A/S. Med enerett. © 2020-03-12

**Bruksområde**

Urinposen er beregnet på passiv oppsamling av urin.

**Indikasjoner**

Urinposer er indikert for pasienter som lider av urininkontinens og/eller -retensjon av hvilken som helst etiologi.

**Advarsel**

Gjenbruk av dette engangsproduktet er ikke anbefalt da det kan oppstå krysskontaminasjon.

Reposessering, vasking, desinfisering og/eller resterilisering kan redusere produktets ytelse og skape økt risiko for fysisk skade eller infeksjon hos brukeren.

Denne benposen er beregnet på å brukes ute av sengen og i bevegelse. Bytt over til en drenasjepose ved sengen med høyere kapasitet mens ute av sengen, og under søvn.

**Informasjon**

Posen er utviklet for engangsbruk.


Posen har en kapasitet på 250 ml og er for bruk på dagtid.

Posen er utformet for bruk med uridomer.

Enheten behøver ikke fjernes før MR-skanning da den er MR-sikker.

Coloplast tar ikke ansvar for personskade eller tap som kan oppstå hvis produktet brukes på en måte som er i strid med Coloplasts gjeldende anbefalinger.

**Påføring**

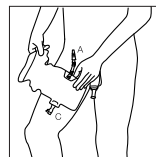


Hold posen med innløpsventilen (A) vendt oppover og utløpsventilen (C) vendt nedover. Den selvklebende delen på urinposen festes til det høyre låret.

Fest posen direkte på huden på innsiden av det høyre låret.


Når posen plasseres skal du sørge for å sette den høyt opp på låret med innløpsventilen midt på innsiden av låret, rett nedenfor penisområdet. Målet er å plassere posen riktig på et sted som gir en komfortabel og sikker kobling til et uridom.

Første gang posen tilpasses kan det være nødvendig å flytte på den noen ganger til du finner den beste plasseringen for deg.

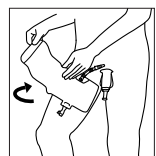


Sett festebåndet rundt låret og fest båndet ved hjelp av borrelåsen.

Den skal føles komfortabel og være ettersittende. Det er ikke nødvendig å feste festebåndet stramt rundt låret. Den selvklebende delen bidrar til å holde posen på plass.

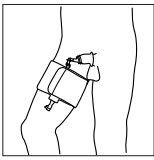


Koble posen til et uridom ved å sette det inn i innløpsventilen til posen.

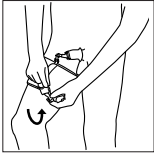

For komfortabel og diskret bruk, skjul utløpsventilen ved å brette den opp og inn i lommen mellom posen og ytterlaget på den elastiske stroppen.

### Fjerning

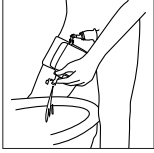

Benposen skal tømmes før den blir helt full.

Brett ut utløpsventilen og plasser den over toalettet eller annen egnet beholder.

Hold i utløpet med én hånd. Klem den fleksible delen mellom fingrene. Åpne ventilen med den andre hånden. Slipp gradvis opp trykket på den fleksible delen av utløpsventilen slik at urinen begynner å renne ut.

Husk alltid på å lukke ventilen etter at du har tømt posen.

Brett ventilen på plass i lommen under den elastiske stroppen igjen.

### Avfallshåndtering

Produktet er kun beregnet for engangsbruk og skal kastes i tråd med lokale retningslinjer, f.eks. sammen med vanlig husholdningsavfall.

Spyl ikke produktet ned i toalettet.

### Rapportere hendelser

Hvis det har oppstått en alvorlig hendelse under bruk av denne enheten eller som følge av bruken, skal hendelsen rapporteres til produsenten og nasjonale myndigheter.

### Symbolforklaring



Medisinsk utstyr



Indikerer at produktet er i samsvar med europeisk lovgivning for medisinsk utstyr



Katalognummer



Utløpsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)



Batchkode



Produksjonsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)



Produsent



Se bruksanvisningen



Ikke til gjenbruk



Indikerer en strekkode som inneholder unik enhetsidentifikasjon



Global Trade Item Number



Holdes unna sollys



Resirkulerbar pakning