

Tappo anale



Istruzioni per l'uso

23323126 Version 1

Il logo Coloplast è un marchio registrato di proprietà di Coloplast A/S.© Tutti i diritti sono riservati
[2020-03-12]

Indicazioni

Peristeen Anal Plug funge da barriera alle feci nel retto.

Controindicazioni

Peristeen Anal Plug non deve essere utilizzato se affetti da:

- Emorroidi (3° e 4° grado)
- Stenosi anale

Informazioni

Coloplast non si assume alcuna responsabilità per lesioni o perdite che potrebbero verificarsi se il prodotto venisse usato in modo non conforme alle raccomandazioni vigenti di Coloplast.

In caso di normale sensibilità nell'area rettale, è necessario un po' di tempo per abituarsi al tappo anale. Normalmente ciò non accade alle persone con sensibilità ridotta o compromessa.

Il tappo anale è disponibile in due dimensioni. Non è possibile determinare in anticipo la dimensione da scegliere. Provarle entrambe e scegliere quella più efficace.

Alcune persone che utilizzano regolarmente il tappo anale risconteranno che di tanto in tanto viene espulso dal retto. Questa reazione non ha un motivo apparente, ma l'esperienza ha dimostrato che lo stesso utilizzatore può riprendere a utilizzare correttamente il tappo dopo un breve periodo di interruzione.

Precauzioni

Il prodotto non deve essere utilizzato senza la valutazione dell'operatore sanitario.

Contattare l'operatore sanitario prima del primo utilizzo di Peristeen Anal Plug, poiché è fondamentale una guida professionale nell'uso del tappo.

Se si soffre di diarrea, il tappo potrebbe essere espulso.

Se inserito in bocca, Peristeen Anal Plug potrebbe espandersi e causare soffocamento.

Rimuovere il tappo anale quando si avverte il bisogno di defecare. Se non si ha

sensibilità nell'area rettale e non si avverte il bisogno di defecare, si consiglia di cambiare il tappo a intervalli regolari.

Peristeen Anal Plug deve essere rimosso al massimo 12 ore dopo l'inserimento. In caso di difficoltà nella rimozione di Peristeen Anal Plug, è necessario contattare l'operatore sanitario.

Se si avverte ripetutamente disagio durante l'uso di Peristeen Anal Plug, interrompere l'uso e contattare l'operatore sanitario.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Avvertenze

Il riutilizzo di questo prodotto monouso può essere potenzialmente dannoso per il paziente. Ricondizionamento, lavaggio, disinfezione e/o sterilizzazione possono compromettere le caratteristiche del prodotto, determinando un ulteriore rischio di danno fisico o infezione per il paziente.

Come utilizzare il prodotto

Il tappo anale può essere usato da persone con incontinenza fecale o affette da fuoriuscita di aria involontaria (flatulenza). Funziona da barriera efficace alle feci nel retto.



1. Preparazione

Applicare una piccola quantità di gel Peristeen sulla punta di Peristeen Anal Plug. È possibile utilizzare anche altri lubrificanti



2. Inserimento

Inserire delicatamente Peristeen Anal Plug nell'ano, come se fosse una normale supposta. Assicurarsi che Peristeen Anal Plug sia interamente inserito nel retto, appena all'interno dello sfintere anale. Lasciare la garza appesa all'esterno del corpo.



3. Uso

Peristeen Anal Plug è ora correttamente posizionato nel retto e si espanderà rapidamente alla massima dimensione mentre il film si dissolve a causa del calore e dell'umidità naturale del corpo. Può essere lasciato nel retto per un massimo di 12 ore.



4. Rimozione

Peristeen Anal Plug viene rimosso dal retto tirando delicatamente la garza integrata in Peristeen Anal Plug. La rimozione del tappo anale non attiva il riflesso di evacuazione, quindi non è necessario affrettarsi. È possibile inserire un nuovo Peristeen Anal Plug subito dopo la rimozione di quello vecchio.

Smaltimento

Il prodotto è esclusivamente monouso e deve essere smaltito secondo le linee guida locali, ad esempio tra i rifiuti domestici.

Non gettare il prodotto nei sanitari.