

Sac à jambe

## Conveen®

Attache de jambe



### Mode d'emploi

23323138 Version 1

Le logo Coloplast est une marque déposée de Coloplast A/S. Tous droits réservés. © 2020-04-09

Distribué par:  
Coloplast Canada Corp.  
1380 Creditstone Road,  
Unit 6&7  
Concord, ON L4K 0J1  
Tel.: 1-888-880-8605  
www.coloplast.ca

### Fin prévue

Le sac à urine est conçu pour recueillir l'urine de manière passive.

### Indications

Les sacs à urine sont indiqués pour les patients souffrant d'incontinence urinaire et/ou de rétention urinaire de toute étiologie.

### Avertissements

La réutilisation de ce produit à usage unique n'est pas recommandée en raison des risques de contamination croisée.

Le retraitement, le lavage, la désinfection ou la (re)stérilisation de ce produit peuvent compromettre les caractéristiques, ce qui pourrait ensuite créer un risque additionnel de dommage physique ou d'infection pour l'utilisateur.

Ce sac de jambe est destiné à être utilisé hors du lit et dans les déplacements. Optez pour un sac de drainage de chevet avec une capacité supérieure au lit et pendant le sommeil. Vous pouvez également laisser votre sac de jambe en place et attacher un sac de drainage de chevet pour augmenter la capacité totale du système de recueil d'urine.

Ce produit contient des phtalates et ne doit être utilisé chez l'enfant ou la femme enceinte ou allaitante qu'après consultation d'un professionnel de santé.

### Informations

Le sac est conçu pour un usage unique.

Ce produit a une capacité de 600/800 ml.

L'indicateur de volume imprimé est seulement une règle de mesure volumétrique indicative.

Les attaches peuvent être lavées à une température de 40 °C/104 °F ou plus basse.

Les produits doivent être conservés dans leur boîte jusqu'à ce qu'ils en soient enlevés pour être utilisés, car la boîte protège les produits et l'étiquette qui figure sur la boîte comporte des informations importantes comme le code de lot, la date de péremption et un code à barres unique.

Le dispositif étant compatible avec les IRM, vous n'êtes pas tenu de le retirer avant de procéder à un examen IRM.


Coloplast n'accepte aucune responsabilité en cas de lésions ou de pertes susceptibles de survenir si ce produit est utilisé d'une manière contraire aux recommandations actuelles de Coloplast.

### Nombre maximum de réutilisations permises


Les attaches peuvent être remplacées quand leur élasticité faiblit.

### Utilisation

#### Préparation

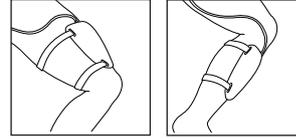


La poche de jambe comporte un tube d'entrée pouvant être préfixé à la poche ou séparé de celle-ci. La longueur du tube détermine l'emplacement de la poche sur la jambe.

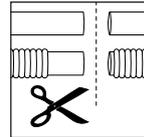


Si le tube ne présente pas d'adaptateur d'entrée préfixé ou si le tube lui-même n'est pas fixé à la poche, il est possible de raccourcir le tube à la longueur souhaitée. Il suffit de couper le tube à l'aide de ciseaux.


Lors de la coupe d'un tube annelé, garder une partie de la section droite aussi grande que possible. Cela garantit un raccordement sûr entre le tube et l'adaptateur lors du montage de l'adaptateur.

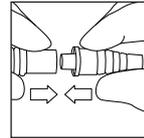

Raccorder l'adaptateur au tube en poussant l'extrémité fine de l'adaptateur aussi loin que possible dans le tube.

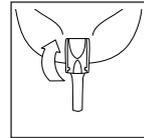

Vérifier que le robinet de vidange est fermé.

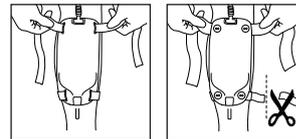


Fixer les attaches sur la poche. Ajuster la poche à la jambe. Les surplus des attaches peuvent être coupés.

#### Attache siliconée Conveen

Placer l'attache la plus longue en haut de la poche. Si la poche est installée sur le mollet, enrouler l'attache supérieure en formant un huit derrière et sur le genou.


#### Application

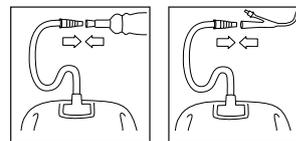

Si l'adaptateur est équipé d'un bouchon de protection, le retirer.

Raccorder l'adaptateur à l'étui pénien ou à la sonde.

Le système de recueil d'urine est désormais fonctionnel.

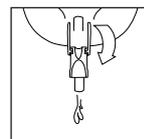


Nous recommandons de vider la poche lorsqu'elle est remplie à un peu plus de la moitié afin de garantir un drainage optimal.

#### Retrait

Séparer la poche de l'étui pénien ou de la sonde.

Détacher les attaches et ôter la poche de la jambe.

## Élimination

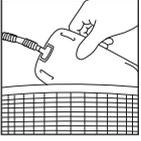

Changer la poche conformément aux directives et recommandations locales.

Les attaches peuvent être réutilisées.

Vider la poche avant de la mettre au rebut.

Ce produit est conçu pour un usage unique exclusivement et doit être éliminé conformément aux directives locales, p. ex. avec les déchets ménagers normaux.

Ne pas jeter le produit dans les toilettes.

## Déclaration des incidents

Si un incident grave s'est produit pendant l'utilisation de ce dispositif ou en raison de son utilisation, veuillez le signaler au fabricant et à votre autorité nationale.

## Explication des symboles



Dispositif médical



Indique que le produit respecte la législation européenne régissant les dispositifs médicaux



Numéro de catalogue



Date limite d'utilisation (AAAA-MM-JJ)



Code de lot



Date de fabrication (AAAA-MM-JJ)



Fabricant



Consulter le mode d'emploi



Ne pas réutiliser



Non stérile



Indique qu'un code à barres contient une identification de dispositif unique



(Global Trade Item Number) Code article international



Conserver à l'abri de la lumière du soleil



Emballage recyclable