

Pouche de drainage

Conveen®

Crochet / support de poche



Mode d'emploi

23323155 Version 1

Le logo Coloplast est une marque déposée de Coloplast A/S. Tous droits réservés. © 2020-04-15

Finalité prévue

La poche à urine est destinée à recueillir passivement l'urine.

Indications

Les poches à urine sont indiquées pour des patients qui souffrent d'incontinence urinaire ou de rétention de causes diverses.

Avertissements

La réutilisation de ce produit à usage unique n'est pas recommandée, une contamination croisée pourrait se produire.

Le retraitement, le nettoyage, la désinfection ou la (re)stérilisation peut compromettre les caractéristiques du produit et créer un risque supplémentaire de dommages corporels ou d'infection chez l'utilisateur.

Description du produit

La poche est conçue pour un usage unique.

La poche a une capacité de 2 000 ml.

L'indicateur de volume imprimé n'est qu'une échelle de mesure volumétrique indicative.


Les produits sont conçus pour être conservés dans leur boîte jusqu'à leur utilisation, car la boîte les protège et l'étiquette sur la boîte contient des informations importantes telles que le numéro de lot, la date de péremption et un code-barres unique.

Coloplast décline toute responsabilité pour les blessures et les préjudices qui résulteraient d'un emploi de ce produit d'une manière non conforme aux recommandations de Coloplast.

Nombre maximum de réutilisations autorisées

Le nombre maximum de réutilisations autorisées pour le porte-poche est d'une utilisation par jour pendant 5 ans.

Préparation

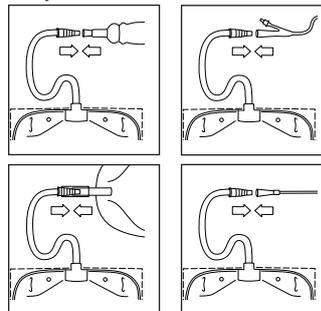


Une poche de vidange de nuit peut être directement reliée à un étui pénien ou à une sonde à demeure.

Elle peut également être reliée à une poche de jambe pour augmenter la capacité de drainage pendant la nuit. Pour la nuit, la poche de jambe doit être équipée d'un tube de sortie souple qui s'adaptera au raccord d'entrée de la poche de vidange de nuit.


Sondage intermittent

Une poche de vidange de nuit peut aussi être reliée à une sonde intermittente pour recueillir les urines pendant un sondage intermittent.

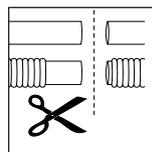


Si le tube ne présente pas d'adaptateur d'entrée préfixé ou si le tube lui-même n'est pas fixé à la poche, il est possible de raccourcir le tube à la longueur souhaitée. Il suffit de couper le tube à l'aide de ciseaux.


Lorsque vous coupez le tube ondulé, laisser la plus grande partie possible de section non ondulée en place. Ceci garantira une connexion sûre entre le tube et le connecteur lors du montage du connecteur.

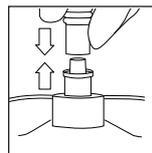

Raccorder le tube à la poche en poussant fermement l'extrémité coupée du tube dans le connecteur d'entrée de la poche.

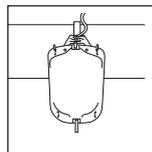

Utiliser un porte-poche de lit ou un porte-poche de sol Conveen pour suspendre la poche de nuit.

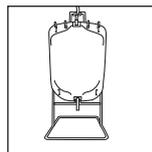


Suspendez solidement la poche sur le support ou le crochet en insérant les dents du crochet ou du support dans les fentes en haut de la poche. Fixez le crochet de poche sur le côté de lit ou placez le support sur le sol près du lit.

Pour assurer un drainage optimal, il est important que la poche de vidange de nuit soit placée plus bas que vous quand vous êtes couché dans le lit.



Sondage intermittent

Suspendez ou placez la poche à l'endroit que vous trouvez le plus pratique, en vous assurant qu'elle est placée plus bas que votre bassin, selon que vous préférez vous autosonder assis, debout ou couché.

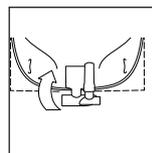



Vérifier que le robinet de vidange est fermé.

Application

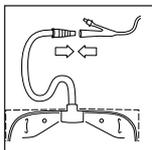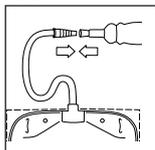

Si l'adaptateur est équipé d'un bouchon de protection, retirez-le.

Raccordez l'adaptateur à l'étui pénien ou à la sonde à demeure.

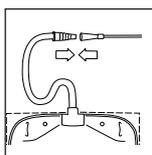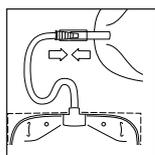


Vous pouvez également relier fermement le connecteur au tube de vidange de la poche de jambe. Ouvrez le robinet de vidange de la poche de jambe.

Le système de recueil d'urine est désormais fonctionnel.

Sondage intermittent

Raccordez l'adaptateur à la sonde intermittente.

Quand vous commencez l'autosondage, l'urine se vide dans la poche de vidange de nuit.

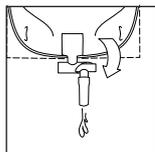

Nous recommandons de vider la poche lorsqu'elle est remplie à un peu plus de la moitié afin de garantir un drainage optimal.

Sondage intermittent

Videz la poche de vidange de nuit après chaque sondage intermittent.

Retrait

Déconnectez la poche de vidange de nuit de l'étui pénien ou de la sonde à demeure.


Si la poche de vidange de nuit est reliée à la poche de jambe, fermez le robinet de vidange de la poche de jambe. Débranchez ensuite la poche de vidange de nuit. Évitez de toucher l'extrémité ouverte du tube de sortie de la poche de jambe.

Sondage intermittent

Une fois le sondage terminé, débranchez la poche de vidange de nuit de la sonde intermittente.

Détachez la poche du crochet ou du support.

Elimination

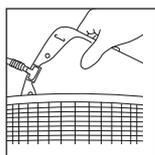

Changez la poche conformément aux directives et recommandations locales.

Le support ou le crochet de la poche peut être réutilisé.

Videz la poche avant de la mettre au rebut.

Le produit est destiné à un usage unique exclusivement et doit être éliminé conformément aux directives locales, par ex. avec les déchets ménagers normaux.

Ne jetez pas le produit dans les toilettes.

Signalement des incidents

Si un incident grave venait à se produire pendant l'utilisation de ce dispositif ou comme conséquence de son utilisation, veuillez en informer le fabricant ainsi que votre autorité nationale.

Explication des symboles



Dispositif médical



Indique que le produit est conforme à la législation européenne concernant les dispositifs médicaux



N° de référence



Date de péremption (AAAA-MM-JJ)



Code de lot



Date de fabrication (AAAA-MM-JJ)



Fabricant



Consulter le mode d'emploi



Ne pas réutiliser



Non stérile



Présente un code-barres qui contient le numéro d'identification unique du dispositif



(Global Trade Item Number) Code article international



Conserver à l'abri du rayonnement solaire



Emballage recyclable