



Instrucciones de uso

23323178 Version 1

El logotipo de Coloplast es una marca registrada de Coloplast A/S. Todos los derechos reservados. © 2020-04-24

Distribuidor:

Coloplast Corp.
1601 W. River Rd. N.
Minneapolis, MN 55411 USA
Tel. (888) 726-7872
www.coloplast.us

Objetivo previsto

La bolsa de orina está destinada para la recolección pasiva de orina.

Indicaciones

Las bolsas de orina están indicadas para pacientes que sufren de incontinencia urinaria y/o retención.

Advertencias

No se recomienda la reutilización de este producto de un solo uso, ya que puede producirse contaminación cruzada.

El reprocesamiento, lavado, desinfección y/o (re)esterilización del producto pueden afectar sus características, generando un riesgo adicional de daño físico o infección al usuario.

Este producto contiene ftalatos y no debe ser utilizado por niños ni mujeres embarazadas o lactantes sin consultar a un profesional sanitario.

Información

La bolsa está diseñada para un solo uso.

El producto tiene una capacidad de 21/28 oz. (600/800 ml).

El indicador de volumen impreso es solo una escala de medición volumétrica indicativa.

Las cintas se pueden lavar a una temperatura de 104 °F/40 °C o inferior.

El producto no está fabricado con látex de caucho natural; sin embargo, una contaminación poco frecuente con pequeñas cantidades de látex de caucho natural puede ocurrir durante la fabricación o el embalaje.

Los productos deben ser almacenados en la caja hasta que sean retirados para su uso, ya que la caja protege los productos, y la etiqueta de la caja contiene información importante, como el código de lote, la fecha de caducidad y un código de barras único.

No es necesario retirar el dispositivo antes de un escaneo por RM, ya que es seguro para RM.

Productos reutilizables

Las cintas deben reemplazarse cuando su elasticidad se debilita.


Coloplast no se hace responsable de ninguna lesión o pérdida que pueda surgir por el uso de este producto sin seguir las recomendaciones actuales de Coloplast.

Modo de empleo

Preparación




La bolsa de pierna tiene un tubo de entrada que puede estar preconnectado a la bolsa o separado de la bolsa. La longitud del tubo determina dónde se puede colocar la bolsa en la pierna.

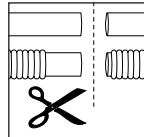


Si el tubo no tiene un conector de entrada preconnectado o si el tubo en sí no está preconnectado a la bolsa, usted puede acortar el tubo a la longitud preferida. Simplemente corte el tubo con tijeras.


Cuando corte un tubo corrugado, deje la mayor parte posible de la sección recta en su lugar. Esto asegurará una conexión segura entre el tubo y el conector al montar el conector.

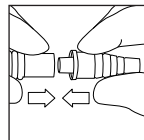

Acople el conector al tubo introduciendo el extremo delgado del conector en el tubo todo lo que sea posible.

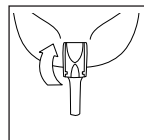


Asegúrese de que el tapón de salida está cerrado.

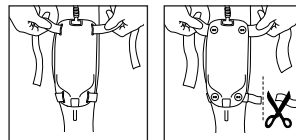

Coloque las cintas en la bolsa. Ajuste la bolsa a la pierna. Cualquier sobrante de cinta puede recortarse.

Cinta de silicona Conveen Use la cinta más larga en la parte superior de la bolsa. Si ajusta la bolsa a la pantorrilla, pliegue la cinta superior haciendo una figura de ocho atrás y arriba de la rodilla.


Aplicación

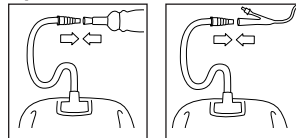

Si el conector tiene una tapa protectora, quítela.

Acople el conector a la funda urinaria o a la sonda.

El sistema de recolección de orina ahora es funcional.

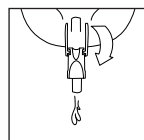


Se recomienda vaciar la bolsa cuando se llene un poco más de la mitad para garantizar un vaciado óptimo.

Retirada

Desconecte la bolsa de la funda urinaria o de la sonda.

Afloje las cintas y retire la bolsa de la pierna.

Eliminación

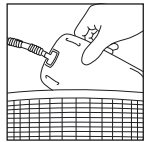

Cambie la bolsa de acuerdo con las pautas y recomendaciones locales.

Las cintas pueden ser reutilizadas.

Vacíe la bolsa antes de desecharla.

El producto está diseñado para un solo uso y debe eliminarse según la reglamentación local (por ejemplo, junto con los residuos domésticos comunes).

No tire el producto por el inodoro.

Informe de incidentes

Si durante el uso de este dispositivo, o como resultado de su uso, se ha producido un incidente grave, por favor informe al fabricante y a las autoridades nacionales de su país.

Explicación de los símbolos



Dispositivo médico



Indica que el producto cumple con la legislación europea para dispositivos médicos



Número de catálogo



Fecha de caducidad (AAAA-MM-DD)



Código de lote



Fecha de fabricación (AAAA-MM-DD)



Fabricante



Consulte las instrucciones de uso



No reutilizar



No estéril



Indica que un código de barras contiene Identificación única de dispositivo



(Global Trade Item Number) Número mundial de artículo comercial



Mantener protegido de la luz del sol



Envase reciclable



No fabricado con látex de caucho natural



Precaución



Indica que el producto se puede lavar a 104 °F/40 °C (solo para la cinta)