



Instrucciones de uso

23323354 Version 1

El logotipo de Coloplast es una marca registrada de Coloplast A/S. Todos los derechos reservados. © 2020-04-17

Uso previsto

La bolsa de orina está indicada para recoger la orina de forma pasiva.

Indicaciones

Las bolsas de orina están indicadas para pacientes que sufren de incontinencia urinaria o retención de cualquier etiología.

Advertencias

No se recomienda la reutilización de este producto de un solo uso, ya que puede producirse contaminación cruzada.

Su reprocesamiento, limpieza, desinfección o (re)esterilización pueden afectar a las características del producto y exponer al usuario a un riesgo adicional de lesión o infección.

Esta bolsa de pierna está indicada para utilizarse mientras se esté fuera de la cama y en movimiento. Cambie a una bolsa de drenaje situada al lado de la cama con una capacidad mayor mientras permanezca en la cama y mientras duerma. Alternativamente, deje la bolsa de pierna en su lugar y coloque una bolsa de drenaje al lado de la cama para ampliar la capacidad del sistema de recogida de orina global.

Este producto contiene ftalatos y no debe ser utilizado por niños ni mujeres embarazadas o lactantes sin consultar a un profesional sanitario.

Información

La bolsa está diseñada para un solo uso.

El producto tiene una capacidad de 600/800 ml.

El indicador de volumen impreso es solo una escala de medición volumétrica indicativa.

Las cintas pueden lavarse a una temperatura de 40 °C/104 °F o inferior.

Los productos están indicados para guardarse en la caja hasta que se retiren para su uso, ya que la caja los protege y la etiqueta de la caja contiene información importante, como el código de lote, la fecha de caducidad y un código de barras único.


No es necesario retirar el dispositivo antes de realizar un escáner por RM, ya que es seguro para un entorno de RM.

Número máximo de reutilizaciones permitidas


Las cintas se deben reemplazar cuando la elasticidad se debilite.

Modo de empleo

Preparación

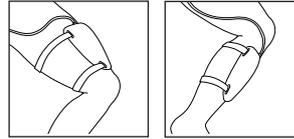


La bolsa de pierna dispone de un tubo de entrada que puede preacoplarse a la bolsa o separarse de ella. La longitud del tubo determina el lugar de la pierna donde se puede colocar la bolsa.

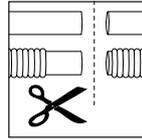


Si el tubo no dispone de un conector de entrada preacoplado o si el propio tubo no está preacoplado a la bolsa, puede acortarlo hasta la longitud que desee. Simplemente corte el tubo con una tijera.


Al cortar el tubo corrugado, deje tanta sección lisa como sea posible. De este modo, garantizará una conexión segura entre el tubo y el conector, durante la colocación del conector.

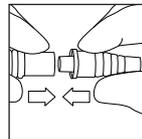

Acople el conector al tubo introduciendo el extremo delgado del conector en el tubo todo lo que sea posible.

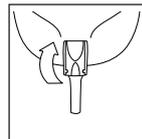

Asegúrese de que el tapón de salida está cerrado.

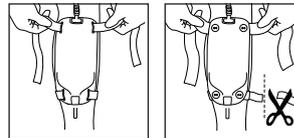


Fije las cintas a la bolsa. Coloque la bolsa en la pierna. Puede cortarse la parte sobrante de la cinta.

Cinta de silicona Conveen

Utilice la cinta más larga en la parte superior de la bolsa. Si se coloca la bolsa en la pantorrilla, enrolle la cinta superior haciendo un ocho por detrás y por encima de la rodilla.


Colocación

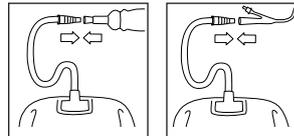

Si el conector tiene un tapón protector, quíteselo.

Acople el conector al colector de orina o a la sonda.

El sistema colector urinario es ahora funcional.

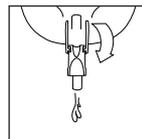


Se recomienda vaciar la bolsa cuando se llene un poco más de la mitad para garantizar un vaciado óptimo.

Retirada

Desconecte la bolsa del colector de orina o la sonda.

Aflove las cintas y retire la bolsa de la pierna.

Eliminación

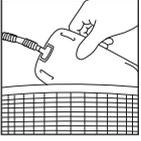

Cambie la bolsa conforme a las directrices y recomendaciones locales.

Las cintas pueden volver a utilizarse.

Vacíe la bolsa antes de desecharla.

El producto está diseñado para un solo uso y debe eliminarse de acuerdo con las directrices locales; p. ej., junto con los residuos domésticos normales.

No tire el producto por el inodoro.

Notificación de incidentes

Si, durante el uso de este dispositivo o como resultado de su uso, se produce un incidente grave, hay que notificarlo al fabricante y a las autoridades nacionales.

Explicación de los símbolos



Producto sanitario



Indica que el producto cumple la legislación europea para productos sanitarios



Número de catálogo



Fecha de caducidad (DD-MM-AAAA)



Código de lote



Fecha de fabricación (DD-MM-AAAA)



Fabricante



Consultar las instrucciones de uso



No reutilizar



No estéril



Indica un código de barras que contiene la Identificación Única del Dispositivo



(Global Trade Item Number) Número de artículo comercial internacional



Mantener alejado de la luz solar



Envase reciclable