

Poche de jambe

Conveen®

Attache de jambe



Mode d'emploi

23323356 Version 1

Le logo Coloplast est une marque déposée de Coloplast A/S. Tous droits réservés. © 2020-04-17

Utilisation prévue

La poche à urine est prévue pour collecter l'urine passivement.

Indications

Les poches à urine sont indiquées pour les patients souffrant d'incontinence et/ou de rétention urinaire quelle que soit l'étiologie.

Avertissements

Il n'est pas recommandé de réutiliser un produit à usage unique car des contaminations croisées peuvent se produire.

Le retraitement, le nettoyage, la désinfection et/ou la (re)stérilisation peuvent compromettre les caractéristiques du produit et créer un risque supplémentaire de dommages corporels ou d'infection chez l'utilisateur.

Cette poche de jambe est destinée à être utilisée hors du lit et en déplacement. Passer à une poche de nuit de plus grande capacité pour s'allier et dormir. Il est également possible de laisser la poche de jambe en place et de raccorder une poche de nuit pour augmenter la capacité globale du système de recueil d'urine.

Ce produit contient des phtalates et ne doit être utilisé chez l'enfant ou la femme enceinte ou allaitante qu'après consultation d'un médecin.

Informations

La poche est conçue pour un usage unique.

Le produit a une capacité de 600/800 ml.

L'indicateur de volume imprimé n'est qu'une échelle volumétrique indicative.

Les sangles peuvent être lavées à une température ne dépassant pas 40 °C/104 °F.

Les produits sont conçus pour être conservés dans leur boîte jusqu'à leur utilisation, car la boîte les protège et l'étiquette sur la boîte contient des informations importantes telles que le code de lot, la date de péremption et un code-barres unique.

Il n'est pas nécessaire de retirer le dispositif avant une IRM car il est compatible avec l'IRM.


Coloplast n'accepte aucune responsabilité en cas de lésions ou de pertes susceptibles de survenir si ce produit est utilisé d'une manière contraire aux recommandations actuelles de Coloplast.

Nombre maximum de réutilisations permises


Les sangles doivent être remplacées quand elles commencent à perdre leur élasticité.

Utilisation

Préparation

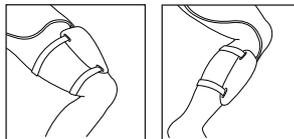


La poche de jambe comporte un tube d'entrée pouvant être pré-fixé à la poche ou séparé de celle-ci. La longueur du tube détermine l'emplacement de la poche sur la jambe.

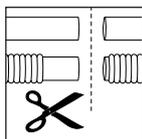


Si le tube ne présente pas d'adaptateur d'entrée pré-fixé ou si le tube lui-même n'est pas fixé à la poche, il est possible de raccourcir le tube à la longueur souhaitée. Il suffit de couper le tube à l'aide de ciseaux.


Lors de la coupe d'un tube annelé, garder une partie de la section droite aussi grande que possible. Cela garantit un raccordement sûr entre le tube et l'adaptateur lors du montage de l'adaptateur.

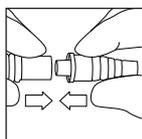

Raccorder le connecteur à la tubulure en poussant l'extrémité fine du connecteur aussi loin que possible dans la tubulure.

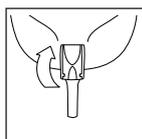

Vérifier que le robinet de vidange est fermé.

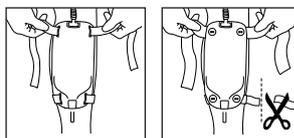


Fixer les attaches sur la poche. Ajuster la poche à la jambe. Les surplus des attaches peuvent être coupés.

Attache siliconée Conveen

Placer l'attache la plus longue en haut de la poche. Si la poche est installée sur le mollet, enrouler l'attache supérieure en formant un huit derrière et sur le genou.


Application

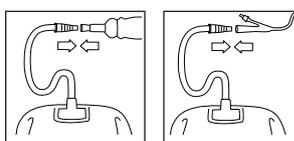

Si l'adaptateur est équipé d'un bouchon de protection, le retirer.

Raccorder l'adaptateur à l'étui pénien ou à la sonde.

Le système de recueil d'urine est désormais fonctionnel.

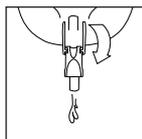


Nous recommandons de vider la poche lorsqu'elle est remplie à un peu plus de la moitié afin de garantir un drainage optimal.

Retrait

Séparer la poche de l'étui pénien ou de la sonde.

Détacher les attaches et ôter la poche de la jambe.

Élimination

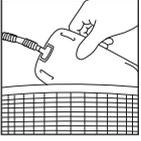

Changer la poche conformément aux directives et recommandations locales.

Les attaches peuvent être réutilisées.

Vider la poche avant de la jeter.

Le produit est destiné à un usage unique exclusivement et doit être éliminé conformément aux directives locales, par ex. avec les déchets ménagers normaux.

Ne pas jeter le produit dans les toilettes.

Signalement des incidents

Si un incident grave s'est produit au cours de l'utilisation de ce dispositif ou suite à son utilisation, le signaler au fabricant et aux autorités nationales compétentes.

Explication des symboles



Dispositif médical



Indique que le produit est conforme à la législation européenne sur les dispositifs médicaux



Référence catalogue



Date de péremption (AAAA-MM-JJ)



Code de lot



Date de fabrication (AAAA-MM-JJ)



Fabricant



Consulter le mode d'emploi



Ne pas réutiliser



Non stérile



Indique un code-barres comportant un identifiant unique de dispositif (UDI)



(Global Trade Item Number) Code article international



Garder à l'abri de la lumière du soleil



Emballage recyclable