



Mode d'emploi

23323373 Version 1

Le logo Coloplast est une marque déposée de Coloplast A/S. Tous droits réservés. © 2020-04-10

Finalité prévue

La poche à urine est destinée à recueillir passivement l'urine.

Indications

Les poches à urine sont indiquées pour des patients qui souffrent d'incontinence urinaire ou de rétention de causes diverses.

Avertissements

La réutilisation de ce produit à usage unique n'est pas recommandée, une contamination croisée pourrait se produire.

Le retraitement, le nettoyage, la désinfection ou la (re)stérilisation peut compromettre les caractéristiques du produit et créer un risque supplémentaire de dommages corporels ou d'infection chez l'utilisateur.

Cette poche de jambe est conçue pour une utilisation hors du lit et en déplacement. Passez à une poche de nuit d'une capacité supérieure pour vous aliter ou dormir. Vous pouvez également laisser votre poche de jambe en place et raccorder une poche de nuit afin d'augmenter la capacité globale du système de recueil d'urine.

Ce produit contient des phtalates et ne doit être utilisé chez l'enfant ou la femme enceinte ou allaitante qu'après consultation d'un professionnel de santé.

Description du produit

La poche est conçue pour un usage unique.

Le produit a une capacité de 600/800 ml.

L'indicateur de volume imprimé n'est qu'une échelle de mesure volumétrique indicative.

Les sangles peuvent être lavées à une température de 40°C / 104°F au plus.

Les produits sont conçus pour être conservés dans leur boîte jusqu'à leur utilisation, car la boîte les protège et l'étiquette sur la boîte contient des informations importantes telles que le numéro de lot, la date de péremption et un code-barres unique.

Il n'est pas nécessaire de retirer ce dispositif avant une IRM, car il est compatible IRM.

Coloplast décline toute responsabilité pour les blessures et les préjudices qui résulteraient d'un emploi de ce produit d'une manière non conforme aux recommandations de Coloplast.

Nombre maximum de réutilisations autorisées


Les sangles doivent être remplacées quand elles commencent à perdre leur élasticité.

Mode d'emploi

Préparation




La poche de jambe comporte un tube d'entrée pouvant être préfixé à la poche ou séparé de celle-ci. La longueur du tube détermine l'emplacement de la poche sur la jambe.

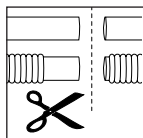



Si le tube ne présente pas d'adaptateur d'entrée préfixé ou si le tube lui-même n'est pas fixé à la poche, il est possible de raccourcir le tube à la longueur souhaitée. Il suffit de couper le tube à l'aide de ciseaux.

Lors de la coupe d'un tube annelé, laisser en place une partie de la section droite aussi grande que possible. Cela garantit un raccordement sûr entre le tube et l'adaptateur lors du montage de l'adaptateur.

Raccorder l'adaptateur au tube en poussant l'extrémité fine de l'adaptateur aussi loin que possible dans le tube.

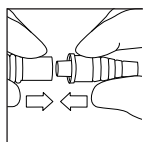

Vérifier que le robinet de vidange est fermé.

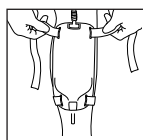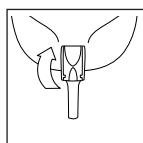


Fixer les attaches sur la poche. Ajuster la poche à la jambe. Les surplus des attaches peuvent être coupés.

Attache siliconée Conveen

Placer l'attache la plus longue en haut de la poche. Si la poche est installée sur le mollet, enrouler l'attache supérieure en formant un huit derrière et sur le genou.


Application

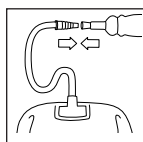

Si l'adaptateur est équipé d'un bouchon de protection, le retirer.

Raccorder l'adaptateur à l'étui pénien ou à la sonde.

Le système de recueil d'urine est désormais fonctionnel.

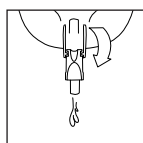


Nous recommandons de vider la poche lorsqu'elle est remplie à un peu plus de la moitié afin de garantir un drainage optimal.

Retrait

Séparer la poche de l'étui pénien ou de la sonde.

Détacher les attaches et ôter la poche de la jambe.

Elimination

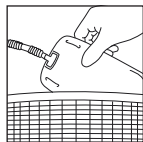

Changer la poche conformément aux directives et recommandations locales.

Les attaches sont réutilisables.

Vider la poche avant de la mettre au rebut.

Le produit est destiné à un usage unique exclusivement et doit être éliminé conformément aux directives locales, par ex. avec les déchets ménagers normaux.

Ne pas jeter le produit dans les toilettes.

Signalement des incidents

Si un incident grave venait à se produire pendant l'utilisation de ce dispositif ou comme conséquence de son utilisation, veuillez en informer le fabricant ainsi que votre autorité nationale.

Explication des symboles



Dispositif médical



Indique que le produit est conforme à la législation européenne concernant les dispositifs médicaux



N° de référence



Date de péremption (AAAA-MM-JJ)



Code de lot



Date de fabrication (AAAA-MM-JJ)



Fabricant



Consulter le mode d'emploi



Ne pas réutiliser



Non stérile



Présente un code-barres qui contient le numéro d'identification unique du dispositif



(Global Trade Item Number) Code article international



Conserver à l'abri du rayonnement solaire



Emballage recyclable