

Nachtzak

Conveen®

Hanger/standaard voor
opvangzak



Gebruiksaanwijzing

23323450 Version 1

Het Coloplast-logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S.
Alle rechten voorbehouden. © 2020-04-30

Beoogde doel

Het urineopvangzakje is bedoeld om passief urine op te vangen.

Indicaties

Urineopvangzakjes zijn geïndiceerd voor patiënten die lijden aan urine-incontinentie en/of retentie van elke oorzaak.

Waarschuwingen

Hergebruik van dit product voor eenmalig gebruik is niet aangewezen, kruisbesmetting kan optreden.

Herbehandelen, wassen, desinfecteren en/of (her)steriliseren kan een nadelig effect hebben op de productkenmerken, waardoor voor de gebruiker meer risico ontstaat op letsel of infectie.

Informatie

Het zakje is ontworpen voor eenmalig gebruik.

Het zakje is ontworpen met een volumecapaciteit van 2000ml.

De afgedrukte volume-indicator is slechts een indicatief volumetrisch meetinstrument.


Het is de bedoeling dat de producten in de doos worden bewaard totdat ze verwijderd worden voor gebruik, aangezien de doos de producten beschermt en er op de sticker van de doos belangrijke informatie staat, zoals het partijnummer, de uiterste gebruiksdatum en een unieke streepjescode.

Coloplast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van dit product op een andere wijze dan door Coloplast in de gebruiksaanwijzing wordt aanbevolen.

Herbruikbare producten

Het maximaal toegestane aantal keer hergebruiken voor de haak van het zakje is eenmalig gebruik per dag gedurende 5 jaar.

Voorbereiding

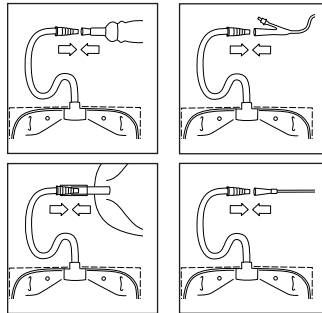


Een nachtzak kan direct aan een condoomkatheter of verblijfskatheter worden bevestigd.

Of de zak kan worden aangesloten op een urineopvangzak voor extra opvangcapaciteit gedurende de nacht. Om een koppeling te maken voor de nacht moet de urineopvangzak zijn voorzien van een flexibel uitgangsbuisje waarop de inlaatconnector van de nachtzak kan worden aangesloten.


Intermitterende katheterisatie

Een nachtzak kan ook worden aangesloten op een intermitterende katheter voor de urineopvang tijdens intermitterende katheterisatie.

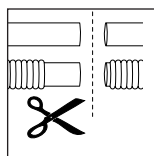


Als de slang geen vooraf bevestigde inlaatconnector heeft of de slang zelf niet al aan de zak bevestigd is, kunt u de slang inkorten tot de gewenste lengte. U kunt de slang gewoon met een schaar afknippen.

Als u een geribbelde slang afknijpt, moet u zo veel mogelijk van het rechte stuk overlaten. Dit zorgt voor een stevige aansluiting tussen de slang en de connector, als u de connector bevestigt, of tussen de zak en de slang als u de slang bevestigt.

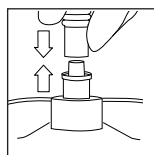


Bevestig de connector op de slang door het dunne deel van de connector zover mogelijk in de slang te duwen.

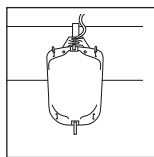

Gebruik een Conveen bedhaak om de nachtzak aan op te hangen.


Maak de zak stevig aan de bedhaak vast door ervoor te zorgen dat de tanden van de bedhaak in de gleuven boven in de zak grijpen. Bevestig de bedhaak aan de bedrail.

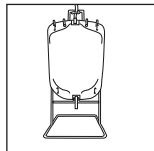

Voor een optimale afvoer is het van belang dat de nachtzak zich in een lagere positie bevindt dan uw eigen positie wanneer u in bed ligt.



Intermitterende katheterisatie

Hang de zak op of plaats de zak op een voor u gemakkelijke plaats en zorg ervoor dat de zak zich in een lagere positie bevindt dan uw onderbuik, ongeacht of u de voorkeur geeft aan zittend, staand of liggend katheteriseren.

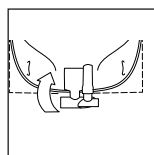



Verzekert u ervan dat het aftapkraantje dicht zit.

Aanbrengen

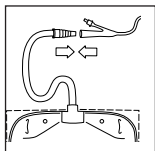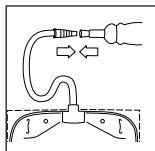

Verwijder de eventueel aanwezige beschermkap van de connector.

Sluit de connector aan op de condoomkatheter of ingebrachte katheter of sluit de connector aan op de aftapslang van de beenzak. Open het aftapkraantje van de beenzak.

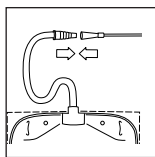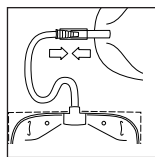


Het urineopvangsysteem kan nu gebruikt worden.

Intermitterende katheterisatie

Sluit de connector aan op de intermitterende katheter.

Wanneer u met katheteriseren begint, wordt de urine opgevangen in de bedzak.

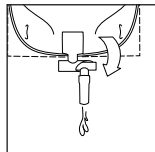

We raden aan de zak te legen als hij iets meer dan halfvol is, om een optimale afvoer te garanderen.

Intermitterende katheterisatie

Leeg de bedzak na iedere intermitterende katheterisatie.

Verwijderen


Maak de nachtzak los van de condoomkatheter of ingebrachte katheter of, als de nachtzak aangesloten is op de beenzak: sluit het aftapkraantje van de beenzak. Maak vervolgens de nachtzak los. Raak het open uiteinde van de aftapslang van de beenzak niet aan.

Intermitterende katheterisatie

Maak na voltooiing van de katheterisatie de bedzak los van de intermitterende katheter.

Maak de zak los van de bedhaak.

Weggooiën afval

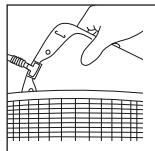

Vervang de zak volgens de lokale richtlijnen en aanbevelingen.

De bedhaak van de zak kan worden hergebruikt.

Maak de zak leeg voordat u hem weggooit.

Het product is uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik en moet volgens de plaatselijke richtlijnen worden afgevoerd, bijvoorbeeld met het normale huishoudelijke afval.

Spoel het product niet door het toilet.

Melden van incidenten

Als er zich een ernstig incident voordoet tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als resultaat van het gebruik, gelieve dit dan aan de fabrikant en aan uw nationale autoriteit te melden.

Verklaring van de symbolen



Medisch hulpmiddel



Geeft aan dat het product in overeenstemming is met de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen



Catalogusnummer



Te gebruiken tot (DD-MM-JJJJ)



Partijnummer



Productiedatum (DD-MM-JJJJ)



Fabrikant



Gebruiksaanwijzing raadplegen



Niet voor hergebruik



Niet steriel



Geeft een streepjescode aan die een unieke hulpmiddelidentificatie bevat



(Global Trade Item Number) Internationaal artikelnummer



Niet blootstellen aan zonlicht



Recyclebare verpakking