

Poche de nuit

Conveen®

Crochet/support de poche



Mode d'emploi

23323451 Version 1

Le logo Coloplast est une marque déposée de Coloplast A/S. Tous droits réservés. © 2020-04-28

Utilisation prévue

La poche à urine est prévue pour collecter l'urine passivement.

Indications

Les poches à urine sont indiquées pour les patients souffrant d'incontinence et/ou de rétention urinaire quelle que soit l'étiologie.

Avertissements

Il n'est pas recommandé de réutiliser un produit à usage unique car des contaminations croisées peuvent se produire.

Le retraitement, le nettoyage, la désinfection et/ou la (re)stérilisation peuvent compromettre les caractéristiques du produit et créer un risque supplémentaire de dommages corporels ou d'infection chez l'utilisateur.

Informations

La poche est conçue pour un usage unique.

La poche est dotée d'une capacité de 2000 ml.

L'indicateur de volume imprimé n'est qu'une échelle volumétrique indicative.


Les produits sont conçus pour être conservés dans leur boîte jusqu'à leur utilisation, car la boîte les protège et l'étiquette sur la boîte contient des informations importantes telles que le code de lot, la date de péremption et un code-barres unique.

Coloplast n'accepte aucune responsabilité en cas de lésions ou de pertes susceptibles de survenir si ce produit est utilisé d'une manière contraire aux recommandations actuelles de Coloplast.

Produits réutilisables

Le nombre maximum de réutilisations permises pour le porte-poche est d'une utilisation par jour durant 5 ans.

Préparation

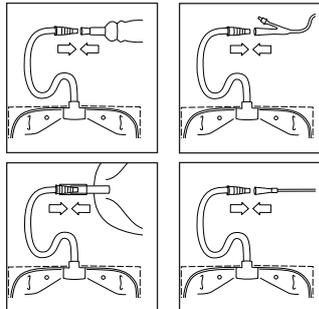


Une poche de vidange de nuit peut être directement reliée à un étui pénien ou à une sonde à demeure.

Elle peut également être reliée à une poche de jambe pour augmenter la capacité de drainage pendant la nuit. Pour la nuit, la poche de jambe doit être équipée d'un tube de sortie souple qui s'adaptera au raccord d'entrée de la poche de vidange de nuit.


Sondage intermittent

Une poche de vidange de nuit peut aussi être reliée à une sonde intermittente pour recueillir les urines pendant un sondage intermittent.

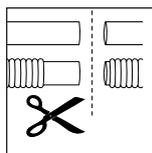


Si le tube ne présente pas d'adaptateur d'entrée préfixé ou si le tube lui-même n'est pas fixé à la poche, il est possible de raccourcir le tube à la longueur souhaitée. Il suffit de couper le tube à l'aide de ciseaux.

Lors de la coupe d'un tube annelé, gardez une partie de la section droite aussi grande que possible. Cela garantit un raccordement sûr entre le tube et l'adaptateur lors du montage de l'adaptateur.

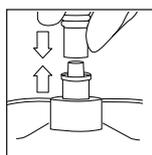


Raccordez la tubulure à la poche en poussant fermement l'extrémité coupée du tube dans l'orifice de connexion de la poche.

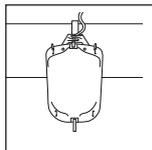

Utilisez un attache de lit pour suspendre la poche de vidange de nuit.


Suspendez solidement la poche sur l'attache de lit en insérant les dents de l'attache dans les fentes en haut de la poche. Fixez l'attache de lit avec poche sur le côté de lit.

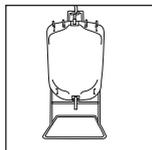

Pour assurer un drainage optimal, il est important que la poche de vidange de nuit soit placée plus bas que vous quand vous êtes couché dans le lit.



Sondage intermittent

Suspendez ou placez la poche à l'endroit que vous trouvez le plus pratique, en vous assurant qu'elle est placée plus bas que votre bassin, selon que vous préférez vous autosonder assis, debout ou couché.

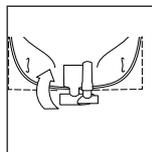



Vérifier que le robinet de vidange est fermé.

Application

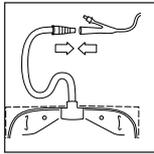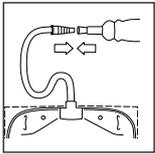

Si l'adaptateur est équipé d'un bouchon de protection, retirez-le.

Raccordez l'adaptateur à l'étui pénien ou à la sonde à demeure.

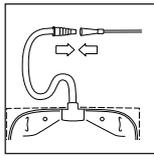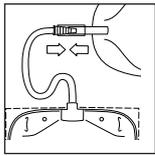


Vous pouvez également relier fermement le connecteur au tube de vidange de la poche de jambe. Ouvrez le robinet de vidange de la poche de jambe.

Le système de recueil d'urine est désormais fonctionnel.

Sondage intermittent

Raccordez l'adaptateur à la sonde intermittente.

Quand vous commencez l'autosondage, l'urine se vide dans la poche de vidange de nuit.

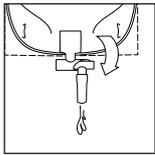

Nous recommandons de vider la poche lorsqu'elle est remplie à un peu plus de la moitié afin de garantir un drainage optimal.

Sondage intermittent

Videz la poche de vidange de nuit après chaque sondage intermittent.

Retrait

Déconnectez la poche de vidange de nuit de l'étui pénien ou de la sonde à demeure.


Si la poche de vidange de nuit est reliée à la poche de jambe, fermez le robinet de vidange de la poche de jambe. Déconnectez ensuite la poche de vidange de nuit. Évitez de toucher l'extrémité ouverte du tube de sortie de la poche de jambe.

Sondage intermittent

Une fois le sondage terminé, débranchez la poche de vidange de nuit de la sonde intermittente.

Détachez la poche de l'attache de lit.

Élimination

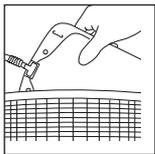

Changez la poche conformément aux directives et recommandations locales.

L'attache de lit peut être réutilisée.

Videz la poche avant de la mettre au rebut.

Le produit est destiné à un usage unique exclusivement et doit être éliminé conformément aux directives locales, par ex. avec les déchets ménagers normaux.

Ne pas jeter le produit dans les toilettes.

Signalement des incidents

Si un incident grave s'est produit au cours de l'utilisation de ce dispositif ou suite à son utilisation, le signaler au fabricant et aux autorités nationales compétentes.

Explication des symboles



Dispositif médical



Indique que le produit est conforme à la législation européenne sur les dispositifs médicaux



Référence catalogue



Date de péremption (AAAA-MM-JJ)



Code de lot



Date de fabrication (AAAA-MM-JJ)



Fabricant



Consulter le mode d'emploi



Ne pas réutiliser



Non stérile



Indique un code-barres comportant un identifiant unique de dispositif (UDI)



(Global Trade Item Number) Code article international



Garder à l'abri de la lumière du soleil



Emballage recyclable