

Spray pour retrait d'adhésif

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou toute autre source d'ignition.

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer une température supérieure à 50°C/122°F.

Description du produit

Le produit est à base de silicone et réutilisable. Le produit sèche en quelques secondes et n'a pas d'effet sur l'adhérence d'autres appareillages.

Composition : contient un mélange de dérivés siloxane.

Coloplast décline toute responsabilité pour les blessures et les préjudices qui résulteraient d'un emploi de ce produit d'une manière non conforme aux recommandations de Coloplast.

Mode d'emploi

1. Pulvériser le produit autour des bords de l'adhésif.
2. Après quelques secondes, décoller doucement l'adhésif. Répéter l'opération si nécessaire.

Élimination

Le produit doit être éliminé comme les autres bombes d'aérosols conformément à la réglementation locale.

Signalement des incidents

Si un incident grave venait à se produire pendant l'utilisation de ce dispositif ou comme conséquence de son utilisation, veuillez en informer le fabricant ainsi que votre autorité nationale.



Mode d'emploi

23323501

Version 1 Le logo Coloplast est une marque déposée de Coloplast A/S. Tous droits réservés.© 2020-05-28

Finalité prévue

Le spray pour retrait d'adhésif Brava est destiné à retirer les adhésifs médicaux de la peau intacte.

Mises en garde

Éviter l'utilisation directe sur une peau lésée, par exemple les lits de plaie et les muqueuses (yeux, oreilles, nez, bouche, vagin), car le produit peut provoquer une irritation cutanée.

Éviter l'inhalation directe, car elle peut provoquer une irritation temporaire des voies respiratoires.

Il n'est pas recommandé de l'utiliser sur les prématurés, les nouveau-nés ou les nourrissons de moins de 4 kg en raison de leur peau immature.

Danger : aérosol extrêmement inflammable.

Récipient sous pression : peut exploser s'il est chauffé.

Conservez hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et d'autres sources d'ignition. Ne pas fumer.

Explication des symboles



Dispositif médical



Indique que le produit est conforme à la législation européenne concernant les dispositifs médicaux



N° de référence



Date de péremption (AAAA-MM-JJ)



Code de lot



Date de fabrication (AAAA-MM-JJ)



Fabricant



Consulter le mode d'emploi



Indique la limite supérieure de la plage de température à laquelle le dispositif médical peut être exposé en toute sécurité



Avertissement



Présente un code-barres qui contient le numéro d'identification unique du dispositif



(Global Trade Item Number) Code article international



Conserver à l'abri du rayonnement solaire



Emballage recyclable



Conforme à la directive aérosols 75/324/CEE



Extrêmement inflammable