



Instrucciones de uso

23324119 Version 1

El logotipo de Coloplast es una marca registrada de Coloplast A/S. Todos los derechos reservados. © 2020-08-04

Distribuidor:

Coloplast Corp.
1601 W. River Rd. N.
Minneapolis, MN 55411 USA
1-800-533-0464
www.coloplast.us

Objetivo previsto

La bolsa de urostomía de noche está diseñada para la recolección pasiva de orina.

Indicaciones

La bolsa de urostomía de noche está indicada para personas que sufren de incontinencia o retención urinaria.

Advertencias

No se recomienda la reutilización de este producto de un solo uso, ya que puede producirse contaminación cruzada.

El reprocesamiento, lavado, desinfección y/o (re)esterilización del producto pueden afectar sus características, generando un riesgo adicional de daño físico o infección al usuario.

Información

La bolsa no es estéril y está diseñada para un solo uso.

El producto tiene una capacidad de 2000 ml.

La bolsa de urostomía de noche se puede usar junto con todas las bolsas de urostomía de Coloplast.

El conector integrado de la bolsa de noche se conecta de forma segura a la salida de las bolsas de urostomía de Coloplast.


El indicador de volumen impreso es solo una escala de medición volumétrica indicativa.

Los productos deben almacenarse en la caja hasta que sean retirados para su uso, ya que la caja protege los productos y la etiqueta de la caja contiene información importante, como el código de lote, la fecha de caducidad y un código de barras único.


Coloplast no se hace responsable de ninguna lesión o pérdida que pueda surgir por el uso de este producto sin seguir las recomendaciones actuales de Coloplast.

Modo de empleo


Preparación

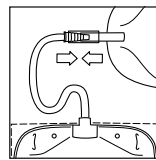


Para conectarla para la noche, la bolsa de urostomía de noche debe tener colocado el tubo de salida flexible (incluido en el embalaje del producto).

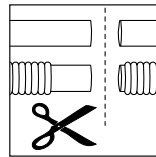


Cuando corte un tubo corrugado, deje la mayor parte de la sección recta posible. Esto asegurará una conexión segura entre el tubo y el conector al ensamblar el conector.

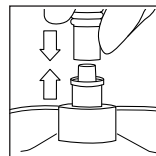


Conecte el tubo a la bolsa empujando firmemente el extremo cortado del tubo dentro de la conexión de entrada de la bolsa.

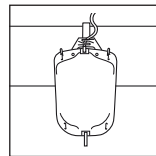

Puede utilizar un colgador de bolsa o un soporte Conveen para suspender la bolsa de drenaje de noche.

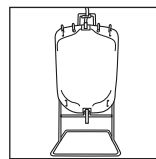

Para colocar la bolsa de forma segura en el colgador o en el soporte, inserte los dientes del colgador o del soporte en las ranuras de la parte superior de la bolsa. Enganche el colgador de bolsa en la baranda de la cama o coloque el soporte en el piso al lado de la cama.

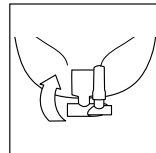

Salida de 2 pasos


Para garantizar un drenaje óptimo, es importante que la bolsa de drenaje de noche esté colocada más abajo que usted cuando esté acostado en la cama.

Asegúrese de que el tapón de salida está cerrado.

La válvula apunta hacia arriba cuando está cerrada.


La bolsa de urostomía de noche ahora está lista para conectarse a su bolsa de urostomía.

Aplicación

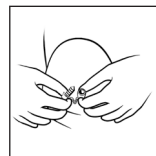


Sostenga el tapón/extremo de la salida de la bolsa de urostomía hacia arriba y apriete el extremo externo de la salida, saque el tapón y sostenga la salida.

Puede vaciar la bolsa de urostomía antes de conectarla a la bolsa de urostomía de noche.

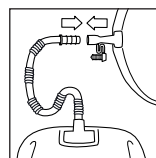

Tubo con conector previamente colocado

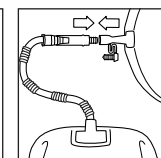


Tubo acortado con conectores colocados

Conecte la bolsa de urostomía de noche a la salida de la bolsa de urostomía.

El sistema de recolección de orina ahora es funcional.

Vaciado

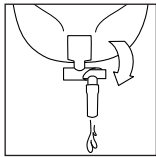


Abra y vacíe la bolsa en 2 pasos:
1) Presione la válvula hacia abajo.
2) Presione en un lado para vaciar.

Se recomienda vaciar la bolsa cuando se llene un poco más de la mitad para garantizar un vaciado óptimo.

Retirada

Si la bolsa de urostomía de noche está conectada a una bolsa de urostomía, cierre la válvula de salida de la bolsa de urostomía. Luego, desconecte la bolsa de noche. Evite tocar el extremo abierto del tubo de salida de la bolsa de urostomía.

Eliminación

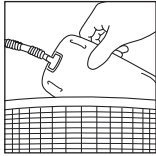

Cambie la bolsa de noche de acuerdo con las pautas y recomendaciones locales.

Vacíe la bolsa antes de desecharla.

El producto está diseñado para un solo uso y debe eliminarse según la reglamentación local (por ejemplo, junto con los residuos domésticos comunes).

No tire el producto por el inodoro.

Informe de incidentes

Si durante el uso de este dispositivo, o como resultado de su uso, se ha producido un incidente grave, por favor informe al fabricante y a las autoridades nacionales de su país.

Explicación de los símbolos



Dispositivo médico



Indica que el producto cumple con la legislación europea para dispositivos médicos



Número de catálogo



Fecha de caducidad (AAAA-MM-DD)



Código de lote



Fecha de fabricación (AAAA-MM-DD)



Fabricante



Consulte las instrucciones de uso



No reutilizar



Indica que un código de barras contiene Identificación única de dispositivo



(Global Trade Item Number) Número mundial de artículo comercial



Mantener protegido de la luz del sol



Envase reciclable