

SenSura® Mio



SenSura® Mio Convex

Sacca per stomia aperta monopezzo

Cura della stomia



Istruzioni per l'uso

23324201 Version 1


Il logo Coloplast è un marchio registrato di proprietà di Coloplast A/S. © Tutti i diritti sono riservati

Velcro® è un marchio di Velcro Industries B.V.

2020-08-20


Come utilizzare il prodotto

Preparazione

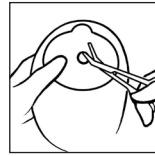


Praticare un foro nell'adesivo usando un paio di forbici curve e la guida di taglio presente sull'adesivo in modo tale che questo si adatti alla forma e alla dimensione dello stoma.


È possibile misurare la dimensione e la forma dello stoma con la guida apposita fornita in dotazione. Per ridurre il rischio di perdite e i problemi cutanei è molto importante che il foro corrisponda perfettamente allo stoma.

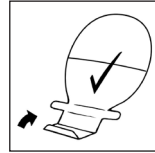


Posizionare la sacca su una superficie piana con l'adesivo rivolto verso il basso. Chiudere l'apertura piegando tre volte la parte finale dell'apertura verso l'alto in modo tale che la striscia di Velcro® sia visibile.

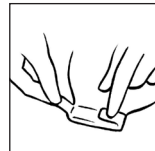


Piegare le due linguette turchesi verso l'interno per fissare il Velcro®.

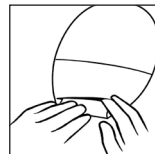

L'apertura può essere nascosta usando il punto in Velcro® presente sopra l'apertura oppure usando la striscia di Velcro® posta a metà della sacca.

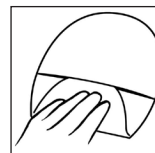

(L'opzione non è applicabile alle sacche trasparenti sulle quali non è presente il punto in Velcro® a metà della sacca).

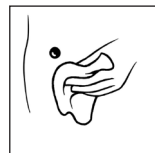

Pulire con cura lo stoma e la cute circostante. La cute deve essere completamente asciutta prima di procedere all'applicazione dell'adesivo.

Scopo previsto

La sacca per stomia è concepita per raccogliere passivamente il materiale in uscita dallo stoma. La placca adesiva è integrata nella sacca per stomia ed è progettata per aderire alla cute integra attorno allo stoma.

Indicazioni

Il dispositivo è indicato per i soggetti stomizzati.

Avvertenze

Si sconsiglia il riutilizzo dei prodotti monouso a causa del rischio di contaminazione incrociata.

Trattamento, lavaggio, disinfezione e/o (ri)sterilizzazione possono compromettere le caratteristiche del prodotto, determinando un ulteriore rischio di danno fisico o infezione per l'utente.

Precauzioni

Per un utilizzo appropriato, consultare il proprio operatore sanitario di riferimento prima di iniziare a utilizzare un prodotto convesso.

Informazioni

Sacca per stomia monouso

Per una corretta conservazione, i prodotti devono essere conservati nella confezione che li protegge fino al momento dell'utilizzo; l'etichetta sulla confezione contiene informazioni importanti come codice del lotto, data di scadenza e codice a barre univoco.

Il dispositivo è compatibile con la risonanza magnetica (RM), quindi non è necessario rimuoverlo prima di una scansione RM.

Coloplast non si assume alcuna responsabilità per lesioni o perdite che potrebbero verificarsi se il prodotto venisse usato in modo non conforme alle raccomandazioni vigenti di Coloplast.

Condizioni di conservazione speciali


Conservare il prodotto in posizione orizzontale.

Conservare lontano dai raggi solari.

Applicazione



Rimuovere la pellicola protettiva dall'adesivo.

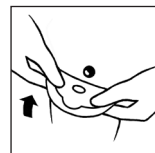


Allineare l'adesivo allo stoma ed esercitare una decisa pressione sulla pelle. L'adesivo dovrà aderire perfettamente allo stoma. Per prevenire perdite, è importante garantire una tenuta perfetta attorno allo stoma. A questo scopo, esercitare pressione sulla placca adesiva/sacca addominale iniziando dall'area attorno allo stoma e premendo quindi l'adesivo sulla pelle. Passare un dito tutto attorno allo stoma al fine di garantire la perfetta tenuta dell'adesivo. Premere l'adesivo, procedendo dallo stoma verso l'esterno fino ai bordi, per garantire il completo contatto del medesimo con la cute.



Esercitare una leggera pressione sulla sacca per assicurare una rapida adesione e una perfetta corrispondenza tra il foro e lo stoma.

Come svuotare la sacca

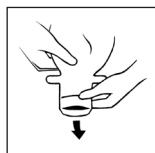


Al bisogno, aprire l'apertura e svuotare la sacca nel bagno.



Pulire l'apertura con la carta igienica. Dopo aver svuotato la sacca, piegare e chiudere nuovamente l'apertura.

Rimozione

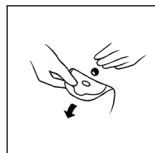


Rimuovere delicatamente la sacca utilizzando l'aletta di rimozione dell'adesivo e arrotolare lentamente l'adesivo verso il basso. Applicare una leggera pressione sulla cute con la mano libera per agevolare la rimozione.

Smaltimento

Il prodotto è esclusivamente monouso e deve essere smaltito secondo le linee guida locali, ad esempio tra i rifiuti domestici.


Non gettare il prodotto nei sanitari.

Etichetta per il filtro

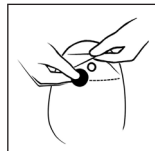

Se necessario, per prevenire la fuoriuscita di gas, posizionare sul filtro una delle etichette da filtro fornite.

Cintura

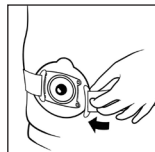

Regolare la lunghezza della cintura tirando le fasce per adattarla al proprio corpo. Non c'è bisogno di rimuovere il tessuto che ricopre la fibbia. Fissare ciascuno dei quattro ganci della cintura a una delle quattro alette poste su entrambi i lati della placca. Iniziando dalla parte anteriore, premere con delicatezza verso il corpo. Tirare quindi verso l'esterno i ganci della cintura; uno scatto ne conferma la giusta posizione.

(Applicabile solo ai prodotti con inserti laterali.)

Segnalazione di incidenti

Se durante l'utilizzo di questo prodotto o a seguito del suo utilizzo, si è verificato un incidente grave, si prega di segnalarlo al produttore e all'autorità nazionale.

Spiegazione dei simboli



Dispositivo medico



Indica che il prodotto è conforme alla legislazione europea per i dispositivi medici



Numero di catalogo



Data di scadenza (AAAA-MM-GG)



Codice di lotto



Data di produzione (AAAA-MM-GG)



Produttore



Consultare le istruzioni per l'uso



Non riutilizzare



Indica un codice a barre contenente l'identificazione univoca del dispositivo (UDI)



(Global Trade Item Number) Identificatore di prodotto globale per uso commerciale



Conservare lontano dai raggi solari



Conservare in posizione verticale con le frecce rivolte verso l'alto



Confezione riciclabile



Compatibile con la risonanza magnetica