

SenSura® Mio Convex

Kaksiosainen tyhjennettävä Flex-avannepussi

Pohjalevy

Avanteen hoito



Käyttöohje

23324332 Version 1

Coloplast-logo on Coloplast A/S -yhtiön rekisteröity tavaramerkki. Kaikki oikeudet pidätetään. © 2020-09-23

Velcro® on Velcro Industries B.V:n omaisuutta

Käyttötarkoitus

Avannepussi on tarkoitettu avanteesta tulevan eritteen keräämiseen. Avannepussiin on liitetty tarttuva pohjalevy, joka on tarkoitettu kiinnittymään avanteen ympärillä olevaan ehjään ihoon.

Indikaatio

Laite on tarkoitettu ihmisille, joilla on avanne.

Varoitus

Tämän kertakäyttöisen tuotteen uudelleenkäyttöä ei suositella, se voi aiheuttaa ristikontaminaation.

Uudelleenkäyttö, puhdistus, desinfiointi ja/tai (uudelleen)sterilointi voivat heikentää tuotteen ominaisuuksia, mikä taas muodostaa ylimääräisen fyysisen haitan tai infektion vaaran potilaalle.

Huomautus

Asianmukaisen käytön varmistamiseksi pyydä ohjeita terveydenhuollon ammattihenkilöltä, ennen kuin ryhdyt käyttämään kuperaa tuotetta.

Tietoa

Kertakäyttöinen avannepussi.

Tuotteet on tarkoitettu säilytettäväksi laatikossa, kunnes ne otetaan käyttöön, sillä laatikko suojaa tuotteita ja laatikon tarra sisältää tärkeitä tietoja, mm. eränumeron (LOT), viimeisen käyttöpäivän ja yksilöllisen viivakoodin.

Laitetta ei tarvitse poistaa ennen magneettikuvausta, sillä se ei aiheuta vaaraa magneettikuvauksessa.


Coloplast ei ota vastuuta loukkaantumisista tai vahingoista, joita voi sattua, jos tuotetta käytetään Coloplastin voimassa olevien suositusten vastaisesti.

Erityiset säilytysolosuhteet


Säilytä pohjalevy vaakasuorassa.

Suojattava suoralta auringonvalolta.


Valmistelu

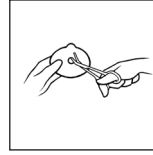


Leikkaa pohjalevyyn täsmälleen avanteen muotoinen ja kokoinen aukko pienillä, kaarevilla saksilla pohjalevyn leikkuuohjainta noudattaen. Voit käyttää laatikossa olevaa avannemittaa avanteen koon ja muodon mittaamiseen. Ohivuotojen ja iho-ongelmien minimoimiseksi on tärkeää, että aukko sopii tarkalleen avanteen ympärille.

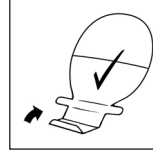


Aseta pussi tasaiselle alustalle liitospuoli alaspäin. Sulje tyhjennysosa taittamalla alhaalta ylöspäin kolme kertaa niin, että Velcro®-tarranauha tulee näkyviin.

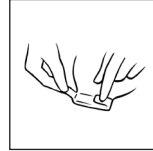

Taita turkoosit tarraläpät Velcro®-tarranauhan päälle ja sulje tyhjennysosa kiinnittämällä läpät tarranauhaan.

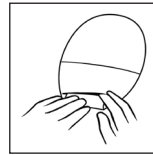

Tyhjennysosa voidaan nyt piilottaa heti sen yläpuolella tai pussin keskiosassa olevaan taskuun. Taskuissa on tarrapisteet, joihin tyhjennysosa kiinnitetään.

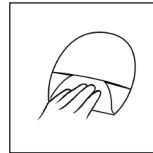


(Tämä ei kuitenkaan koske kirkkaita pusseja, joiden keskellä ei ole Velcro®-tarrapistettä).




Puhdista avanne ja sitä ympäröivä ihoalue huolellisesti. Ihon on oltava aivan puhdas ja kuiva ennen pohjalevyn asettamista.

Käyttö

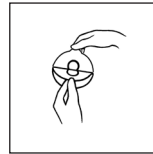


Irrota suojakalvo pohjalevystä.

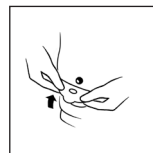


Sovita pohjalevy avanteen ympärille ja painele pohjalevyä, jotta se kiinnittyy kunnolla ja muotoutuu täydellisesti ihoon avanteen ympärillä.

Pohjalevyn täytyy sopia mukavasti avanteen ympärille. Ohivuotojen ehkäisemiseksi on tärkeää varmistaa, että pohjalevy istuu tiiviisti avanteen ympärillä. Silitä sormin tai painele kevyesti pohjalevy ihoon kiinni aloittaen avanteen juuresta. Kuljeta sormia avanteen ympäri ja varmista siten, että pohjalevy on tarttunut hyvin ihoon joka puolelta. Silitä pohjalevyä avanteen juuresta ulkoreunoja kohti ja varmista, että pohjalevy on hyvin kiinni ihossa.

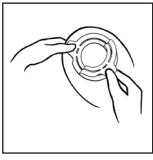

Varmista, että pohjalevy on kuiva ja puhdas. (Käytä pohjalevyn puhdistamiseen vain vettä). Poista suojapaperi pussin tarrarenkaasta. Vältä pussin vaahtomaisen tarrarenkaan vetämistä tai venyttämistä.

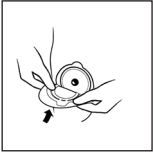


Aseta pussin tarrarenkaan alaosa pohjalevyn alaosan ulkoreunassa olevalle turkoosille merkkiviivalle.



Paina sormillasi pussia ja pohjalevyä kevyesti pussin alaosasta alkaen ja aseta tarrarengas paikoilleen pohjalevyn ylöspäin suuntautuvalla liikkeellä. Pussin voi irrottaa ja kiinnittää uudestaan kerran heti sen asettamisen jälkeen. Varmista pussia siirtäessäsi, että pohjalevyn laippa on puhdas. Muista sulkea ulostuloaukko ennen käyttöä.

Pussin tyhjentäminen

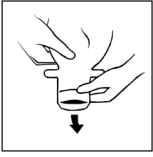

Avaa tyhjennysosa ja tyhjennä pussi tarpeen mukaan WC-pönttöön.




Puhdista tyhjennysosa esim. WC-paperilla. Taita ja kiinnitä tyhjennysosa uudelleen pussin tyhjentämisen jälkeen.

Poistaminen



Paina pohjalevyn laippaa kevyesti toisella kädellä ja irrota pussi toisella kädellä turkoosista läpistä vetämällä. Tee tämä hitaasti, jotta pussi irtoaa helposti.

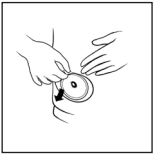

Irrota pohjalevy varovasti vetämällä pohjalevyn irrotuskorvakkeesta vatsasta pois päin ja vedä pohjalevyä hitaasti alaspäin. Paina ihoa kevyesti vapaalla kädelläsi irrottamisen helpottamiseksi.

Hävittäminen

Tuote on kertakäyttöinen, ja sen voi hävittää normaalin talousjätteen mukana.

Älä huuhtele tuotetta alas WC:stä.

Suodatintarra



Kiinnitä tarvittaessa yksi suodatintarroista suodattimen päälle estämään kaasun pääsyä ulos pussista.

Vyö



Säädä vyön pituus kehoosi sopivaksi nauhoista vetämällä. Solkea peittävä kangasta ei tarvitse poistaa. Kiinnitä neljä vyökoukkuja neljään vyökorvakkeeseen, jotka ovat pohjalevyn molemmin puolin. Aloita edestä ja painele kevyesti vatsaa kohden. Vedä sen jälkeen vyökoukkuja pois päin kiinnikkeestä, kunnes ne napsahtavat paikoilleen.

(Koskee vain tuotteita, joissa on vyökorvakkeet).

Vaaratilanteista ilmoittaminen

Jos tämän laitteen käytön aikana tai sen käytön seurauksena esiintyy vakava tapahtuma, siitä on ilmoitettava valmistajalle ja kansallisille viranomaisille.

Symbolien merkitykset



Lääketieteellinen ja kirurginen laite



Osoittaa, että tuote noudattaa Euroopan lääketieteellisiä ja kirurgisia laitteita koskevaa lainsäädäntöä



Luettelonumero



Viimeinen käyttöpäivä (VVVV-KK-PP)



Eräkoodi



Valmistuspäivämäärä (VVVV-KK-PP)



Valmistaja



Lue käyttöohje



Ei saa käyttää uudelleen



Osoittaa, että viivakoodi sisältää laitteen yksilöidyn tunnisteen



(Global Trade Item Number) Kauppanimikkeen maailmanlaajuinen yksilöity numero



Suojattava suoralta auringonvalolta



Tämä puoli ylöspäin



Kierrätettävä pakkausmateriaali



Turvallinen MRI-laitteen kanssa