

产品名称:造口袋
开口袋

型号: 05875, 05885, 05975,
05985, 02115



Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

说明书版本编号:23324537
Coloplast徽标是Coloplast A/S的注册商标。版权所有。©
说明书修订日期:2020-09-14

备案号/产品技术要求编号: 国械备20181571号
备案人名称/生产企业名称: 康乐保公司 Coloplast A/S
备案人住所/生产企业住所: Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark
备案人联系方式/生产企业联系方式: +45 4911 1111
生产地址: Coloplast Hungary KFT, Búzavirág út 15, 2800 Tatabánya, Hungary
代理人名称/售后服务单位: 康乐保(中国)医疗用品有限公司
代理人住所: 北京市朝阳区丽都花园路5号院1号楼13层1301-1306单元
代理人联系方式:
电话: 010-5920 1888
传真: 010-5920 1898
康乐保客户服务热线
热线电话: 400 700 7668
网址: www.coloplast.com.cn
生产日期和使用期限: 见包装标签
产品有效期: 三年
原产地: 匈牙利

结构及组成

本产品属一件式造口护理用品,包括开口袋、闭口袋和尿路造口袋。其中开口袋由底盘、复合薄膜、无纺布和封口器组成;闭口袋由底盘、复合薄膜、无纺布和过滤片组成;尿路造口袋由底盘、复合薄膜、无纺布、排放阀和抗返流片组成。非灭菌产品,一次性使用。

适用范围/预期用途

本产品用于造口排泄物的收集。

产品描述

本产品为回肠、直肠、结肠造口和尿路造口的护理器械。产品接触完好皮肤。非无菌提供。

信息

康乐保公司对于不遵守本使用说明而造成的一切损伤和损失不负责任。

注意事项

在您使用凸面底盘之前请咨询专业医护人员。

禁忌症

暂无。

储存条件


水平放置,避免日晒。

警告


一次性产品重复使用可能对使用者造成潜在危害。再处理、清洗、消毒和/或灭菌可能损害产品性能,从而对使用者造成更多的人身伤害或感染风险。

使用说明

准备

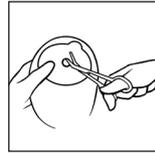


用弯剪根据底盘上的剪切线,在底盘中心剪孔,使之与造口的大小和形状完全匹配。
可以使用附赠的造口测量尺测量造口的大小和形状。
为了减少渗漏和皮肤问题,孔径和造口完全匹配是非常重要的。

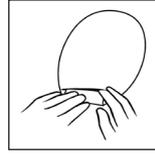


用于封口条封口

取一个封口条,去除保护纸。将黏胶面朝下放在开口处。如果封口条第一次未放置正确,请揭除,然后重新放置。向皮肤折叠4-5次,然后将封口条的末端折回。

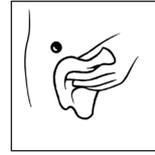


彻底清洁造口和周围皮肤,粘贴底盘前,确保皮肤完全干燥。

佩戴

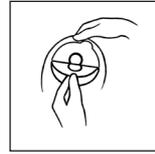

去除黏胶保护膜。

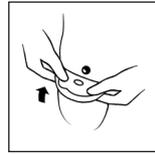


向后折叠黏胶,将黏胶沿造口周围对准,用力按压到皮肤上。黏胶必须紧密贴合于造口周围。为了防止渗漏,确保造口周围密封是很重要的。当按压腹部的底盘/造口袋时,先从造口周围开始,按压底盘黏胶,使其紧贴皮肤。用手指按压造口周围一圈,确保黏胶已紧密贴合。向下抚平黏胶,从造口向底盘边缘按压,保证黏胶与皮肤完全接触。




对造口袋施加压力以确保快速黏合,并让黏胶与造口周围的皮肤完美贴合。

如何清空袋子

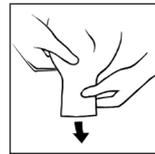

需要时打开排放口并将排泄物倒入马桶。

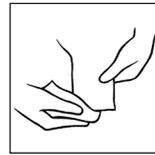

清洁排放口,例如用卫生纸。清空袋子后,折叠并重新固定排放口。

揭除



将黏胶上的揭除手柄从腹部上掀起,然后慢慢向下拉黏胶,轻轻揭除造口袋。
使用你的另一只手对皮肤轻微加压以帮助揭除。

处理

本产品为一次性使用产品,应根据当地规定(作为生活垃圾)处理。

不要丢弃在冲水马桶中。

滤片贴盖



如果需要,为了防止肠气泄漏,请将附带的滤片贴盖放置于滤膜上。

符号的解释



查阅使用说明



不得二次使用



使用期限



批次代码



生产日期



制造商



向上



怕晒