

SenSura[®] Mio

Coloplast

SenSura[®] Mio Convex

con  **BodyFit[®] Technology** y **FlexShell[™]**

Bolsa de ostomía abierto de una pieza

Cuidado de la ostomía

 Coloplast A/S
Høftedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Instrucciones de uso

23324892 Version 2

El logotipo de Coloplast es una marca registrada de Coloplast A/S. Todos los derechos reservados. © 2020-11-20

Velcro[®] es propiedad de Velcro Industries B.V.

Distribuidor:

Coloplast Corp.
1601 W. River Rd. N.
Minneapolis, MN 55411 USA
(800) 533-0464
www.coloplast.us

Indicaciones

La bolsa de ostomía está prevista para recolectar el contenido que sale de un estoma. La placa adhesiva está prevista para sujetar la bolsa y adherirse a la piel intacta alrededor del estoma.

Advertencias

No se recomienda la reutilización de este producto de un solo uso, ya que puede producirse contaminación cruzada.

El reprocesamiento, lavado, desinfección y/o (re)esterilización del producto pueden afectar sus características, generando un riesgo adicional de daño físico o infección al usuario.

Precauciones

Para un uso apropiado, consulte a su profesional de la salud antes de comenzar a usar un producto convexo.

Información

Bolsa de ostomía para un solo uso.

Los productos deben almacenarse en la caja hasta que sean retirados para su uso, ya que la caja protege los productos y la etiqueta de la caja contiene información importante, como el código de lote, la fecha de caducidad y un código de barras único.

No es necesario retirar el dispositivo antes de un escaneo por RM, ya que es seguro para RM.

Coloplast no se hace responsable de ninguna lesión o pérdida que pueda surgir por el uso de este producto sin seguir las recomendaciones actuales de Coloplast.


Condiciones especiales de almacenamiento

Almacene el producto en posición horizontal.

Manténgase protegido de los rayos del sol.


Modo de empleo

Preparación

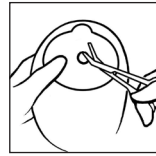


Corte un orificio en la placa adhesiva con un par de tijeras curvas pequeñas para que se ajuste exactamente al tamaño y forma del estoma, según la guía de corte de la placa adhesiva.


Puede usar la guía de medición de estoma incluida para medir el tamaño y la forma del estoma. Es importante que el tamaño entre el agujero y el estoma sea exacto para reducir el riesgo de fuga y problemas en la piel.

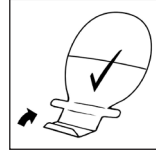


Coloque la bolsa en una superficie plana con la placa adhesiva hacia abajo. Cierre la salida doblando la parte inferior de la salida tres veces hacia arriba hasta que la tira de Velcro[®] quede visible.

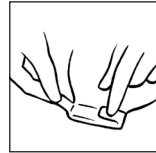


Doble las pestañas de color turquesa hacia dentro para fijar el Velcro[®].

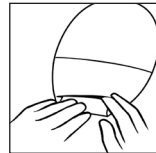

La salida puede ser escondida por medio de un punto de Velcro[®] inmediatamente encima de la salida o por medio de una tira de Velcro[®] en medio de la bolsa.

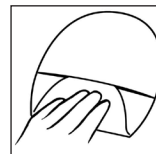

(Esto no se aplica a las bolsas transparentes pues no tienen puntos de Velcro[®] en el medio de la bolsa).

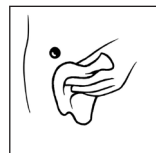


Limpie cuidadosamente el estoma y el área de piel alrededor con agua y un paño. La piel debe estar completamente seca antes de la aplicación de la placa adhesiva. No aplique humectantes en la piel ni otros productos para el cuidado de la piel, ya que esto afectará la adherencia de la placa adhesiva a la piel.

Aplicación



Despegue la película protectora de la barrera.

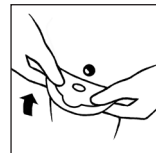


Alinee la placa adhesiva alrededor del estoma y presiónela con firmeza contra la piel. La barrera debe quedar ceñida alrededor del estoma. Para evitar fugas, es importante asegurar que quede bien sellada alrededor del estoma. Al aplicar presión a la barrera y a la bolsa sobre el abdomen, comience por el área alrededor del estoma y presione la barrera sobre la piel. Pase un dedo por todo el recorrido alrededor del estoma para asegurarse de que la barrera esté bien sellada sobre la piel. Alise el adhesivo presionando hacia abajo, comenzando desde el estoma y desplazándose hacia afuera hasta los bordes, para asegurarse de que el adhesivo logre un contacto total con la piel.



Aplique presión sobre la bolsa para garantizar una adherencia rápida y un ajuste perfecto entre la placa adhesiva y la piel que rodea el estoma sosteniendo la bolsa y la placa contra el cuerpo durante 2-3 minutos.

Como vaciar la bolsa

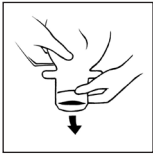


Abra la salida y vacíe la bolsa en el inodoro cuando sea necesario.



Limpie la salida por ejemplo con papel higiénico. Doble y vuelva a fijar la salida después que haya vaciado la bolsa.

Retirada

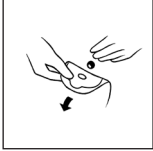

Con suavidad, retire la bolsa tirando de la oreja de remoción en la placa adhesiva hacia afuera del abdomen y enrollando la barrera adhesiva lentamente hacia abajo. Aplique una leve presión sobre la piel con su mano libre para ayudar a extraer la bolsa.

Eliminación

El producto está diseñado para un solo uso y debe eliminarse según la reglamentación local (por ejemplo, junto con los residuos domésticos comunes).


No tire el producto por el inodoro.

Pegatina de filtro



Si es necesario, para evitar el escape de gas, coloque sobre el filtro uno de los adhesivos para filtro incluidos.

Cinturón

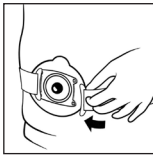

Ajuste la longitud del cinturón tirando de las correas para que se adapte al cuerpo. No hay necesidad de quitar la tela que cubre la hebilla. Conecte cada uno de los cuatro ganchos del cinturón a cada una de las cuatro lengüetas del cinturón que se encuentran a ambos lados de la barrera. Comience desde el frente y aplique una leve presión hacia el estómago.

(Solo se aplica a productos con lengüetas para cinturón).

Informe de incidentes

Si durante el uso de este dispositivo, o como resultado de su uso, se ha producido un incidente grave, por favor informe al fabricante y a las autoridades nacionales de su país.

Explicación de los símbolos



Dispositivo médico



Número de catálogo



Fecha de caducidad (AAAA-MM-DD)



Código de lote



Fecha de fabricación (AAAA-MM-DD)



Fabricante



Consulte las instrucciones de uso



No reutilizar



Indica que un código de barras contiene Identificación Única de dispositivo



(Global Trade Item Number) Número mundial de artículo comercial



Mantener protegido de la luz del sol



En esta dirección hacia arriba



Envase reciclable



Seguro para RM