

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Stomaversorgung ist dafür bestimmt, Ausscheidungen aus einem Stoma passiv aufzunehmen. Die Hautschutz-Basisplatte wird an der Stomaversorgung befestigt und ist dafür bestimmt, an der intakten Haut rund um das Stoma zu haften.

Indikationen

Das Produkt ist für Menschen mit einem Stoma indiziert.

Warnhinweise

Die Wiederverwendung dieses Einmalproduktes kann ein potenzielles Risiko für den Anwender darstellen.

Wiederaufbereitung, Reinigung, Desinfektion, und/oder Sterilisation können die Produktmerkmale beeinträchtigen und somit ein zusätzliches Risiko einer körperlichen Schädigung oder Infektion des Anwenders darstellen.

Information

Stomaversorgung zum Einmalgebrauch.

Die Produkte sind bis zur Entnahme zur Verwendung im Karton aufzubewahren, da der Karton die Produkte schützt und das Kartonetikett wichtige Informationen wie Chargennummer, Verfallsdatum sowie einen eindeutigen Strichcode enthält.

Das Produkt muss vor einer MRT-Untersuchung nicht abgenommen werden, da es MR-sicher ist.

Coloplast schließt jede Haftung für Verletzungen oder Schäden aus, die aus einer anderen als der den aktuellen Empfehlungen von Coloplast entsprechenden Verwendung dieses Produkts entstehen.

Besondere Bedingungen für die Aufbewahrung

Lagern Sie das Produkt in horizontaler Position.

Vor Sonnenlicht schützen.


Meldung von Vorfällen

Falls es während der bzw. durch die Anwendung dieses Produkts zu einem mutmaßlich schwerwiegenden Vorkommnis gekommen ist, melden Sie dieses bitte dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde.

Anwendung

Vorbereitung

1

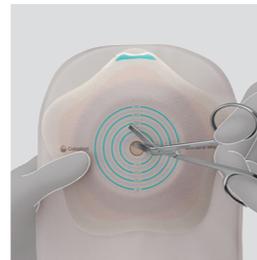

Markieren Sie die Größe und die Form des Stomas auf der Stomaschablone mit einem Stift.


Anschließend eine Öffnung in Größe und Form des Stomas ausschneiden. Zum Ausschneiden empfiehlt sich eine gebogene Schere.

Die Form Ihres Stomas kann sich durch Bewegungen verändern, wir empfehlen daher, dass Stoma zu vermessen, wenn es am größten ist. Dies ist häufig der Fall, wenn Sie sitzen.

Um Undichtigkeiten und Hautprobleme zu vermeiden, muss die Öffnung in der Haftfläche exakt um das Stoma herum abschließen.


Das Stoma und die stomaumgebende Haut gründlich reinigen. Vor dem Anbringen des Hautschutzes muss die Haut vollständig trocken sein.

2

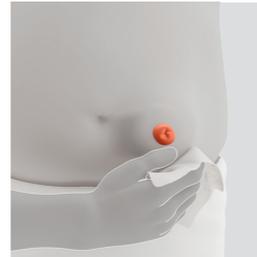


Anwendung

3

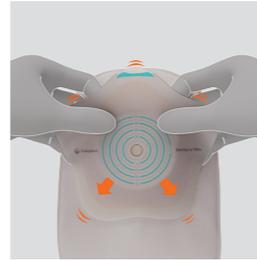


Drücken Sie zentral in den ausschneidbaren Bereich und stülpen die fünf Flügel der Hautschutzplatte um, so dass sie vom Beutel weg zeigen.

4

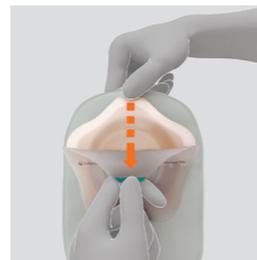

Die Schutzfolie vom Hautschutz abziehen.

5

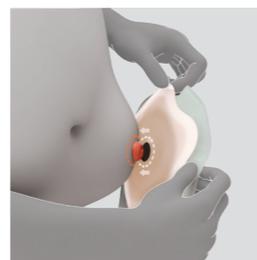

Halten Sie den Hautschutz mit den wieder zurück gestülpten Flügeln vor das Stoma. Richten Sie den Hautschutz rund um das Stoma aus.

Drücken ihn sorgfältig an die Haut.


Der Hautschutz muss rund um das Stoma eng anliegen.

6



Klappen Sie die fünf Flügel an die Haut an. Streichen Sie den Hautschutz kräftig vom Zentrum nach außen an die Haut.

7

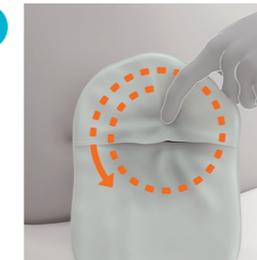


Ertasten Sie von der Vorderseite den Stabilitätsring, der in die Hautschutzplatte eingebracht ist. Streichen Sie zirkulär den Hautschutz zwischen Stabilitätsring und Öffnung fest an die Haut.

8



Drücken Sie alle fünf Flügel sowie den äußeren Rand des Hautschutzes von innen nach außen an die Haut.

Filterabdeckung

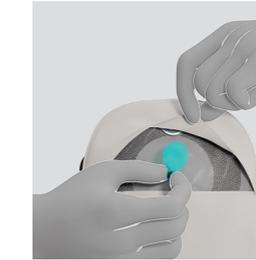

Für eine Verhinderung der Gasentweichung können die mitgelieferten Filterabdeckungen vorübergehend auf dem Filter platziert werden. Bitte beachten Sie, dass sich der Beutel bei abgeklebtem Filter aufbläht. Aus diesem Grund sollte der Filter nur kurzzeitig abgedeckt werden.




Die Gebrauchsanweisung steht auch als Animation zur Verfügung


Um die Animation anzusehen, können Sie entweder den QR-Code scannen oder auf den folgenden Link in Ihren Browser eingeben:

www.coloplast.de/konkav2

Produktmerkmale

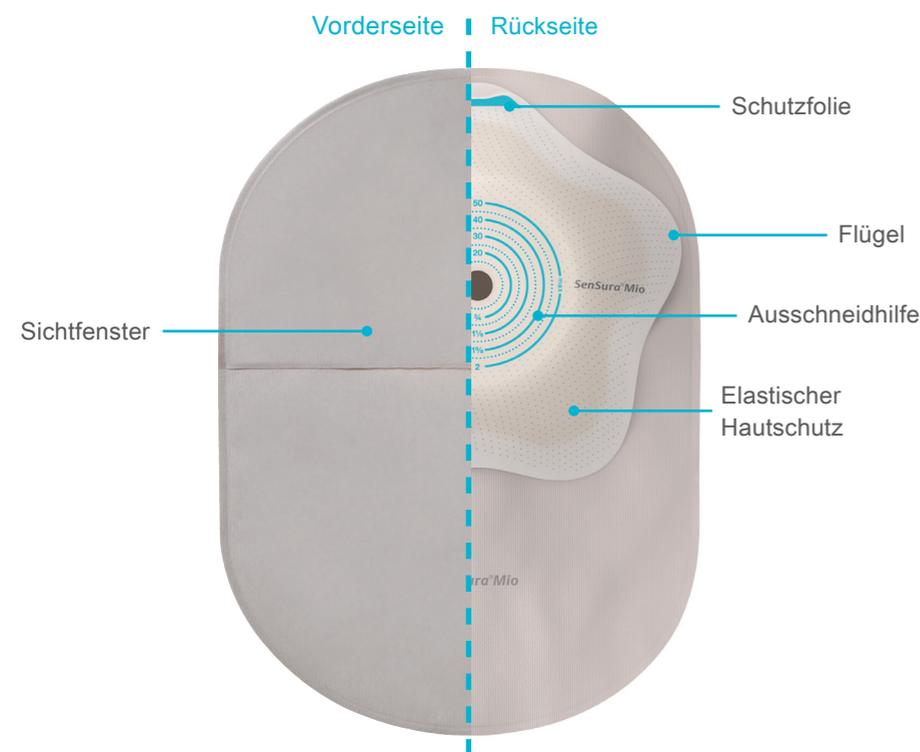

Entfernung

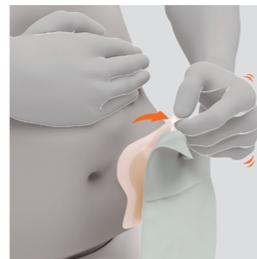

Die Abziehlasche des Hautschutzes mit zwei Fingern festhalten und den Beutel sanft von der Haut abrollen.

Gleichzeitig mit der freien Hand die Haut gespannt halten und etwas Gegendruck auf die Stoma umgebende Haut ausüben.

Entsorgung

Das Produkt ist nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen und sollte im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Das Produkt nicht in der Toilette entsorgen.

Häufig gestellte Fragen

- Der Hautschutz haftet nicht richtig auf der Haut**

Befolgen Sie die Angaben in dieser Gebrauchsanweisung bezüglich der Anwendung des Produktes und stellen Sie sicher, dass die Haut vor dem Anbringen der Versorgung sauber und trocken ist. Es ist wichtig, dass der Hautschutz größtmöglichen Kontakt zur Haut, auch in Hautfalten, hat. Beim Anbringen der Versorgung ist sanfter Druck notwendig, um eine ausreichende Haftung zu erzielen.
- Die Haut unter der Hautschutzplatte ist rot und/oder gereizt**

Hautreizungen können unterschiedliche Ursachen haben. Sie können durch Leckagen entstehen, die ihrerseits durch die Auswahl des Produktes oder nicht passend zugeschnittener Öffnungen der Hautschutzplatte verursacht werden. Sie können aber ebenso durch eine unzureichende Reinigung der Haut oder durch unsanftes Entfernen des Hautschutzes entstehen. Bei geröteter Haut kann der Einsatz eines Pflasterentferners empfehlenswert sein. Bei wiederkehrenden Hautreaktionen nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrer Stomafachkraft oder Ihrem Arzt auf.
- Leckagen unter dem Hautschutz**

Leckagen können unterschiedliche Ursachen haben. Sie können durch eine Veränderung der Körperform oder der Form und Höhe des Stomas oder durch ein fehlerhaftes Anbringen der Versorgung verursacht werden. Ihr aktuelles Körperprofil können Sie über unseren Online-Selbsthilfetest unter www.meinstomabauchcheck.coloplast.de überprüfen. Sollte sich hier eine Veränderung ergeben haben, kann eine andere Versorgungsart oder zusätzliches Zubehör vorteilhaft sein. Bitte nehmen Sie diesbezüglich Kontakt zu Ihrer Stomafachkraft auf.

Symbolerklärung

- MD** Medizinprodukt
- CE** Einhaltung der europäischen Bestimmungen für Medizinprodukte
- REF** Katalognummer
- ⌚** Verfallsdatum (TT.MM.JJJJ)
- LOT** Chargennummer
- 🏭** Hersteller
- 📖** Gebrauchsanweisung befolgen
- ⊗** Nur für den einmaligen Gebrauch
- UDI** Zeigt den Barcode mit der einheitlichen Produktkennzeichnung für Medizinprodukte (Unique Device Identification, UDI) an
- GTIN** (Global Trade Item Number) Globale Artikelnummer
- ☀️** Vor Sonnenlicht schützen
- ↑↑** Hier oben
- ♻️** Recyclingfähige Verpackung
- MR** MR-sicher



Gebrauchsanweisung

23325235 Version 1

Das Coloplast-Logo ist eine eingetragene Marke der Coloplast A/S. Alle Rechte vorbehalten. © 2020-12-07



SenSura[®] Mio Concave

Concave Stomaversorgung

1-teiliger geschlossener Beutel



Gebrauchsanweisung