Destinazione d'uso

La sacca per stomia è concepita per raccogliere passivamente il materiale in uscita dallo stoma. La placca adesiva è fissata alla sacca per stomia ed è concepita per aderire alla cute peristomale integra.

Indicazioni

Il dispositivo è indicato per le persone stomizzate.

Il riutilizzo di questo prodotto monouso può essere potenzialmente dannoso per l'utente.

Trattamento, lavaggio, disinfezione e/o sterilizzazione possono compromettere le caratteristiche del prodotto, determinando un ulteriore rischio di danno fisico o infezione per

Informazioni

Sacca per stomia monouso

Per una corretta conservazione, il prodotto deve essere conservato nell'apposita confezione fino al momento di utilizzo poiché l'etichetta sulla confezione contiene informazioni importanti, come il numero di lotto, data di scadenza e codice univoco a barre.

Il dispositivo è compatibile con la risonanza magnetica (RM), quindi non è necessario rimuoverlo prima.

Coloplast non si assume alcuna responsabilità per lesioni o perdite che possono verificarsi se il prodotto venisse usato in modo non conforme alle raccomandazioni vigenti di Coloplast.

Condizioni di conservazione speciali

Conservare il prodotto in posizione orizzontale.


Conservare Iontano dai raggi solari.

Segnalazione di incidenti

Se durante, o a seguito dell'utilizzo di questo prodotto si verifica un incidente grave, si prega di segnalarlo al produttore e all'autorità nazionale competente.

Come utilizzare il prodotto

Preparazione

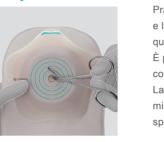

Praticare un foro nell'adesivo usando un paio di forbici curve e la guida di taglio presente sull'adesivo in modo tale che questo si adatti alla forma e alla dimensione dello stoma. È possibile misurare la dimensione e la forma dello stoma con la guida apposita fornita in dotazione.

La forma dello stoma può cambiare, quindi è consigliabile misurarlo quando ha la dimensione massima. Ciò accade spesso guando si è seduti.

Per ridurre il rischio di perdite e di problemi cutanei è molto importante che il foro corrisponda perfettamente allo stoma.



Pulire con cura lo stoma e la cute circostante. La cute deve essere completamente asciutta prima di procedere all'applicazione dell'adesivo.

Applicazione




Rovesciare tutti e 5 i petali come per volerli allontanare dalla sacca. Questo per preparare l'adesivo per l'applicazione.



Esercitare una decisa pressione sulla cute partendo dal centro dell'adesivo e procedendo verso l'esterno.



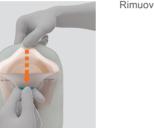

Rimuovere la pellicola protettiva dall'adesivo.






Afferrare l'adesivo in modo che i petali siano ripiegati verso la sacca. Allineare la parte centrale dell'adesivo attorno allo

Premere con cautela la parte centrale sulla cute.

Quindi rovesciare i petali, disponendoli sull'area esterna allo



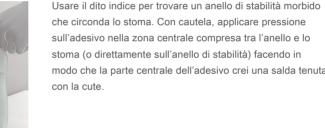

che circonda lo stoma. Con cautela, applicare pressione sull'adesivo nella zona centrale compresa tra l'anello e lo stoma (o direttamente sull'anello di stabilità) facendo in modo che la parte centrale dell'adesivo crei una salda tenuta con la cute.





Applicare pressione dal centro dell'adesivo verso l'esterno in più direzioni per garantire un'aderenza sicura tra l'adesivo e la cute attorno allo stoma.

Etichetta per il filtro



Se si desidera impedire temporaneamente la fuoriuscita di gas dalla sacca, chiudere il filtro collocandovi sopra uno degli adesivi turchesi del filtro in dotazione in ogni scatola. La chiusura del filtro per periodi prolungati provoca il gonfiaggio della sacca e pertanto deve essere eseguita solo per un breve periodo di tempo.




Istruzioni per l'uso disponibili anche mediante

Per visualizzare il video formativo, effettuare la scansione del codice QR o

http://www.coloplast.it/usoflip/colo

Caratteristiche del prodotto

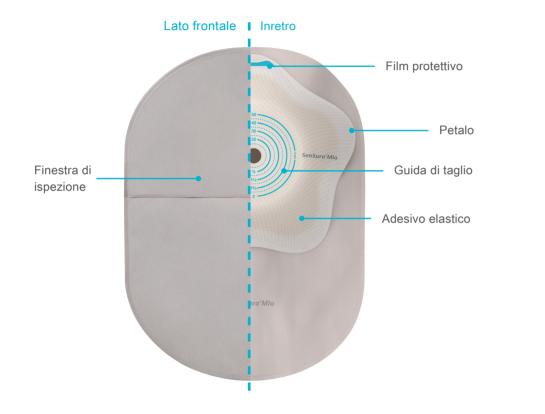

Rimozione



Rimuovere delicatamente la sacca utilizzando l'aletta di rimozione dell'adesivo e arrotolare lentamente l'adesivo verso il basso.

Applicare una leggera pressione sulla cute con la mano libera per agevolare la rimozione.

Smaltimento

Il prodotto è esclusivamente monouso e deve essere smaltito secondo le linee guida locali, ad esempio tra i rifiuti domestici non riciclabili.

Non gettare il prodotto nei sanitari.

Risoluzione di problemi ricorrenti



L'adesivo non aderisce correttamente alla cute

Accertarsi di seguire le istruzioni relative all'applicazione riportate in questo foglietto illustrativo e che la cute sia completamente pulita e asciutta prima dell'applicazione. È importante che vi sia un contatto completo fra l'adesivo e ogni piega della cute. Esercitare pressione sull'adesivo durante l'applicazione per assicurare una sufficiente aderenza.



La cute è arrossata e/o irritata sotto la placca adesiva

La cute irritata può avere molte cause. Può essere causata da una perdita per il non uso corretto del dispositivo o per la dimensione sbagliata del foro. Può anche essere causata dalla pulizia insufficiente o dalla rapida rimozione dell'adesivo, che può causare sollecitazioni della cute. Se la cute è rossa, potrebbe essere utile utilizzare un dispositivo di rimozione dell'adesivo. Parlare appena possibile del problema con lo stomaterapista o l'infermiere di riferimento.



Perdite sotto l'adesivo

La perdita può avere molte cause. Può essere causata dal corpo o dallo stoma che cambia forma o altezza oppure da un'applicazione incorretta dell'adesivo. Prendere in considerazione l'autovalutazione BodyCheck online presso www.bodycheck.coloplast.com per controllare se il proprio profilo corporeo è cambiato. In tal caso, potrebbe essere necessario un dispositivo diverso o potrebbe essere utile l'impiego di un prodotto di supporto. È importante parlare del problema al più presto possibile con lo stomaterapista o l'infermiere di riferimento.

Spiegazione dei simboli

norme europee relative ai dispositivi

Data di scadenza (AAAA-MM-GG)

Indica che il prodotto è conforme alle



MD Dispositivo medico

REF Numero di catalogo





Non riutilizzare



Indica un codice a barre contenente



l'identificazione univoca del dispositivo (UDI)



(Global Trade Item Number) Identificatore di prodotto globale

Conservare in posizione verticale con le frecce rivolte verso l'alto

per uso commerciale



Conservare lontano dai raggi solari

Sicuro per la RM













LOT Lotto

Vedere le istruzioni per l'uso





Istruzioni per l'uso

23325236 Version 1

Il logo Coloplast è un marchio registrato di proprietà di Coloplast A/S.© Tutti i diritti sono riservati. 2020-12-14



SenSura[®]**Mio** Convex Flip



Istruzioni per l'uso