


SenSura[®] Mio Concave

Concave Click pohjalevy

2-osainen click pohjalevy

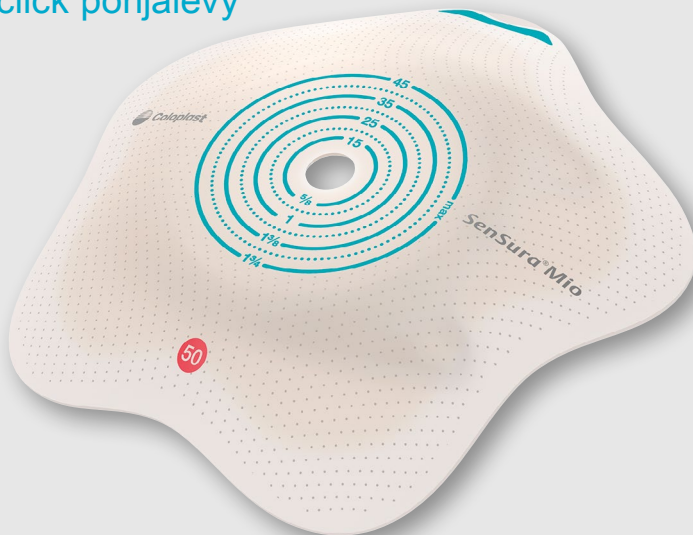

Käyttöohje

Käyttötarkoitus

Avanpussi on tarkoitettu avanteesta tulevan eritteen keräämiseen. Avanpussiin on liitetty tarttuva pohjalevy, joka on tarkoitettu kiinnittymään avanteen ympärillä olevaan ehjään ihoon.

Indikaatio

Laite on tarkoitettu ihmisille, joilla on avanne.

Varoitus

Tämän kertakäyttöisen tuotteen uudelleenkäyttöä ei suositella, se voi aiheuttaa ristikontaminaation.

Uudelleenkäyttö, puhdistus, desinfiointi ja/tai (uudelleen)sterilointi voivat heikentää tuotteen ominaisuuksia, mikä taas muodostaa ylimääräisen fyysisen haitan tai infektion vaaran potilaalle.

Tietoa

Kertakäyttöinen avanpohjalevy.

Tuotteet on tarkoitettu säilytettäväksi laatikossa, kunnes ne otetaan käyttöön, sillä laatikko suojaa tuotteita ja laatikon tarra sisältää tärkeitä tietoja, mm. eränumeron (LOT), viimeisen käyttöpäivän ja yksilöllisen viivakoodin.

Laitetta ei tarvitse poistaa ennen magneettikuvausta, sillä se ei aiheuta vaaraa magneettikuvauksessa.

Coloplast ei ota vastuuta loukkaantumisista tai vahingoista, joita voi sattua, jos tuotetta käytetään Coloplastin voimassa olevien suositusten vastaisesti.

Erityiset säilytysolosuhteet


Säilytä tuotetta vaakatasossa.

Suojattava suoralta auringonvalolta.

Vaaratilanteista ilmoittaminen

Jos tämän laitteen käytön aikana tai sen käytön seurauksena esiintyy vakava tapahtuma, siitä on ilmoitettava valmistajalle ja kansallisille viranomaisille.


Tuoteominaisuudet

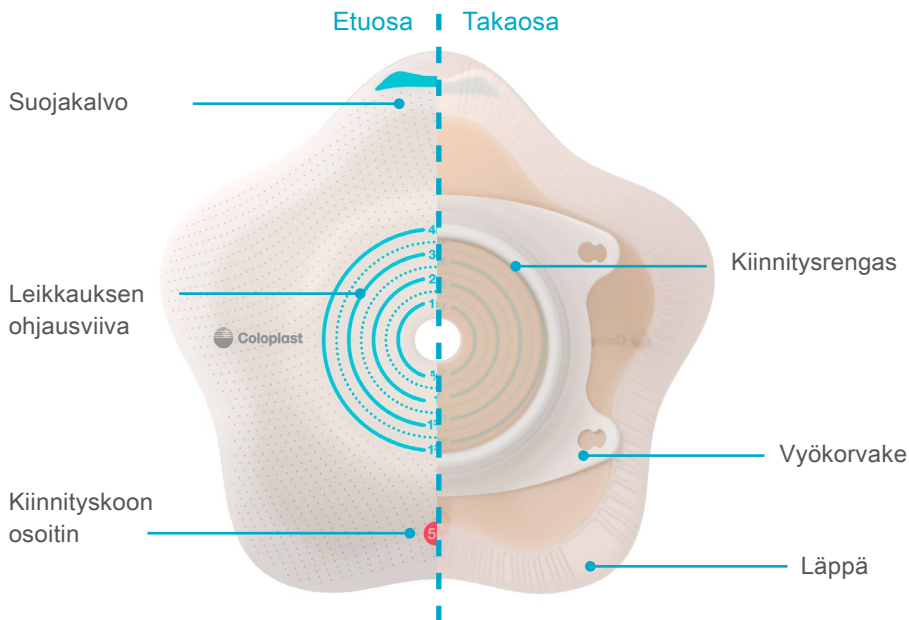

Käyttöohjeet

Valmistelu

1

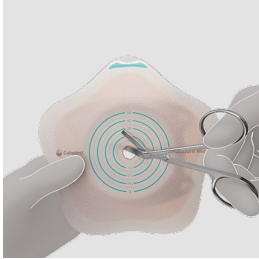


Leikkaa pohjalevyyn täsmälleen avanteen muotoinen ja kokoinen aukko pienillä, kaarevilla saksilla pohjalevyn leikkuuohjainta noudattaen.

Voit käyttää laatikossa olevaa avannemittaa avanteen koon ja muodon mittaamiseen.

Avanteen muoto voi muuttua, joten se on hyvä mitata, kun se on suurimmillaan. Näin on usein silloin, kun istut.

Ohivuotojen ja iho-ongelmien minimoimiseksi on tärkeää, että aukko sopii tarkalleen avanteen ympärille.


2

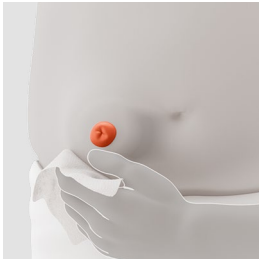

Puhdista avanne ja sitä ympäröivä ihoalue huolellisesti. Ihon on oltava aivan puhdas ja kuiva ennen pohjalevyn asettamista.


Käyttö

3

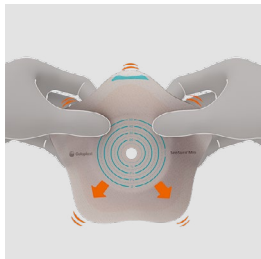


Valmistelee pohjalevy kiinnittämistä varten painamalla pohjalevyä keskiosastaan vastakkaiseen suuntaan.

4

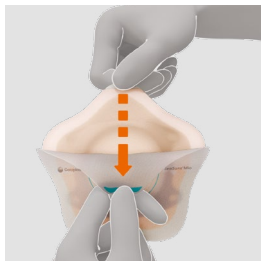

Irrota suojakalvo pohjalevystä.

5

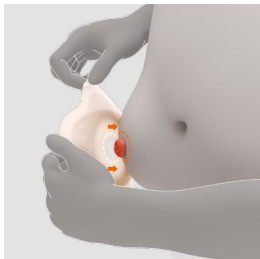

Ota pohjalevystä kiinni siten, että läpät ovat taaksepäin taitettuina.

Kohdista pohjalevyn keskiosa avanteen ympärille.

Paina keskiosa huolellisesti ihoa vasten.


Käännä sitten läpät avannetta ympäröivän alueen päälle.

6




Paina pohjalevy kunnolla ihoa vasten keskeltä ulospäin.

7

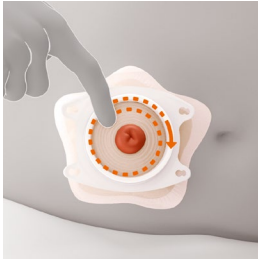


Aseta etusormi avannetta ympäröivän kiinnitysrenkaan sisälle. Paina pohjalevyä varovasti kiinnitysrenkaan ja avanteen välistä ja varmista, että pohjalevyn keskiosa on tiiviisti kiinni ihoa vasten.

8

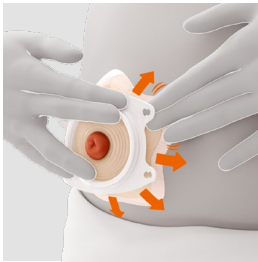

Paina pohjalevyn keskeltä ja siitä ulospäin eri suuntiin, jotta varmistat tiiviin kiinnittymisen pohjalevyn ja avannetta ympäröivän ihon välillä.

9

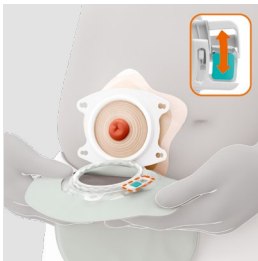

Varmista ennen pussin kiinnittämistä, että pohjalevy on puhdas. Tarkista, että lukitusrengas on auki.


Kohdista pussikiinnityksen alaosa pohjalevyn kiinnityksen alaosaan.

10




Liitä pussi ja pohjalevy alaosasta yhteen keskimmäisten sormien avulla.

11

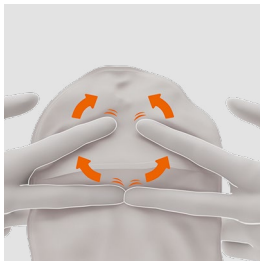

Vieritä etusormiasi ylöspäin ja paina kiinnityksen yläosaa kevyesti, **kunnes tunnet, että pussi on kunnolla kiinni pohjalevyssä.**

12

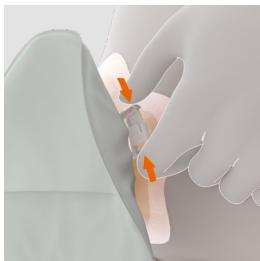


Sulje lukitusrengas painamalla lukko yhteen. Pussi on **pitävästi** kiinnitetty pohjalevyyn, kun kuulet napsahduksen.

Vedä pussia varovasti ja varmista, että se on kiinnitetty oikein.


Poistaminen

1

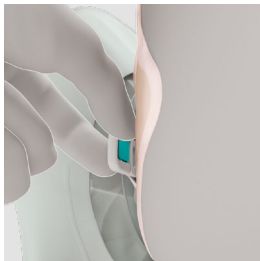


Avaa lukitusrengas painamalla sormenpäällä pientä vatsaan päin olevaa turkoosinväristä kielekettä.

2

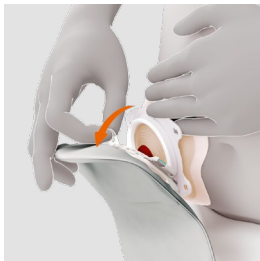

Pidä kiinni pussin poistokorvakkeesta ja poista **pussi vetämällä** pussi varovasti irti pohjalevystä.

3

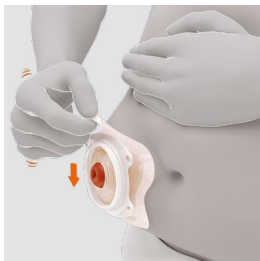

Irrota pohjalevy varovasti vetämällä pohjalevyn irrotuskorvaketta vatsasta poispäin ja rullaa pohjalevyä hitaasti alaspäin.

Paina ihoa kevyesti vapaalla kädelläsi irrottamisen helpottamiseksi.

Hävittäminen

Tuote on tarkoitettu vain kertakäyttöön, ja se on hävitettävä paikallisten ohjeiden mukaisesti esim. normaalin talousjätteen mukana.

Älä huuhtelee tuotetta alas WC:stä.

Lisätietoja pussista

Katso lisäohjeita pussin käyttämisestä pussien vähittäismyyntilaatikon mukana tulevasta käyttöohjeesta.



Käyttöohje on saatavana myös videolla

Voit katsoa ohjevideon skannaamalla QR-koodin tai menemällä verkko-osoitteeseen

<http://www.coloplast.fi/concave2osainen>

Toistuvien ongelmien selvittäminen



Pohjalevy ei tartu kunnolla ihoon

Noudata huolella tämän esitteen kiinnitysohjeita ja varmista, että iho on täysin puhdas ja kuiva ennen kiinnittämistä. On tärkeää, että pohjalevy on kunnolla kosketuksessa ihon jokaista poimua vasten. Paina pohjalevyä sitä kiinnittäessäsi, jotta varmistat riittävän kiinnittymisen.



Pohjalevyn alla oleva iho on punainen ja/tai ärtynyt

Ärtynyt iho voi johtua monista eri syistä. Se voi johtua ohivuodosta, joka aiheutuu väärän avannesidoksen tai virheellisen kokoisen leikkuuhjaimen käyttämisestä. Mutta se voi johtua myös riittämättömästä puhdistamisesta tai pohjalevyn nopeasta poistamisesta, joka voi rasittaa ihoa. Jos iho on punainen, pohjalevyn poistoaineesta voi olla apua. Keskustele ongelmasta avannehoitajan kanssa niin pian kuin mahdollista.



Ohivuoto pohjalevyn alla

Ohivuoto voi johtua monista eri syistä. Se voi johtua kehon tai avanteen muodon tai korkeuden muuttumisesta tai pohjalevyn virheellisestä kiinnittämisestä. BodyCheck-itsearviointiin (verkko-osoitteessa www.bodycheck.coloplast.com) avulla voit tarkistaa, onko avanneprofiilisi muuttunut. Jos näin on, sinun on ehkä käytettävä toista avannesidosta tai ottaa käyttöön jokin tukeva lisätuote. Keskustele ongelmasta avannehoitajan kanssa niin pian kuin mahdollista.

Symbolien merkitykset



Lääketieteellinen ja kirurginen laite



Osoittaa, että tuote noudattaa Euroopan lääketieteellisiä ja kirurgisia laitteita koskevaa lainsäädäntöä



Luettelonumero



Viimeinen käyttöpäivä (VVVV-KK-PP)



Eräkoodi



Valmistuspäivämäärä (VVVV-KK-PP)



Valmistaja



Lue käyttöohje



Ei saa käyttää uudelleen



Osoittaa, että viivakoodi sisältää laitteen yksilöidyn tunnisteiden



(Global Trade Item Number) Kauppanimikkeen maailmanlaajuinen yksilöity numero



Suojattava suoralta auringonvalolta



Tämä puoli ylöspäin



Kierrätettävä pakkausmateriaali



Turvallinen MRI-laitteen kanssa



Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Käyttöohje

23325251 Version 1

Coloplast-logo on Coloplast A/S -yhtiön rekisteröity tavaramerkki.

Kaikki oikeudet pidätetään. © 2020-12-02



Coloplast