


SenSura[®] Mio Concave

Concave basplatta för stomi

2 delar, klickbasplatta

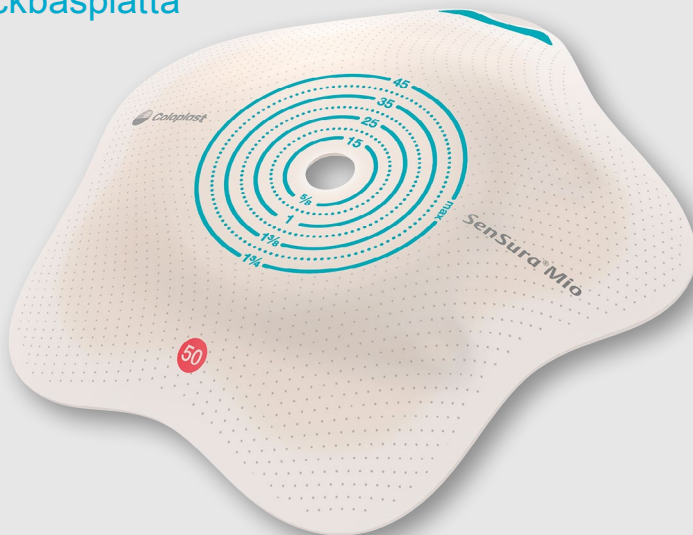

Bruksanvisning

Avsett ändamål

Stomipåsen är avsedd att passivt samla avföring från en stomi. Den häftande basplattan är fäst vid stomipåsen och är avsedd att fästas vid oskadad hud runt stomin.

Indikation

Denna enhet indikeras för personer med en stomi.

Varning

Återanvändning av engångsprodukten rekommenderas inte eftersom korskontaminering kan förekomma.

Upparbetning, tvättning, desinficering och/eller (om)sterilisering kan äventyra produktkarakteristiken och utsätta användaren för en ytterligare risk för fysisk skada eller infektion.

Information

Basplatta för stomi, engångsbruk.

Produkterna ska förvaras i lådan tills de tas ur för användning, eftersom lådan skyddar produkterna och etiketten på lådan innehåller viktig information, som Lot-nummer, utgångsdatum och en unik streckkod.

Produkten behöver inte tas bort före en MR-skanning eftersom den är MR-säker.

Coloplast antar inget ansvar för eventuella skador eller förluster som kan uppstå om produkten används på ett sätt som strider mot Coloplasts aktuella rekommendationer.

Speciella förvaringsförhållanden


Förvara produkten horisontellt.

Undvik direkt solljus.

Rapportering av händelser

Om en allvarlig händelse inträffar i samband med användning av produkten eller som ett resultat av dess användning, kontakta tillverkaren och din lokala myndighet.


Produktegenskaper

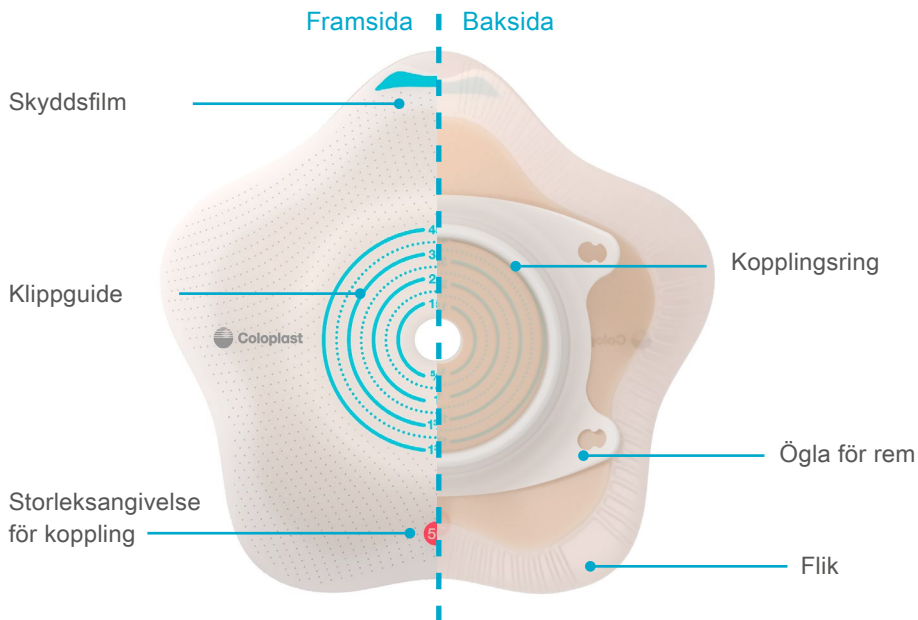

Hur man använder

Förberedelse

1

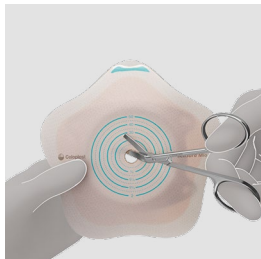


Använd en liten böjd sax och klippguiden på baksidan av häftan för att klippa ett hål i häftan med exakt samma storlek och form som stomin.

Du kan använda den medföljande stomiguiden för att mäta storleken och formen på stomin.

Stomins form kan ändras, så det rekommenderas att du mäter den när den är som störst. Det är den oftast när du sitter ned.

För att minska risken för läckage och hudproblem är det viktigt att hålet i häftan passar perfekt runt stomin.


2

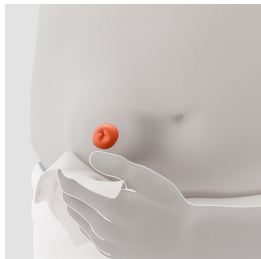

Rengör stomin och huden runt stomin omsorgsfullt. Huden måste vara helt torr innan du applicerar häftan.


Applicering

3

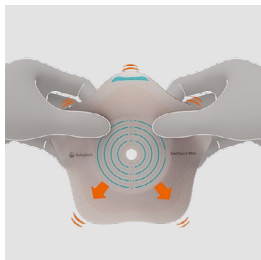


Vik alla fem flikar för att förbereda applicering av basplattan.

4

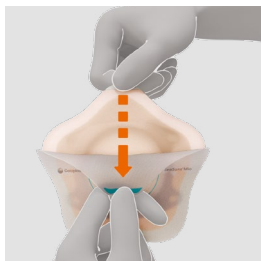

Ta bort skyddsfilm från basplattan.

5

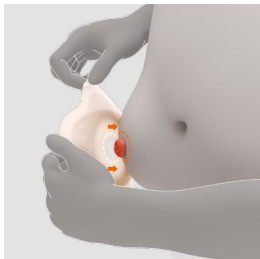

Håll basplattan med flikarna tillbakavikta.
Rikta in mittdelen av basplattan runt stomin.


Tryck försiktigt mittdelen på huden.
Vik sedan ned flikarna över området runt stomin.

6




Tryck fast basplattan ordentligt mot huden från mitten
och utåt.

7

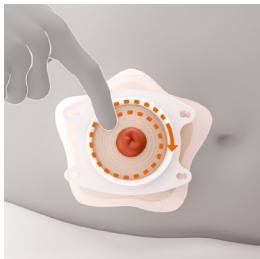


Placera pekfingret inuti kopplingsringen som omger stomin. Tryck försiktigt på basplattan mellan kopplingsringen och stomin för att säkerställa att basplattans mittdel sluter tätt mot huden.

8

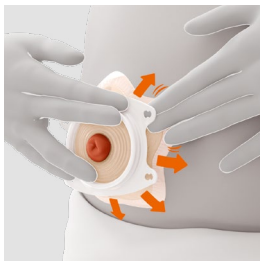

Tryck från mitten av basplattan och utåt i flera riktningar för att säkerställa att basplattan sitter ordentligt på huden runt stomin.


9

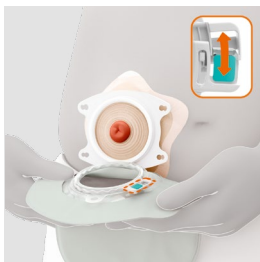

Se till att basplattan är ren innan du sätter fast påsen. Kontrollera att låsringen är öppen.


Passa in botten på påsens koppling med botten på basplattans koppling.

10

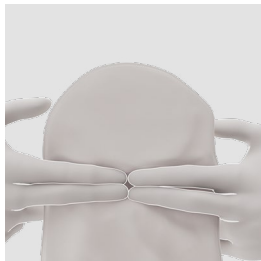


Anslut påsen och basplattan tillsammans nedifrån med långfingrarna.

11

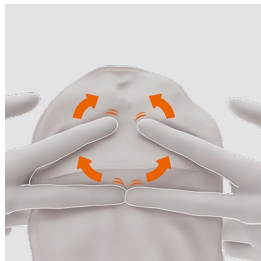

Rulla pekfingrarna uppåt och tryck försiktigt överst på kopplingen **tills du känner att påsen sitter fast ordentligt** på basplattan.

12

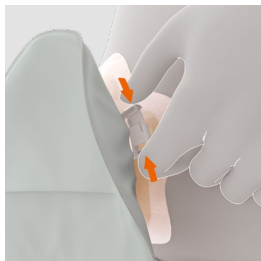


Stäng låsringen genom att trycka ihop låset. Påsen sitter säkert fast vid basplattan när du hör ett klick.

Dra försiktigt i påsen för att kontrollera att den sitter fast ordentligt.


Avlägsnande

1

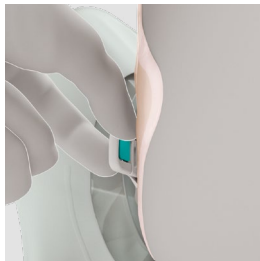


Tryck på den lilla turkosa fliken, som är riktad mot magen, med en fingerspets för att öppna låsringen.

2

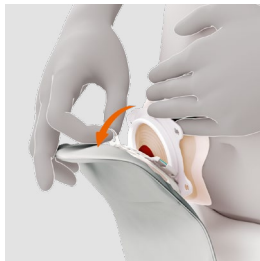

Håll i påsens bortagningsflik och ta bort påsen genom att **försiktigt dra bort** påsen från basplattan.

3

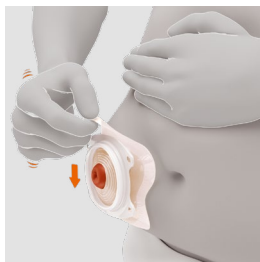

Avlägsna försiktigt basplattan genom att ta tag i bortagningsfliken och försiktigt dra plattan ut från magen och rulla den långsamt nedåt.

Håll emot på huden med den andra handen för att underlätta borttagningen.

Avfallshantering

Produkten är endast avsedd för engångsbruk och ska kastas i enlighet med lokala föreskrifter t.ex. med vanligt hushållsavfall.

Spola inte ner produkten i toaletten.

Mer information om påsen

Mer information om hur du använder påsen finns i bruksanvisningen som medföljer kartongen för påsarna.



En bruksanvisning finns även tillgänglig på video

För att se instruktionsvideon kan du antingen skanna QR-koden eller gå till

<http://www.coloplast.fi/concave2SE>

Hantera återkommande problem



Basplattan sitter inte fast ordentligt på huden

Se till att följa anvisningarna för applicering i detta produktblad, för att säkerställa att huden är helt ren och torr innan du försöker sätta fast basplattan. Det är viktigt att basplattan har fullständig kontakt med huden. Applicera tryck på basplattan när du sätter fast den, för att säkerställa att den fäster ordentligt.



Huden är röd och/eller irriterad under basplattan

Irriterad hud kan ha många orsaker. Det kan bero på läckage från att använda fel enhet eller tillklipningsmall av fel storlek. Det kan också bero på otillräcklig rengöring eller snabb borttagning av häftplåstret, vilket kan irritera huden. Om huden är röd kan ett klisterborttagningsmedel hjälpa. Berätta för din stomisjuksköterska om ditt problem så snart som möjligt.



Läckage under basplattan

Läckage kan ha många orsaker. Det kan vara ett resultat av att kroppen eller stomin ändrat form eller höjd eller på grund av att basplattan inte applicerats på rätt sätt. Överväg att göra självtestet BodyCheck online på www.bodycheck.coloplast.com, för att se om din kroppsprofil har ändrats. Om så är fallet kan du behöva en annan enhet eller eventuellt en stödprodukt. Berätta för din stomisjuksköterska om ditt problem så snart som möjligt.

Förklaring av symboler



Medicinteknisk produkt



Indikerar att produkten efterlever den europeiska lagstiftningen för medicintekniska produkter



Katalognummer



Använd före datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)



Lot-nummer



Tillverkningsdatum (ÅÅÅÅ-MM-DD)



Tillverkare



Ta del av bruksanvisningen



Endast för engångsbruk



Indikerar en streckkod som innehåller unik produktidentifiering



(Global Trade Item Number) Globalt artikelnummer



Skyddas från solljus



Denna sida uppåt



Återvinningsbar förpackning



MR-säker



Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Bruksanvisning

23325252 Version 1

Coloplasts logotyp är ett registrerat varumärke som tillhör

Coloplast A/S. Med ensamrätt. © 2020-12-02



Coloplast