

### Bestimmungsgemässe Verwendung

Die Stomaversorgung ist dafür bestimmt, Ausscheidungen aus einem Stoma passiv aufzunehmen. Die Hautschutz-Basisplatte wird an der Stomaversorgung befestigt und ist dafür bestimmt, an der intakten Haut rund um das Stoma zu haften.

### Indikationen

Das Produkt ist für Menschen mit einem Stoma indiziert.

### Warnhinweise

Eine Wiederverwendung dieses Produkts für den Einmalgebrauch wird aufgrund des Risikos von Kreuzkontamination nicht empfohlen.

Wiederaufbereitung, Reinigung, Desinfektion und/oder (Re-)Sterilisation können die Produkteigenschaften beeinträchtigen und für den Anwender ein zusätzliches Risiko für körperliche Schäden oder Infektion begründen.

### Information

Stoma-Basisplatte zum Einmalgebrauch.

Die Produkte sind bis zur Entnahme zur Verwendung im Karton aufzubewahren, da der Karton die Produkte schützt und das Kartonetikett wichtige Informationen wie Chargennummer, Verfallsdatum sowie einen eindeutigen Strichcode enthält.

Das Produkt muss vor einer MRT-Untersuchung nicht abgenommen werden, da es MR-sicher ist.

Coloplast schliesst jede Haftung für Verletzungen oder Schäden aus, die aus einer anderen als der den aktuellen Empfehlungen von Coloplast entsprechenden Verwendung dieses Produkts entstehen.

### Besondere Lagerungsbedingungen

Produkt horizontal lagern.


Vor direktem Sonnenlicht schützen.

### Meldung von Vorfällen

Falls es während der bzw. durch die Anwendung dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Vorfall gekommen ist, melden Sie diesen bitte dem Hersteller und der zuständigen Behörde in Ihrem Land.

## Anwendung Vorbereitung


1

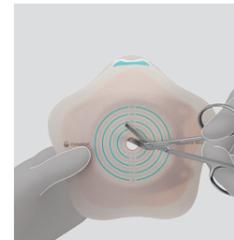

Ein Loch genau in der Grösse und Form des Stomas in den die Haftfläche schneiden, indem mit einer kleinen gebogenen Schere der Ausschneidehilfe auf dem Hautschutz entlang geschnitten wird.

Grösse und Form des Stomas können mit Hilfe der beiliegenden Stomamesshilfe ermittelt werden. Die Form Ihres Stomas kann sich verändern; daher empfehlen wir, das Stoma zu messen, wenn es am größten ist. Dies ist häufig der Fall, wenn Sie sitzen.

2

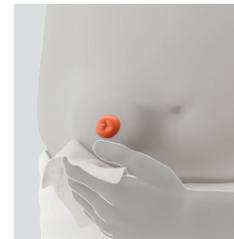

Ein passgenauer Sitz zwischen Loch und Stoma ist wichtig, um das Risiko von Leckagen und Hautirritationen gering zu halten.

Das Stoma und die umgebende Hautfläche gründlich reinigen. Die Haut muss vor dem Anbringen der Haftfläche vollständig trocken sein.


## Applikation

3



Drehen Sie alle 5 Seitenblätter um, um die Basisplatte für die Anwendung vorzubereiten.

4

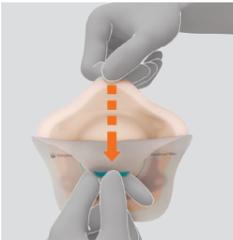

Entfernen Sie die Schutzfolie von der Basisplatte.

5



Halten Sie die Basisplatte mit nach hinten gefalteten Seitenblättern. Richten Sie die Mitte der Basisplatte um das Stoma herum aus.

6



Drücken Sie die Mitte vorsichtig auf die Haut. Falten Sie die Seitenblätter dann über die nach außen gewölbte Körperform.

Drücken Sie die Basisplatte von der Mitte nach außen gehend fest auf die Haut.

7




Platzieren Sie Ihren Zeigefinger in dem Kopplungsring, der Ihr Stoma umgibt. Üben Sie vorsichtig Druck auf die Basisplatte zwischen dem Kopplungsring und Ihrem Stoma aus, um sicherzustellen, dass der mittlere Teil der Basisplatte eine sichere Abdichtung mit der Haut aufweist.

8



Üben Sie von der Mitte der Basisplatte aus in diverse Richtungen nach außen Druck aus, um die sichere Adhäsion zwischen der Basisplatte und der das Stoma umgebenden Haut zu gewährleisten.


9

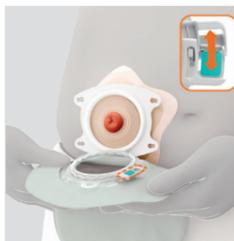


Vor dem Anbringen des Beutels sicherstellen, dass die Basisplatte sauber ist. Prüfen Sie, dass der Rastring offen ist.

Richten Sie die Unterseite der Beutelkopplung mit der Unterseite der Basisplattenkopplung aus.

## Produktmerkmale

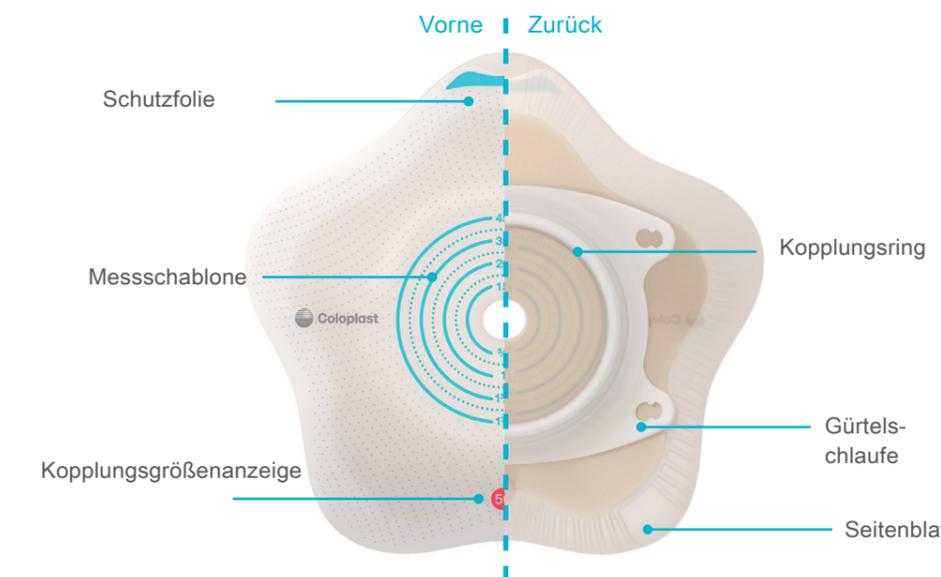


10

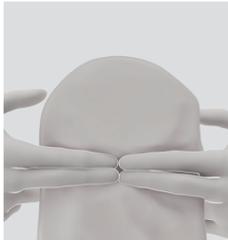

Verbinden Sie den Beutel und die Basisplatte von unten mit beiden Mittelfingern.

11

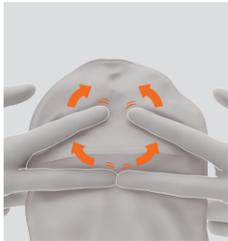

Schieben Sie Ihre Zeigefinger nach oben und üben Sie leichten Druck auf die Oberseite der Kopplung aus, **bis Sie fühlen, dass der Beutel sicher** an der Basisplatte befestigt ist.

12



Schließen Sie den Rastring, indem Sie den Verschluss zusammendrücken. Ein „Klicken“ bestätigt, dass der Beutel sicher an der Basisplatte befestigt ist.

Ziehen Sie sanft am Beutel, um sicherzustellen, dass dieser vorschriftsgemäß befestigt ist.

## Entfernung

1



Mit der Fingerspitze auf die Ihrem Bauch zugewandte kleine türkise Lasche drücken, um den Rastring zu öffnen.

2



Halten Sie die Abziehlasche fest und nehmen Sie den Beutel ab, **indem Sie den Beutel** vorsichtig von der Basisplatte abziehen.

3



Die Basisplatte vorsichtig entfernen, indem diese an der Abziehlasche vom Bauch weggezogen und langsam nach unten gerollt wird.

Es ist hilfreich, dabei mit der anderen Hand leichten Gegendruck auf die Bauchdecke auszuüben.

## Entsorgung

Das Produkt ist nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen und sollte gemäß den örtlichen Richtlinien, z. B. zusammen mit dem normalen Hausmüll, entsorgt werden.

Das Produkt nicht in der Toilette entsorgen.

### Weitere Informationen auf dem Beutel

Weitere Informationen zur Verwendung des Beutels finden Sie in der Gebrauchsanweisung, die im Verkaufskarton für die Beutel enthalten ist.



Eine Gebrauchsanweisung steht ebenfalls als Video zur Verfügung

Um das Anleitungsvideo anzusehen, können Sie entweder den QR-Code scannen oder gehen Sie zu

[www.coloplast.ch/concave-click](http://www.coloplast.ch/concave-click)

## Handhabung von wiederkehrenden Anliegen

?

### Die Basisplatte haftet nicht vorschriftsgemäß an der Haut

Befolgen Sie unbedingt die Anwendungsanleitung in dieser Broschüre und vergewissern Sie sich, dass die Haut vor dem Anbringen komplett sauber und trocken ist. Es ist wichtig, dass ein vollständiger Kontakt zwischen der Basisplatte und sämtlichen Hautfurchen besteht. Drücken Sie beim Anbringen auf die Basisplatte, um für eine ausreichende Adhäsion zu sorgen.

?

### Die Haut unter der Basisplatte ist rot und/oder gereizt

Eine Hautreizung kann diverse Ursachen haben. Sie kann durch Undichtigkeiten verursacht werden, wenn das falsche Versorgungssystem oder eine Schneidvorlage der falschen Größe verwendet wird. Sie kann allerdings auch das Ergebnis einer unzureichenden Reinigung oder schnellen Entfernung des Hautschutzes sein, was die Haut belasten kann. Wenn die Haut rot ist, ist möglicherweise ein Hautschutzentferner empfehlenswert. Besprechen Sie dieses Anliegen sobald wie möglich mit Ihrem Stomatherapeuten.

?

### Undichtigkeiten unter der Basisplatte

Undichtigkeiten können diverse Ursachen haben. Es kann durch eine Veränderung der Form oder Höhe des Körpers oder des Stomas oder mit einer fehlerhaften Anbringung der Basisplatte verursacht werden. Ziehen Sie den Mein StomabauchCheck-Selbsttest unter [www.bodycheck.coloplast.com](http://www.bodycheck.coloplast.com) in Betracht, um zu sehen, ob sich Ihre Körperform verändert hat. Ist dies der Fall, benötigen Sie möglicherweise ein anderes Versorgungssystem oder Sie könnten von einem Unterstützungsprodukt profitieren. Besprechen Sie dieses Anliegen sobald wie möglich mit Ihrem Stomatherapeuten.

## Symbolerklärung



Medizinprodukt



Einhaltung der europäischen Bestimmungen für Medizinprodukte



Katalognummer



Verfalldatum (TT. MM. JJJJ)



Chargennummer



Herstellungsdatum (JJJJ-MM-TT)



Hersteller



Gebrauchsanweisung befolgen



Nur für den einmaligen Gebrauch



Zeigt den Barcode mit der einheitlichen Produktkennzeichnung für Medizinprodukte (Unique Device Identification, UDI) an



(Global Trade Item Number) Globale Artikelnummer



Vor Sonnenlicht schützen



Hier oben



Recyclingfähige Verpackung



MR-sicher



### Gebrauchsanweisung

23325259 Version 1

Das Coloplast-Logo ist eine eingetragene Marke der Coloplast A/S.

Alle Rechte vorbehalten. © 2020-12-02



# SenSura<sup>®</sup> Mio Concave

## Concave Stoma Basisplatte

### 2-teilige Basisplatte zum Einklicken



## Gebrauchsanweisung