Scopo previsto

La sacca per stomia è concepita per raccogliere passivamente il materiale in uscita dallo stoma. La placca adesiva è fissata alla sacca per stomia ed è concepita per aderire alla cute peristomale

Il dispositivo è indicato per le persone stomizzate.

Si sconsiglia il riutilizzo dei prodotti monouso a causa del rischio di contaminazione incrociata.

Trattamento, lavaggio, disinfezione e/o (ri)sterilizzazione possono compromettere le caratteristiche del prodotto, determinando un ulteriore rischio di danno fisico o infezione per

Placca adesiva per stomia monouso.

Per una corretta conservazione, i prodotti devono essere conservati nella confezione che li protegge fino al momento dell'utilizzo; l'etichetta sulla confezione contiene informazioni importanti come codice del lotto, data di scadenza e codice a barre univoco.

Il dispositivo è compatibile con la risonanza magnetica (RM), quindi non è necessario rimuoverlo prima di una scansione RM.

Coloplast non si assume alcuna responsabilità per lesioni o perdite che potrebbero verificarsi se il prodotto venisse usato in modo non conforme alle raccomandazioni vigenti di Coloplast.

Condizioni di conservazione speciali

Conservare il prodotto in posizione orizzontale.

Conservare Iontano dai raggi solari.

Segnalazione di incidenti

Se durante l'utilizzo di questo prodotto o a seguito del suo utilizzo, si è verificato un incidente grave, si prega di segnalarlo al produttore e all'autorità nazionale.

Come utilizzare il prodotto

Preparazione



Praticare un foro nella placca usando un paio di forbici curve e la guida di taglio presente su di essa in modo tale che si adatti alla forma e alle dimensioni dello stoma.

È possibile misurare la dimensione e la forma dello stoma con la guida apposita fornita in dotazione.

La forma dello stoma può cambiare, quindi è consigliabile misurarlo quando ha la dimensione massima. Ciò accade spesso quando si è seduti.

Per ridurre il rischio di perdite e i problemi cutanei è molto importante che il foro corrisponda perfettamente allo stoma.



Pulire con cura lo stoma e la cute circostante. La cute deve essere completamente asciutta prima di procedere


Applicazione



Rovesciare tutti e 5 i petali per preparare la placca adesiva



Rimuovere il film protettivo dalla placca adesiva.

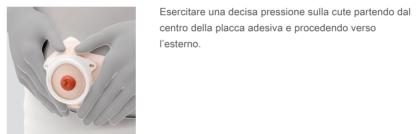

Tenere la placca adesiva in modo che i petali siano ripiegati.

Allineare la parte centrale della placca adesiva intorno allo

Quindi capovolgere i petali, disponendoli sull'area esterna.

Premere la parte centrale sulla cute usando cautela.



Applicare pressione dal centro della placca adesiva verso l'esterno in più direzioni per garantire un'aderenza sicura tra la placca adesiva e la cute attorno allo stoma.



Prima di applicare la sacca, assicurarsi che la placca adesiva sia pulita. Controllare che l'anello di blocco sia

Allineare la parte inferiore dell'aggancio della sacca con la parte inferiore dell'aggancio della placca adesiva.



circonda lo stoma. Esercitare con cautela una pressione sulla placca adesiva tra l'anello di aggancio e lo stoma per tenuta sulla cute.



Collocare il dito indice all'interno dell'anello di aggancio che

garantire che la parte centrale della placca sia a perfetta



Caratteristiche del prodotto



- Aletta della

cintura

Rimozione

Collegare insieme la sacca e la placca adesiva premendo sulla parte inferiore con il dito medio di entrambe le mani.



Premere con la punta del dito la piccola linguetta turchese rivolta verso l'addome per aprire l'anello di blocco.



Afferrare la linguetta di rimozione e rimuovere la sacca tirandola con molta attenzione dalla placca adesiva.



Chiudere l'anello di blocco comprimendolo. La sacca è fissata saldamente alla placca adesiva quando si percepisce uno scatto.

Tirare delicatamente la sacca per controllare che sia correttamente collegata.

Far scorrere gli indici verso l'alto e applicare una leggera

la sacca è saldamente fissata alla placca adesiva.

pressione sulla parte superiore dell'aggancio fino a quando



Rimuovere delicatamente la placca utilizzando l'aletta di rimozione presente su di essa e arrotolare lentamente la

Il prodotto è esclusivamente monouso e deve essere smaltito secondo le linee quida locali, ad esempio tra i rifiuti domestici.

Non gettare il prodotto nei sanitari.

Smaltimento

Ulteriori informazioni sulla sacca

Per ulteriori informazioni sull'uso della sacca, fare riferimento alle istruzioni per l'uso allegate alla sua confezione.



www.coloplast.ch/concave-clickIT

Accertarsi di seguire le istruzioni di applicazione riportate in questo foglietto illustrativo

La cute è arrossata e/o irritata sotto la placca adesiva

La cute irritata può avere molte cause. Può essere causata da una perdita causata dal possibile del problema con lo stomaterapista.

Perdita sotto la placca adesiva

stomaterapista.

La perdita può avere molte cause. Può essere causata dal corpo o stoma che cambia forma o altezza oppure da un'applicazione incorretta della placca adesiva. Prendere in considerazione l'autovalutazione BodyCheck online presso www.bodycheck.coloplast.com per controllare se il proprio profilo corporeo è cambiato. In tal caso, potrebbe essere necessario un dispositivo diverso o potrebbe essere utile

l'impiego di un prodotto di supporto. Parlare appena possibile del problema con lo

Spiegazione dei simboli







Non riutilizzare



Indica un codice a barre contenente UDI l'identificazione univoca del

per uso commerciale

Confezione riciclabile


(Global Trade Item Number)

Conservare Iontano dai raggi solari

Conservare in posizione verticale

con le frecce rivolte verso l'alto



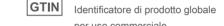

Data di scadenza (AAAA-MM-GG)







Data di produzione (AAAA-MM-GG)







Consultare le istruzioni per l'uso



Istruzioni per l'uso

23325261 Version 1

Il logo Coloplast è un marchio registrato di proprietà di Coloplast A/S. Tutti i diritti sono riservati.© 2020-12-08



SenSura®**Mio** Concave

Placca adesiva per stomia concava

Placca adesiva a 2 pezzi click



Istruzioni per l'uso

Applicare una leggera pressione sulla cute con la mano libera per agevolare la rimozione.

Risoluzione di problemi ricorrenti

La placca adesiva non si attacca correttamente alla cute

e che la cute sia completamente pulita e asciutta prima dell'applicazione. È importante che vi sia un contatto completo fra la placca adesiva e ogni solco della cute. Esercitare pressione sulla placca adesiva durante l'applicazione per assicurare una sufficiente

mancato utilizzo del dispositivo corretto o del modello di taglio della dimensione corretta. Può anche essere causata dalla pulizia insufficiente o dalla rapida rimozione dell'adesivo, che può causare sollecitazioni della cute. Se la cute è rossa, potrebbe essere utile utilizzare un dispositivo di rimozione dell'adesivo. Parlare appena