

Brava®

 **Coloplast**

Crème barrière

Coloplast n'accepte aucune responsabilité en cas de lésions ou de pertes susceptibles de survenir si ce produit est utilisé d'une manière contraire aux recommandations actuelles de Coloplast.

Conditions d'entreposage particulières

Conserver à l'abri de la lumière du soleil.

Mode d'utilisation

Étendre délicatement une très mince couche sur la peau propre. Enlever l'excès de crème à l'aide d'un mouchoir avant d'appliquer l'adhésif pour stomie.

Élimination

Le produit doit être éliminé avec les déchets ménagers normaux ou conformément aux directives locales.

Ne pas jeter le produit dans la toilette.

Déclaration des incidents

Si un incident grave s'est produit pendant l'utilisation de ce dispositif ou en raison de son utilisation, le signaler au fabricant et à votre autorité nationale.

Explication des symboles



Dispositif médical



Indique que le produit respecte la législation européenne régissant les dispositifs médicaux



Numéro de catalogue



Date limite d'utilisation (AAAA-MM-JJ)



Code de lot



Date de fabrication (AAAA-MM-JJ)



Fabricant



Consulter le mode d'emploi



Ne pas réutiliser



Indique qu'un code à barres contient une identification de dispositif unique



Conserver à l'abri de la lumière du soleil



Emballage recyclable



Mode d'emploi

23325521 Version 1

Le logo Coloplast est une marque déposée de Coloplast A/S. Tous droits réservés. © 2021-01-26

Distribué par:

Coloplast Canada Corporation
1380 Creditstone Road,
Unit 6&7
Concord, ON L4K 0J1
Tel.: 1-888-880-8605
www.coloplast.ca

Coloplast A/S

Holtedam 1
3050 Humlebaek
Danemark
Tél. : +45 49 11 11 11

Fin prévue

La crème barrière Brava vise à protéger la peau intacte qui entoure la stomie exposée au contenu intestinal, à l'urine et au pus.

Indications

La crème barrière Brava est indiquée pour les gens ayant une stomie.

Mises en garde

Conservez le produit à l'abri de la lumière du soleil sans quoi sa qualité pourrait être affectée.

Information

Le produit est une crème barrière qui permet l'adhérence des adhésifs pour stomie.

Ingrédients

eau, oléate cétéarylique, oléate de sorbitane, éthylènediamine de tétrahydroxypropyl, agent de conservation, émoullent