

Brava®

 **Coloplast**

Crema barrera



Instrucciones de uso

23325522 Version 1

El logotipo de Coloplast es una marca registrada de Coloplast A/S.

Todos los derechos reservados.© 2021-01-15

Uso previsto

La crema barrera Brava está indicada para la protección de la piel intacta que rodea al estoma y que está expuesta al contenido intestinal, orina y pus.

Indicaciones

La crema barrera Brava está indicada para personas con estoma.

Precauciones

Mantenga el producto alejado de la luz solar, ya que esta puede afectar a la calidad del producto.

Información

El producto permite que el adhesivo se adhiera.

Ingredientes

agua, olivato de cetearilo, olivato de sorbitán, tetrahidroxipropil etilendiamina, conservante, emulsionante

Coloplast no se hace responsable por ninguna lesión o pérdida que puedan producirse si este producto no se utiliza según las actuales recomendaciones de Coloplast.

Condiciones especiales de conservación

Mantenga el producto alejado de la luz solar.

Modo de empleo

Frote suavemente una capa muy ligera en la piel limpia. Limpie el excedente de crema con un pañuelo desechable antes de aplicar el adhesivo.

Eliminación

El producto debe desecharse con los residuos domésticos comunes o de acuerdo con las directrices locales. No tire el producto por el inodoro.

Notificación de incidentes

Si, durante el uso de este dispositivo o como resultado de su uso, se produce un incidente grave, notifíquelo al fabricante y a las autoridades nacionales.

Explicación de los símbolos



Producto sanitario



Indica que el producto cumple la legislación europea para productos sanitarios



Número de catálogo



Fecha de caducidad (DD-MM-AAAA)



Código de lote



Fecha de fabricación (DD-MM-AAAA)



Fabricante



Consulte las instrucciones de uso



No reutilizar



Indica un código de barras que contiene la Identificación Única del Dispositivo



Mantener alejado de la luz del sol



Envase reciclable