

Crema barrera

Condiciones especiales de conservación

Mantener alejado de la luz del sol.

Modo de empleo

Aplicar cuidadosamente una capa muy fina en la piel limpia. Retirar el exceso de crema con una gasa antes de aplicar el disco adhesivo de ostomía.

Eliminación

El producto debe desecharse con los residuos domésticos comunes o de acuerdo con las directrices locales.

No tire el producto por el inodoro.

Notificación de incidentes

Si, durante el uso de este dispositivo o como resultado de su uso, se produce un incidente grave, hay que notificarlo al fabricante y a las autoridades nacionales.

Explicación de los símbolos



Producto sanitario



Indica que el producto cumple la legislación europea para productos sanitarios



Número de catálogo



Fecha de caducidad (DD-MM-AAAA)



Código de lote



Fecha de fabricación (DD-MM-AAAA)



Fabricante



Consultar las instrucciones de uso



No reutilizar



Indica un código de barras que contiene la Identificación Única del Dispositivo



Mantener alejado de la luz solar



Envase reciclable



Instrucciones de uso

23325530 Version 1

El logotipo de Coloplast es una marca registrada de Coloplast A/S.

Todos los derechos reservados.© 2021-01-19

Distribuidor:

Coloplast Productos Médicos, S.A.

C/ Condesa de Venadito, 5-4ª

28027 Madrid (Spain)

Tel: 91 314 18 02

Fax: 91 314 14 65

Uso previsto

La crema barrera Brava está indicada para la protección de la piel intacta que rodea al estoma y que está expuesta al contenido intestinal, orina y pus.

Indicaciones

La crema barrera Brava está indicada para personas con un estoma.

Precauciones

Mantenga el producto alejado de la luz solar, ya que esta puede afectar a la calidad del producto.

Información

El producto permite la adhesión de la resina, la pasta y los discos adhesivos.

Ingredientes:

agua, derivados del aceite de oliva, tetrahidroxipropil-etilendiamina, acrilatos / polímero entrelazado de acrilato alquílico c10-30, fenoxietanol, ácido benzoico y ácido dehidroacético.

Coloplast no se hace responsable de ninguna lesión o pérdida que puedan producirse si este producto no se utiliza siguiendo las actuales recomendaciones de Coloplast.