

**Brava®**

 **Coloplast**

Crema effetto barriera

Coloplast non si assume alcuna responsabilità per lesioni o perdite che potrebbero verificarsi se il prodotto venisse usato in modo non conforme alle raccomandazioni vigenti di Coloplast.

### Condizioni di conservazione speciali

Conservare lontano dai raggi solari.

### Come utilizzare il prodotto

Applicare delicatamente uno strato molto sottile sulla cute pulita. Rimuovere la crema in eccesso con un fazzoletto di carta prima di applicare l'adesivo per stomia.

### Smaltimento

Il prodotto deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici o secondo le linee guida locali. Non gettare il prodotto nei sanitari.

### Segnalazione di incidenti

Se durante l'utilizzo di questo prodotto o a seguito del suo utilizzo, si è verificato un incidente grave, si prega di segnalarlo al produttore e all'autorità nazionale.



### Istruzioni per l'uso

23325547 Version 1

Il logo Coloplast è un marchio registrato di proprietà di Coloplast A/S.

Tutti i diritti sono riservati. © 2021-02-05

Coloplast AG  
Euro Business Center  
EURO 1  
Blegistrasse 1  
CH-6343 Röt Kreuz  
Tel: 041 799 79 79  
Fax: 041 799 79 40

### Scopo previsto

La crema effetto barriera Brava è concepita per proteggere la cute integra attorno allo stoma, esposta a contenuti intestinali, urina e pus.

### Indicazioni

La crema effetto barriera Brava è indicata per persone sottoposte a stomia.

### Precauzioni

Conservare lontano dalla luce solare poiché potrebbe incidere sulla qualità del prodotto.

### Informazioni

Il prodotto è una crema effetto barriera che consente l'adesione degli adesivi per stomia.

### Ingredienti

acqua, olivato di cetearile, sorbitano olivato, tetraidrossipropil etilendiammina, conservante, emulgatore

### Spiegazione dei simboli



Dispositivo medico



Indica che il prodotto è conforme alla legislazione europea per i dispositivi medici



Numero di catalogo



Data di scadenza (AAAA-MM-GG)



Codice di lotto



Data di produzione (AAAA-MM-GG)



Produttore



Consultare le istruzioni per l'uso



Non riutilizzare



Indica un codice a barre contenente l'identificazione univoca del dispositivo (UDI)



Conservare lontano dai raggi solari



Confezione riciclabile