

**Brava®**

 **Coloplast**

## Krem przeciwodparzeniowy

Firma Coloplast nie ponosi odpowiedzialności za urazy ani szkody, jakie mogą powstać ze stosowania niniejszego produktu w sposób niezgodny z aktualnymi zaleceniami firmy Coloplast.

### Specjalne warunki przechowywania

Przechowywać z dala od światła słonecznego.

### Sposób użycia

W oczyszczoną skórę delikatnie wetrzeć bardzo cienką warstwę. Przed założeniem przylepca stomijnego usunąć chusteczką nadmiar kremu.

### Utylizacja

Produkt można utylizować razem z odpadami komunalnymi lub zgodnie z lokalnymi wskazówkami. Nie należy splukiwać produktu w toalecie.

### Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych

Jeżeli w trakcie użytkowania tego produktu lub w wyniku jego użytkowania doszło do poważnego zdarzenia niepożądanego, należy zgłosić to producentowi i właściwemu organowi krajowemu.



### Instrukcja użycia

23325554 Version 1

Logo Coloplast jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Coloplast A/S.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2021-02-03

Dystrybutor:

Coloplast Sp. z o.o.  
ul. Inflancka 4  
00-189 Warszawa

Bezpłatna infolinia:  
800 300 300  
[www.coloplast.pl](http://www.coloplast.pl)

Tel (22) 535 60 00  
Fax (22) 535 60 74

### Przeznaczenie

Brava Krem przeciwodparzeniowy jest przeznaczony do ochrony nieuszkodzonej skóry wokół stomii przed działaniem treści jelitowej, moczu i ropy.

### Wskazania

Krem przeciwodparzeniowy Brava jest wskazany do stosowania u osób ze stomią.

### Środki ostrożności

Przechowywać z dala od światła słonecznego, ponieważ może mieć ono wpływ na jakość produktu.

### Informacje

Produkt pozwala na przyleganie pierścienia uszczelniającego w paskach i przylepców.

### Składniki

woda, oliwian cetearylu, oliwian sorbitanu, tetrahydroksypropyloetylenodiamina, środek konserwujący, emulgator

### Objaśnienie symboli



Urządzenie medyczne



Oznaczenie wskazujące, że produkt jest zgodny z przepisami europejskimi dotyczącymi wyrobów medycznych.



Numer katalogowy



Termin ważności (RRRR-MM-DD)



Numer serii



Data produkcji (RRRR-MM-DD)



Producent



Przeczytaj instrukcję użycia



Do jednorazowego użytku



Wskazuje, że kod kreskowy zawiera niepowtarzalny numer identyfikacyjny urządzenia



Przechowywać z dala od światła słonecznego



Opakowanie nadające się do recyklingu