

Vor direktem Sonnenlicht schützen.

**Hautschutz Creme**

**Anwendung**

Eine dünne Schicht vorsichtig auf der sauberen Haut verreiben. Überschüssige Creme vor dem Anbringen des Hautschutzes mit einem Papiertuch entfernen.

**Entsorgung**

Das Produkt sollte mit dem normalen Hausmüll oder gemäß den örtlichen Richtlinien entsorgt werden. Das Produkt nicht in der Toilette entsorgen.

**Meldung von Zwischenfällen**

Wenn es während oder infolge der Anwendung dieses Produkts zu einem schweren Zwischenfall kommt, melden Sie dies bitte dem Hersteller und der entsprechenden Behörde Ihres Landes.



**Gebrauchsanleitung**

23325561 Version 1

Das Coloplast-Logo ist eine eingetragene Marke der Coloplast A/S. Alle Rechte vorbehalten.© 2021-01-26

Coloplast GmbH  
 Thomas Klestil Platz 10  
 1030 Wien  
 at@coloplast.com  
 www.coloplast.at  
 Tel: (01) 707 57 51-0  
 Fax: (01) 707 57 51 40

**Erläuterung der Symbole**



Medizinprodukt



Weist darauf hin, dass das Produkt der europäischen Gesetzgebung für Medizinprodukte entspricht



Katalognummer



Verfalldatum (JJJJ-MM-TT)



Chargennummer



Herstellungsdatum (JJJJ-MM-TT)



Hersteller



Gebrauchsanweisung beachten



Nicht wiederverwenden



Bedeutet, dass der Strichcode eine Unique Device Identification enthält



Vor direktem Sonnenlicht schützen



Wiederverwertbare Verpackung

**Verwendungszweck**

Die Brava Schutzcreme ist zum Schutz der intakten Haut rund um das Stoma bestimmt, die mit Darminhalt, Urin und Eiter in Berührung kommt.

**Indikation**

Die Brava Schutzcreme ist für Menschen mit einem künstlichen Darmausgang (Stoma) indiziert.

**Vorsichtshinweise**

Vor Sonnenlicht schützen, da dies die Qualität des Produkts beeinträchtigen kann.

**Information**

Das Produkt ermöglicht die Haftung von Hautschutz- und Haftmaterialien.

Inhaltsstoffe:

Wasser, Cetearylolivat, Sorbitanolivat, Tetrahydroxypropyl-Ethylendiamin, Konservierungsmittel, Emulgator

Coloplast übernimmt keine Haftung für jegliche Verletzungen oder gesundheitliche Beeinträchtigungen, die aus einer anderen als der den aktuellen Empfehlungen von Coloplast entsprechenden Verwendung dieses Produkts entstehen.