

Hautschutzcreme

Besondere Lagerungsbedingungen

Vor Sonnenlicht schützen.

Anwendung

Reiben Sie sanft eine sehr dünne Schicht auf die saubere Haut. Entfernen Sie überschüssige Creme mit einem Papiertuch, bevor Sie den Stoma-Hautschutz anlegen.

Entsorgung

Das Produkt sollte im normalen Hausmüll oder gemäß den örtlichen Richtlinien entsorgt werden. Das Produkt nicht in der Toilette entsorgen.

Meldung von Vorfällen

Falls es während der bzw. durch die Anwendung dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Vorfall gekommen ist, melden Sie diesen bitte dem Hersteller und der zuständigen Behörde in Ihrem Land.



Gebrauchsanweisung

23325564 Version 1

Das Coloplast-Logo ist eine eingetragene Marke der Coloplast A/S. Alle Rechte vorbehalten.© 2021-01-25

Coloplast Belgium NV/SA
De Gijzeleer Industrial Park
Guido Gezellestraat 121
B-1654 Beersel/Huizingen
Tel.:+ 32 (2) 334.35.35
Fax:+ 32 (2) 334.35.36

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Brava Hautschutzcreme ist zum Schutz intakter Haut um das Stoma bestimmt, die Darminhalt, Urin und Eiter ausgesetzt ist.

Indikationen

Die Brava Hautschutzcreme ist für Stomaträger bestimmt.

Wichtige Hinweise

Vor direktem Sonnenlicht schützen, da dies die Produktqualität beeinträchtigen kann.

Information

Das Produkt ermöglicht die Haftung von Hautschutz- und Haftmaterialien.

Inhaltsstoffe

Wasser, Cetearyl Olivat, Sorbitan Olivat, Tetrahydroxypropyl-Ethylendiamin, Konservierungsmittel, Emulgator

Coloplast übernimmt keine Haftung für jegliche Verletzungen oder gesundheitliche Beeinträchtigungen, die aus einer anderen als der den aktuellen Empfehlungen von Coloplast entsprechenden Verwendung dieses Produkts entstehen.

Symbolerklärung



Medizinprodukt



Einhaltung der europäischen Bestimmungen für Medizinprodukte



Katalognummer



Verfallsdatum (TT.MM.JJJJ)



Chargennummer



Herstellungsdatum (TT.MM.JJJJ)



Hersteller



Gebrauchsanweisung befolgen



Nur für den einmaligen Gebrauch



Zeigt den Barcode mit der einheitlichen Produktkennzeichnung für Medizinprodukte (Unique Device Identification, UDI) an



Vor Sonnenlicht schützen



Recyclingfähige Verpackung