

Brava®

 **Coloplast**

Conditions particulières de stockage

Garder à l'abri de la lumière.

Crème de protection cutanée

Utilisation

Appliquer délicatement une très fine couche sur une peau propre. Essuyer le surplus de crème à l'aide d'un mouchoir en papier avant d'appliquer le protecteur cutané adhésif pour stomie.

Élimination

Le produit doit être éliminé avec les déchets ménagers ordinaires ou conformément aux directives locales. Ne pas jeter le produit dans les toilettes.

Signalement des incidents

Si un incident grave s'est produit au cours de l'utilisation de ce dispositif ou suite à son utilisation, le signaler au fabricant et aux autorités nationales compétentes.

Explication des symboles



Dispositif médical



Indique que le produit est conforme à la législation européenne en ce qui concerne les dispositifs médicaux



Référence catalogue



Date de péremption (AAAA-MM-JJ)



Numéro de lot



Date de fabrication (AAAA-MM-JJ)



Fabricant



Consulter la notice d'utilisation



Ne pas réutiliser



Présente un code-barres qui contient le numéro d'identification unique du dispositif



Conserver à l'abri de la lumière



Emballage recyclable



Mode d'emploi

23325568 Version 1

Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S. Tous droits réservés. © 2021-01-19

Laboratoires Coloplast
6, rue de Rome
93561 Rosny-sous-bois Cedex
France
Tél: 01 56 63 17 00
Fax: 01 56 63 18 07

Destination

La crème de protection cutanée Brava est destinée à la protection de la peau intacte autour de la stomie exposée aux effluents intestinaux, à l'urine et au pus.

Indications

La crème de protection cutanée Brava est indiquée pour les personnes stomisées.

Précaution d'emploi

Maintenir à l'abri de la lumière du soleil, car cela pourrait affecter la qualité du produit.

Informations

Le produit permet aux supports de poche de stomies de coller.

Ingrédients

eau, olivate cétéarylique, olivate de sorbitane, tétrahydroxypropyléthylènediamine, conservateur, émulsifiant

Coloplast ne peut être tenu pour responsable des dommages pouvant résulter de l'emploi de ce produit dans des conditions non conformes aux instructions données dans la notice d'utilisation.