

## Schutzcreme



### Gebrauchsanweisung

23325569 Version 1

Das Coloplast-Logo ist eine eingetragene Marke der Coloplast A/S. Alle Rechte vorbehalten. © 2021-02-04

Coloplast GmbH  
Kuehnstraße 75  
22045 Hamburg  
www.coloplast.de  
Tel. 040/66 98 07-77  
Fax 040/66 98 07-48

### Verwendungszweck

Die Brava Schutzcreme ist zum Schutz der stomaumgebenden intakten Haut bestimmt, die Darminhalt, Urin und Eiter ausgesetzt ist.

### Indikationen

Brava Barrier Cream is indicated for people with a stoma.

### Vorsichtsmaßnahmen

Vor direktem Sonnenlicht schützen, da dies die Produktqualität beeinträchtigen kann.

### Informationen

Das Produkt ermöglicht die Haftung von Hautschutz- und Haftmaterialien.

#### Inhaltsstoffe

Wasser, Cetearylolivat, Sorbitanolivat, Tetrahydroxypropylethylendiamin, Konservierungsmittel, Emulgator

Coloplast übernimmt keine Haftung für jegliche Verletzungen oder gesundheitliche Beeinträchtigungen, die aus einer anderen als der den aktuellen Empfehlungen von Coloplast entsprechenden Verwendung dieses Produkts entstehen.

### Besondere Lagerungsbedingungen

Vor Sonnenlicht schützen.

### Anwendungshinweise

Eine sehr dünne Schicht vorsichtig auf der sauberen Haut einreiben. Überschüssige Creme vor dem Anbringen des Stomahautschutzes mit einem Papiertuch entfernen.

### Entsorgung

Das Produkt sollte gemäß den örtlichen Richtlinien mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Das Produkt nicht in der Toilette entsorgen.

### Meldung von Vorkommnissen

Falls es während der bzw. durch die Anwendung dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Vorkommnis gekommen ist, melden Sie dieses bitte dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde.

### Symbolerklärung



Medizinprodukt



Einhaltung der europäischen Bestimmungen für Medizinprodukte



Katalognummer



Verfalldatum (JJJJ-MM-TT)



Chargennummer / LOT-Nummer



Herstellungsdatum (JJJJ-MM-TT)



Hersteller



Gebrauchsanweisung befolgen



Nur für den einmaligen Gebrauch



Zeigt an, dass ein Barcode eine Unique Device Identification (UDI) enthält



Vor Sonnenlicht schützen



Recyclingfähige Verpackung