

### Finalidade prevista

A bolsa para ostomia é indicada para coletar passivamente efluentes de um estoma. A base adesiva é presa à bolsa para ostomia e deve aderir à pele intacta ao redor do estoma.

### Indicações

O dispositivo é indicado para pessoas com estoma.

### Alertas

A reutilização do produto de uso único não é recomendada, pois pode ocorrer contaminação cruzada.

O reprocessamento, a lavagem, a desinfecção e/ou a nova esterilização podem comprometer as características do produto, o que poderá causar um risco adicional de danos físicos ou infecção ao usuário.

### Informação

Base adesiva de uso único para ostomia.

Os produtos devem ser armazenados na caixa até serem removidos para uso, pois a caixa protege o produto, e a etiqueta na caixa contém informações importantes como número do lote, data de validade e código de barras exclusivo.

O dispositivo não precisa ser removido antes da varredura por RM, pois é seguro para RM.

A Coloplast não aceita qualquer responsabilidade por qualquer lesão ou perda que possa decorrer se este produto for utilizado de forma contrária às atuais recomendações da Coloplast.

### Condições de armazenamento especial

Armazenar o produto horizontalmente.

Manter afastado da luz solar.


### Comunicação de incidentes

Se, durante o uso deste dispositivo ou como resultado de seu uso, ocorreu um incidente grave, informe-o ao fabricante e à sua autoridade nacional.

## Como utilizar

### Preparação

1

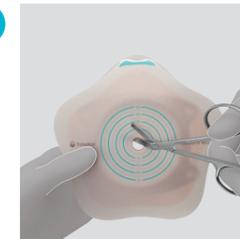

Recorte a base adesiva para ajustá-la ao tamanho e formato exatos do estoma usando uma pequena tesoura curva e o guia de corte na base adesiva.


Você pode usar o guia de medição do estoma incluído para medir o tamanho e a forma do estoma.

O formato do seu estoma pode mudar, por isso é recomendável que você o meça quando estiver em seu maior tamanho. Isso geralmente ocorre ao se sentar.

É importante haver um ajuste exato entre o orifício e o estoma, para reduzir o risco de vazamento e de problemas de pele.


Limpe cuidadosamente o estoma e a área de pele ao seu redor. A pele deve estar totalmente seca antes de aplicar o adesivo.

2

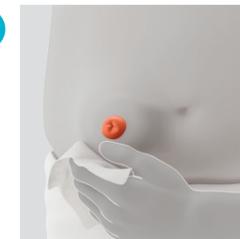


### Aplicação

3

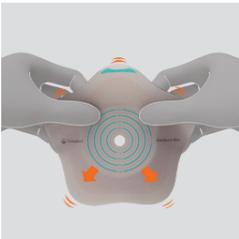


Vire as 5 abas para preparar a base adesiva para aplicação.

4

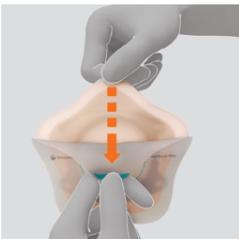

Remova o filme protetor da base adesiva.

5

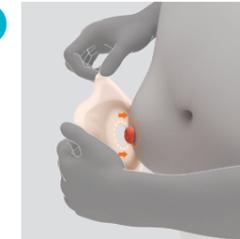

Segure a base adesiva com as abas dobradas para trás. Alinhe a parte central da base adesiva ao redor do estoma.

6




Pressione a base adesiva firmemente sobre a pele, do centro para fora.

7




Coloque o dedo indicador dentro do anel de acople que envolve o estoma. Cuidadosamente aplique pressão na base adesiva, entre o anel de acople e o estoma para garantir que a parte central da base adesiva forme uma vedação firme na pele.

8

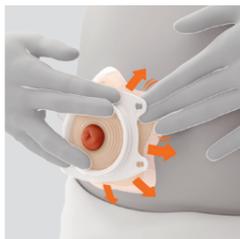

Aplique pressão do centro da base adesiva para fora em várias direções para garantir a adesão segura entre a base adesiva e a pele ao redor do estoma.


9

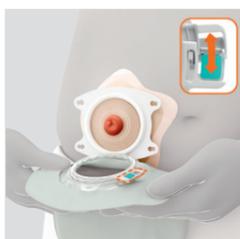


Antes de aplicar a bolsa, verifique se a base adesiva está limpa. Verifique se o anel de trava está aberto.

Alinhe a parte inferior do acople da bolsa com a parte inferior do acople da base adesiva.

## Características do produto

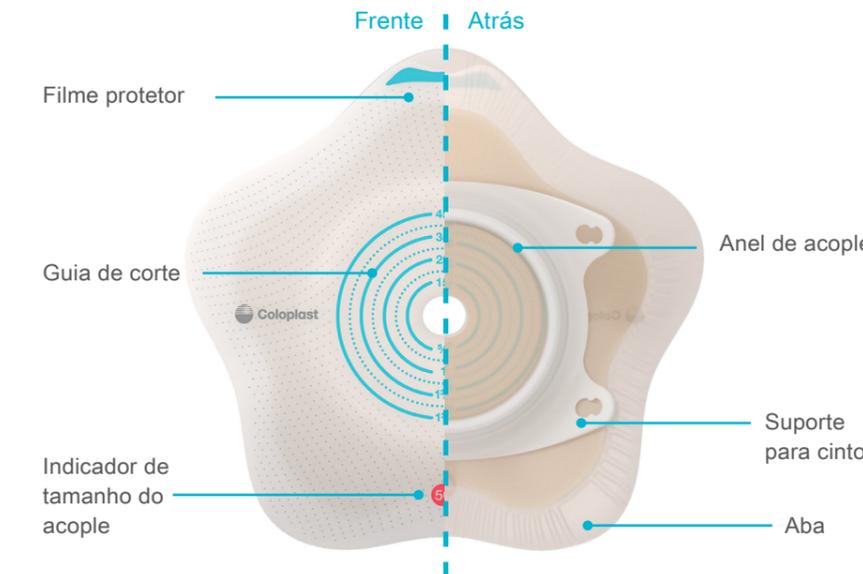


10

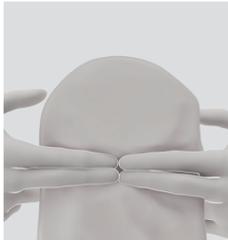


Conecte a bolsa e a base adesiva pela parte inferior com os dedos médios.

11

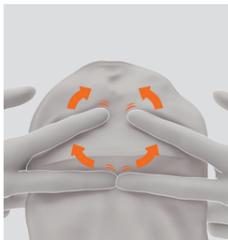

Deslize os dedos indicadores para cima e aplique uma pressão leve na parte superior do acople **até sentir que a bolsa está bem presa** na base adesiva.

12

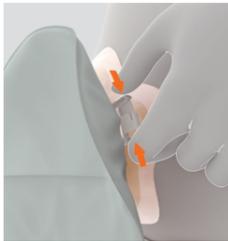

Fechando o anel de trava pressionando a trava. A bolsa estará firmemente presa à base adesiva quando você escutar um "clique".  
Puxe cuidadosamente a bolsa para verificar se ela está corretamente encaixada.

## Remoção

1



Pressione a pequena aba cor turquesa voltada para o estômago com a ponta do dedo para abrir o anel de trava.

2



Segure a aba de remoção da bolsa e remova a bolsa puxando-a **cuidadosamente** para longe da base adesiva.

3



Remova cuidadosamente a base adesiva puxando a aba de remoção para longe do estômago e role a base adesiva lentamente para baixo.

Aplique uma leve pressão sobre a pele, com a mão livre, para ajudar na remoção.

## Descarte

O produto é destinado apenas para uso único e deve ser descartado de acordo com as diretrizes locais, por exemplo, com o lixo doméstico comum.

Não jogue o produto no vaso sanitário.

### Mais informações na bolsa

Para obter mais informações sobre como usar a bolsa, consulte as instruções de utilização que acompanham a caixa das bolsas.



As instruções de utilização também estão disponíveis em vídeo

Para ver o vídeo de instruções, você pode fazer a leitura do código QR

ou acessar

<https://produtos.coloplast.com.br/coloplast/estomia/sensura-mio-concave/>

## Resolução de problemas recorrentes

?

### A base adesiva não está aderindo corretamente na pele

Certifique-se de seguir as instruções de aplicação neste folheto e verifique se a pele está completamente limpa e seca antes da aplicação. É importante que haja contato total entre a base adesiva e cada sulco da pele. Aplique pressão sobre a base adesiva ao aplicá-la, para garantir adesão suficiente.

?

### A pele está vermelha e/ou irritada sob a base adesiva

A irritação cutânea pode ter muitas causas. Ela pode ser causada por vazamentos devido ao uso incorreto do dispositivo ou ao uso de modelo de corte de tamanho incorreto. Mas ela também pode ser resultado de limpeza insuficiente ou remoção rápida do adesivo, o que pode machucar a pele. Se a pele estiver vermelha, um removedor de adesivo pode ser útil. Discuta o problema com seu enfermeiro estomaterapeuta o mais rápido possível.

?

### Vazamento sob a base adesiva

O vazamento pode ter muitas causas. Pode ser resultado de uma mudança no formato corporal, no formato ou na altura do estoma ou da aplicação incorreta da base adesiva. Considere fazer a autoavaliação BodyCheck on-line em [www.bodycheck.coloplast.com](http://www.bodycheck.coloplast.com) para ver se o seu perfil corporal mudou. Nesse caso, você pode precisar de um dispositivo diferente ou pode se beneficiar de um produto de suporte. Discuta o problema com seu enfermeiro estomaterapeuta o mais rápido possível.

## Explicação dos símbolos

MD

Dispositivo médico

CE

Indica que o produto está em conformidade com a legislação europeia para dispositivos médicos

REF

Número de catálogo

Validade (DD-MM-AAAA)

LOT

Código do lote

Data de fabricação (DD-MM-AAAA)

Fabricante

Consultar as instruções para utilização

Não reutilizar

UDI

Indica um código de barra contendo a Identificação Exclusiva do Dispositivo

GTIN

(Global Trade Item Number) Número global de item comercial

Manter afastado da luz solar

Este lado para cima

Embalagem reciclável

MR

Seguro para RM

CE

Coloplast A/S  
Høveddam 1  
3050 Humlebaek  
Denmark

### Instruções de utilização

23325655 Version 1

O logotipo da Coloplast é uma marca registrada da Coloplast A/S. Todos os direitos reservados. © 2021-01-07


Coloplast do Brasil Ltda, Rua Luis Correia de Melo, n° 92,  
Conj 141, Vila Cruzeiro, São Paulo - SP, Brasil  
CEP 04.726-220, CNPJ: 02.794.555/0003-40  
Resp. Tec: Daniel F. P da Silva, CRF-SP: 99504  
Serviço de Apoio ao Cliente (SAC), Tel.: 0800 285 86 87  
Reg. ANVISA: 10430310166



# SenSura<sup>®</sup> Mio Concave

## Base adesiva côncava para ostomia

## Base adesiva Click de duas peças

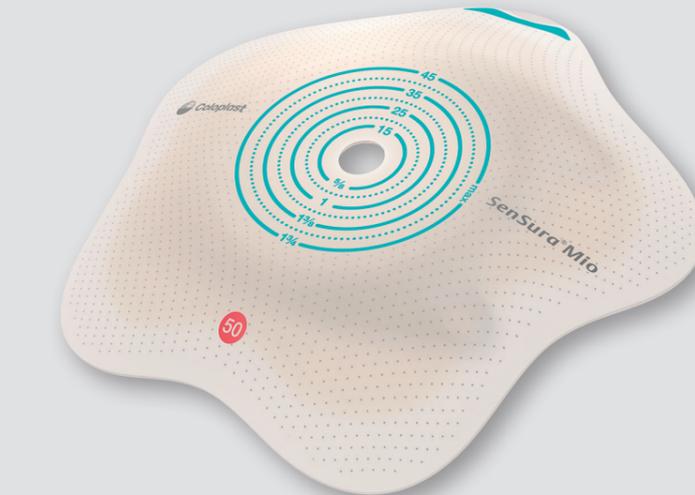

## Instruções de utilização