

Modellierbarer Hautschutzring Plus

Stomaversorgung



Coloplast A/S
Høfledam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Gebrauchsanweisung

23325685 Version 1

Das Coloplast-Logo ist eine eingetragene Marke der Coloplast A/S. Alle Rechte vorbehalten. © 2021-01-26

Verwendungszweck

Der Brava Modellierbare Hautschutzring Plus ist dafür vorgesehen, eine Abdichtung zwischen der intakten peristomalen Haut und der Stoma-Basisplatte zu schaffen und so die Haut vor Ausscheidungen aus dem Stoma zu schützen. Das Produkt wurde dafür entwickelt, Vertiefungen/Falten in der peristomalen Haut aufzufüllen.

Warnhinweise

Die Wiederverwendung des Produkts für den Einmalgebrauch kann die Gesundheit des Benutzers potenziell gefährden.

Wiederaufbereiten, Waschen, Desinfektion und/oder Sterilisation können die Produktmerkmale beeinträchtigen und ein zusätzliches Körperverletzungs- oder Infektionsrisiko für den Benutzer verursachen.

Vorsichtsmaßnahmen


Vor Sonnenlicht schützen.

Information

Coloplast übernimmt keine Haftung für jegliche Verletzungen oder gesundheitliche Beeinträchtigungen, die aus einer anderen als der den aktuellen Empfehlungen von Coloplast entsprechenden Verwendung dieses Produkts entstehen.


Anwendung

Vorbereitung

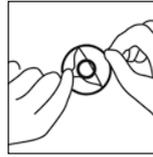


Vor dem Anbringen des Brava Modellierbaren Hautschutzringes Plus ist sicherzustellen, dass die Haut im Stomabereich sauber und trocken ist.

Den Ring aus der Blisterverpackung nehmen und anschließend die Schutzfolie von beiden Seiten an den Laschen abziehen.

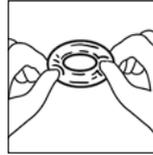


Den Ring in die gewünschte Form modellieren und ziehen.

Anwendung

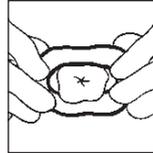

Den Brava Modellierbaren Hautschutzring Plus auf die Haut um das Stoma herum aufbringen. Bei Bedarf die Form des Ringes nachbessern. Den Ring mit den Fingern modellieren, bis der Rand überall glatt auf der Haut aufliegt.

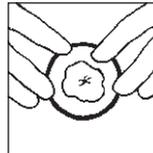

Der Ring kann auch auf die die Stomaplatte einer einteiligen Versorgung aufgebracht und anschließend mit dieser zusammen auf die Haut appliziert werden.

Wenn eine zweiteilige Stomaversorgung verwendet wird, kann der Ring direkt auf die haftende Fläche der Basisplatte aufgebracht werden, um ein enges Anliegen am Stoma zu gewährleisten.

Den Beutel wie üblich anbringen.

Entfernung

Ziehen Sie die Basisplatte zusammen mit dem Brava Modellierbaren Hautschutzring Plus von der Haut ab. Der Ring löst sich zusammen mit der Basisplatte ab. Wenn geringe Rückstände auf der Haut verbleiben sollten, schadet dies der Haut nicht. Auch die Haftung des nächsten Ringes oder der nächsten Basisplatte wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Entsorgung


Das Produkt zusammen mit dem normalen Hausmüll oder gemäß den örtlichen Richtlinien entsorgen.

Das Produkt nicht in der Toilette entsorgen.

Meldung von Vorkommnissen

Falls es während der bzw. durch die Anwendung dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Vorkommnis gekommen ist, melden Sie dieses bitte dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde.

Symbole

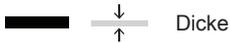

Symbolerklärung

