

Zweiteiliger geschlossener Stomabeutel

Stoma-Basisplatte

Stomapflege



Gebrauchsanweisung

23326085 Version 1

Das Coloplast-Logo ist eine eingetragene Marke der Coloplast A/S. Alle Rechte vorbehalten. © 2021-02-06

Bestimmungsgemässe Verwendung

Der Stomabeutel ist dafür bestimmt, Ausscheidungen aus einem Stoma passiv aufzunehmen. Die Hautschutz-Basisplatte wird am Stomabeutel befestigt und ist dafür bestimmt, an der intakten Haut rund um das Stoma zu haften.

Indikationen

Das Produkt ist für Menschen mit einem Stoma indiziert.

Warnhinweise

Eine Wiederverwendung des Einwegprodukts wird aufgrund des Risikos von Kreuzkontamination nicht empfohlen.

Wiederaufbereitung, Reinigung, Desinfektion und/oder (Re-)Sterilisation können die Produkteigenschaften beeinträchtigen und für den Anwender ein zusätzliches Risiko für körperliche Schäden oder Infektion begründen.

Vorsichtshinweise

Sprechen Sie für einen zweckentsprechenden Einsatz vor der ersten Anwendung eines konvexen Produkts mit Ihrer medizinischen Fachkraft.

Dieses unsterile Produkt enthält Ausgangsmaterialien natürlichen Ursprungs und es besteht ein Risiko, dass die Materialien Krankheitserreger enthalten, die selbst mit den striktesten Fertigungsverfahren nicht vollständig entfernt werden können.

Daher geht von dem Produkt ein erhöhtes Infektionsrisiko für gefährdete Patientengruppen aus und es sollte bei Babys und Säuglingen mit nicht ausgereiftem Immunsystem sowie bei Säuglingen/Kleinkindern, die eine immunsuppressive Therapie erhalten, mit Vorsicht eingesetzt werden.

Information

Stomabeutel zum Einmalgebrauch.

Die Produkte sind bis zur Entnahme zur Verwendung im Karton aufzubewahren, da der Karton die Produkte schützt und das Kartonetikett wichtige Informationen wie Chargennummer, Verfallsdatum sowie einen eindeutigen Strichcode enthält.

Das Produkt muss vor einer MRT-Untersuchung nicht abgenommen werden, da es MR-sicher ist.


Besondere Lagerungsbedingungen

Vor direktem Sonnenlicht schützen.

Basisplatte horizontal lagern.


Anwendungshinweise

Vorbereitung

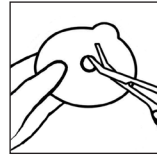

Schneiden Sie mit einer kleinen gebogenen Schere mithilfe der Ausschneidehilfe auf der Basisplatte ein Loch genau in der Grösse und Form des Stomas in die Basisplatte.

Grösse und Form des Stomas können mit Hilfe der beiliegenden Stomamesshilfe ermittelt werden. Ein passgenauer Sitz zwischen Loch und Stoma ist wichtig, um das Risiko von Leckagen und Hautirritationen gering zu halten.

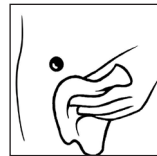

Das Stoma und die umgebende Hautfläche gründlich reinigen. Die Haut muss vor dem Anbringen der Basisplatte vollständig trocken sein.


Applikation



Ziehen Sie die Schutzfolie von der Haftfläche ab.




Bringen Sie die Basisplatte rund um das Stoma ausgerichtet an und drücken Sie sie an, um ein rasches Haften und einen perfekten Sitz zwischen der Haftfläche und der Haut um das Stoma herum zu gewährleisten. Die Haftfläche muss das Stoma fest umschliessen. Um Leckagen zu vermeiden, ist es wichtig sicherzustellen, dass das Stoma gut abgedichtet wird. Beim Ausüben von Druck auf die Basisplatte/den Beutel am Bauch beginnen Sie im Bereich um das Stoma herum und drücken Sie die Haftfläche auf die Haut. Fahren Sie mit einem Finger komplett um das Stoma herum, um sicherzustellen, dass die Haftfläche abdichtet. Streichen Sie die Haftfläche glatt. Beginnen Sie hierzu am Stoma und streichen Sie nach aussen in Richtung Rand, um sicherzustellen, dass die Haftfläche guten Hautkontakt hat.

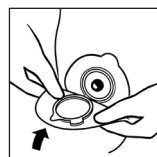

Sicherstellen, dass die Basisplatte trocken und sauber ist (zur Reinigung der Basisplatte ausschliesslich Wasser verwenden).

Der Rastring muss geöffnet sein. Positionieren Sie die Unterseite der Beutelkupplung an der Unterseite der Basisplattenkupplung.

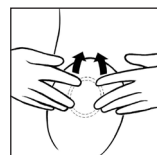

Drücken Sie den Beutel und die Basisplatte unten mit den Mittelfingern zusammen.




Schliessen Sie den Rastring durch Zusammendrücken des Verschlusses. Der Beutel ist sicher mit der Basisplatte verbunden, wenn ein Klicken hörbar ist.


Entfernung



Entfernen Sie den Beutel durch Öffnen des Rastrings, indem Sie mit der Fingerspitze auf die kleine Lasche drücken.

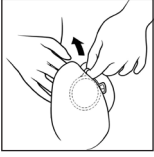

Halten Sie die Abziehlasche fest und nehmen Sie den Beutel ab, indem Sie den Beutel vorsichtig von der Basisplatte abziehen.

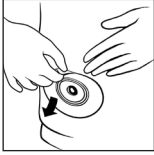

Entfernen Sie die Basisplatte vorsichtig, indem Sie diese an der Abziehlasche vom Bauch wegziehen und langsam nach unten rollen. Es ist hilfreich, dabei mit der anderen Hand leichten Gegendruck auf die Haut auszuüben.

Entsorgung

Das Produkt ist nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen und sollte gemäss den örtlichen Richtlinien, z. B. zusammen mit dem normalen Hausmüll, entsorgt werden.

Das Produkt nicht in der Toilette entsorgen.

Filterabdeckung



Falls erforderlich, eine der beiliegenden Filterabdeckungen auf den Filterauslass anbringen, um ein Entweichen von Gas zu verhindern.

Meldung von Vorfällen

Falls es während der bzw. durch die Anwendung dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Vorfall gekommen ist, melden Sie diesen bitte dem Hersteller und der zuständigen Behörde in Ihrem Land.

Symbolerklärung



Medizinprodukt



Zeigt an, dass das Produkt die europäischen Bestimmungen für Medizinprodukte einhält



Katalognummer



Verfalldatum (JJJJ-MM-TT)



Chargennummer



Herstellungsdatum (JJJJ-MM-TT)



Hersteller



Gebrauchsanweisung befolgen



Nicht wiederverwenden



Zeigt den Barcode mit der einheitlichen Produktkennzeichnung für Medizinprodukte (Unique Device Identification, UDI) an



(Global Trade Item Number) Globale Artikelnummer



Vor Sonnenlicht schützen



Hier oben



Recyclingfähige Verpackung



MR-sicher